

コエステーションの音声を「伝の心」で使うには

スマートフォンアプリのコエステーションで作成した「コエ」を、「伝の心」からご利用の際は、本手順書を、ご一読くださいますようお願い申し上げます。なお、本手順書に記載の各種作業は、介護者またはサポートの方が行ってください。

また、本書末尾に「重要なお知らせ(必ずお読みください)」がございますので、必ずご一読くださいますようお願い申し上げます。

コエステーションアプリのダウンロード

スマートフォンで、下記サイトまたは右のQRコードより、コエステーションアプリのダウンロードを行ってください。

<https://coestation.jp/consumer/coestationapp/>



※Apple iOS の対応バージョンや対応機種に関しては、コエステーションのサイトやダウンロードサイトにてご確認ください。

※Android の対応バージョンに関しては、コエステーションのサイトやダウンロードサイトにてご確認ください。

iPhone または iPad で設定する場合はこちらから

Android のスマホまたはタブレットで設定する場合はこちらから

ユーザー登録

(1) アプリを起動し、**新規登録**ボタンから、ユーザー情報を登録しましょう。

The image shows two screenshots from an app. The left screenshot is the main screen with the 'coestation' logo and a '新規登録' (New Registration) button highlighted with a pink rounded rectangle. The right screenshot is the '新規登録' (New Registration) form. The 'メールアドレス' (Email Address) field, containing 'sample@email.com', is highlighted with a pink rounded rectangle. A pink arrow points from the '新規登録' button on the left to the registration form on the right. A callout box with a pink border points to the email field, containing the text: 'このメールアドレスに、登録の為の認証コードメールが届く' (A verification code email will be sent to this email address).

version: 2.0.0 (71f12c9)

coestation™

コエステーションは、入力された文字をあなた
読み上げることができるサービスです。
あなたの声を録音して、
あなたの声の素「コエ」を作ります。

新規登録

ログイン

新規登録

ニックネーム
(10文字まで)

メールアドレス
sample@email.com

パスワード

パスワード (確認)

生年月日

性別
 女性 男性 無回答
※ あなたにより近い「コエ」を作るために、正しく選択してください。
※ コエの似る度合いには個人差があります。

リンク先の [利用規約](#)、および [プライバシーポリシー](#) をご確認の上、チェックボックスにチェックを入れてください。

本アプリの利用に利用規約とプライバシーポリシーが適用されることに同意する

仮登録する

(2) ユーザー情報を入力したら、**仮登録する**ボタンを選択してください。
認証コードが「noreply@coestation.jp」から登録したメールアドレス宛に送られます。

※事前に迷惑メールフィルターなどの設定をご確認いただき、「noreply@coestation.jp」からのメールを受信できるように設定しておいてください。

(3) メールに記載されている 6 桁のコードを入力し、**確認**ボタンを選択して本登録をしましょう。

【コエステ】メールアドレス 11:34
仮登録完了（認証コードのご案内）

noreply@coestation.jp 宛先: 伝の心ユーザー@〇〇〇〇

コエステへのご登録ありがとうございます。
本メールはコエステの会員IDとして設定されたメールアドレスの有効確認を行うために自動送信されています。下記の認証コード（数字6桁）をアプリ内「認証」メニューから入力し、会員登録を完了してください。

この認証コードを入力

認証コード：★★★★★★

*上記認証コードの有効期間は送信から24時間です。

新規登録

メールアドレスの確認

メールアドレスに送信された認証コードを入力してください

★★★★★★

確認

(4) 登録に成功したら、登録したメールアドレスとパスワードでログインします。

新規登録

新規登録が完了しました

ログイン

メールアドレスとパスワードを入力

ログイン

メールアドレス

伝の心ユーザー@〇〇〇〇

パスワード

パスワードを忘れた方はこちら


認証コードの再送信はこちら

「コエ」の登録

(1) 初回ログイン時は、使い方のチュートリアルが表示されるので、ここで使い方を確認しましょう。

◀ ▶ ボタンで表示を切替られます。


さっそくはじめよう！ ボタンを選択すると、チュートリアルを終了します。

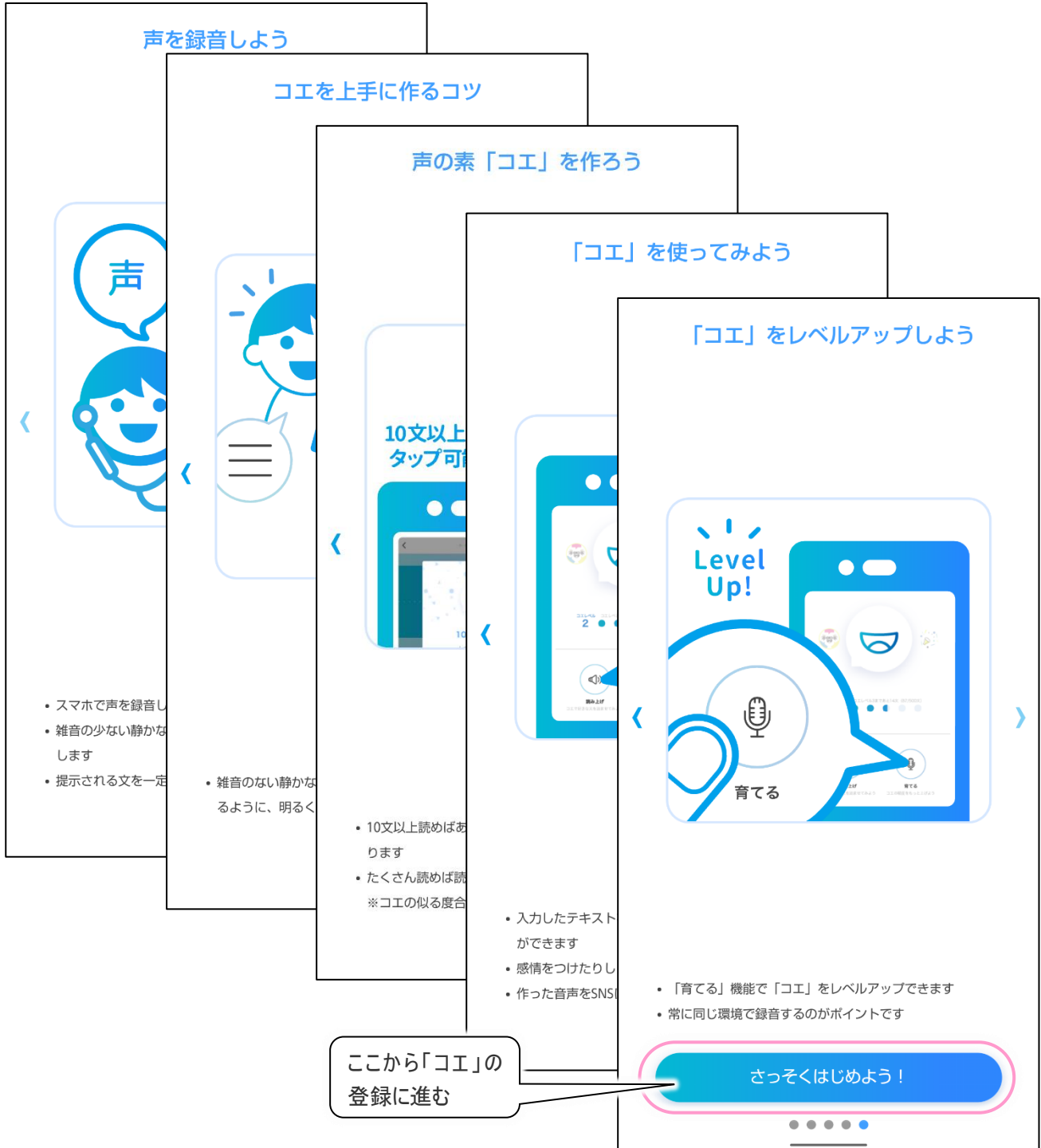

(2)チュートリアルを終了すると、コエをつくる画面が表示されるので「次へ」ボタンを選択します。




(3)画面の指示に従ってテキストを読み上げ、ご自身の声を登録していきます。

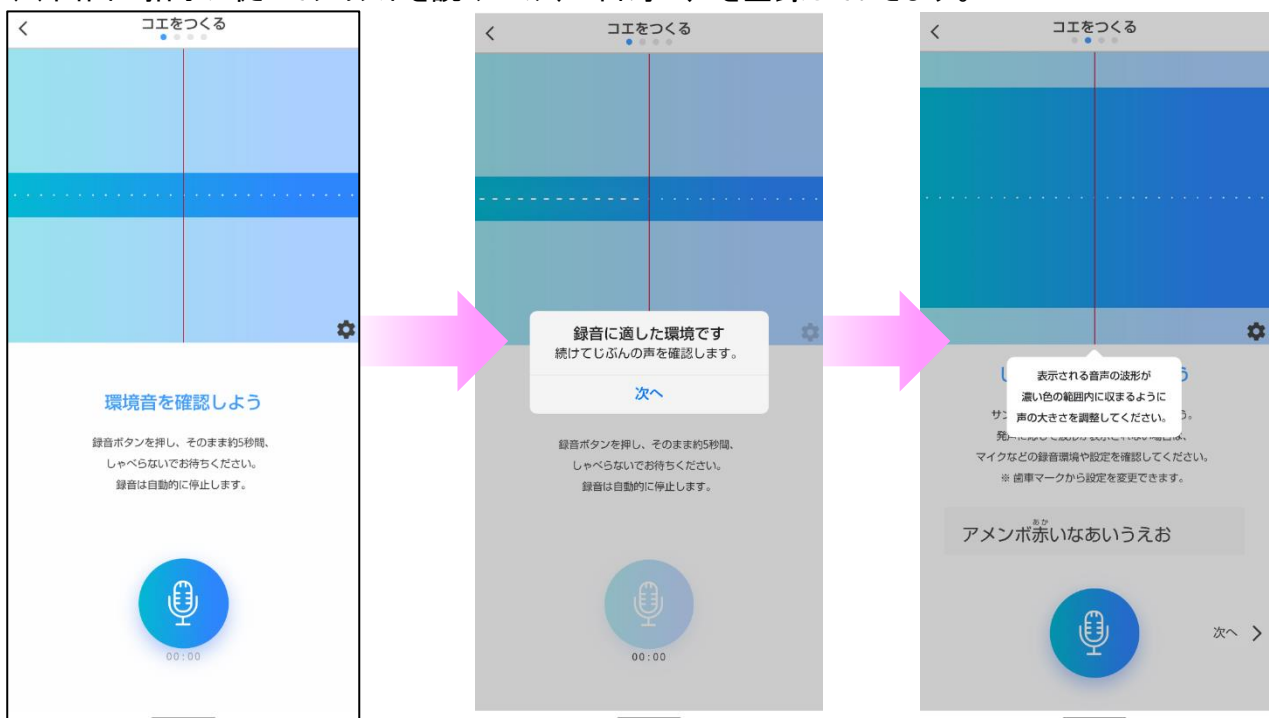


- (4) コエレベルは 1～5 まであり、より多くのテキストを学習させることで、より高い精度の「コエ」を作ることができます。
「コエ」の作成には、まずコエレベル 1 の入力を完了してください。

※読み上げの最中に言い間違いをしてしまった場合や、音量が大きくなりすぎて波形が振り切れてしまった場合には撮り直しを行うことができます。

- (5) コエレベル 1 の入力が完了すると、「コエをつくる」ボタンが表示されます。
「コエをつくる」ボタンを選択すると「コエ」の作成が開始されます。

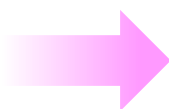

(6)「コエ」の作成が完了すると下記のようなメールが届きます。

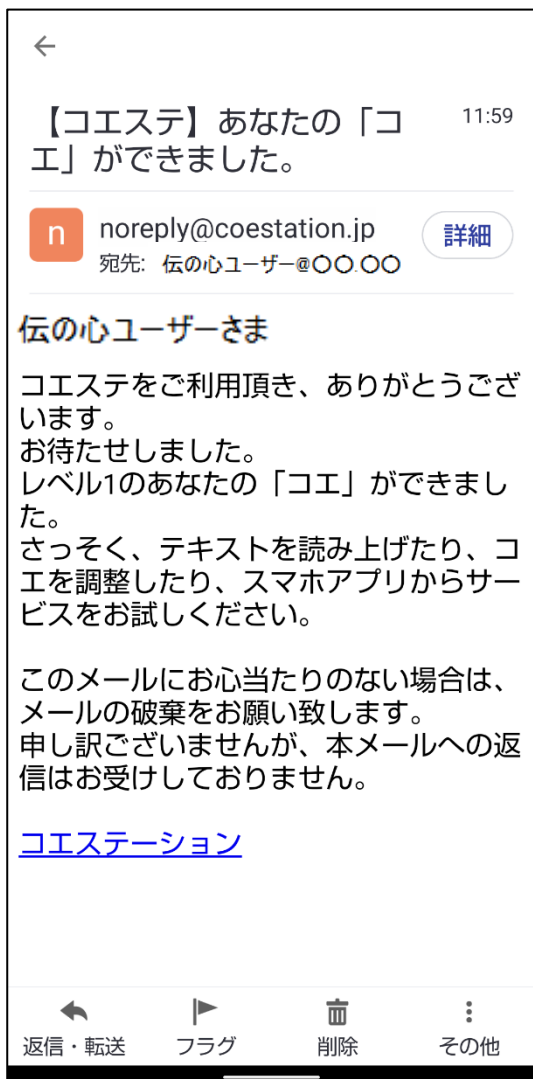

※「コエ」の作成には1時間～数日ほど時間がかかります。また終了後はメールとアプリの通知でお知らせしてくれます。

※作成後にさらに声を登録することで、コエレベルの精度をもっと上げられます。

※さらに音声を登録するには、ホーム画面の「育てる」ボタンから行えます。

スマートフォン側の設定は以上で終了です。

「伝の心」と連携させる

(1)「伝の心」とコエステーションを連携させるためには、インターネット接続が必要です。
インターネット接続を確認したら次に進みます。

(2)「伝の心」の「支援者用設定」から、「コエステーション連携ツール」を選択します。

The screenshot shows the '伝の心' (Den no Kokoro) settings interface. A yellow callout box with a blue pushpin icon contains the text: ※「伝の心」のバージョンは06-50以降から対応しています。 (The version of 'Den no Kokoro' is supported from 06-50 onwards). A pink arrow points from the '設定' (Settings) button in the top menu to the '伝の心 設定' (Den no Kokoro Settings) window. Inside this window, a pink circle highlights the '支援者用設定' (Supporter Settings) button. Another pink arrow points from this button to the 'コエステーション連携ツール' (Co-Station Linking Tool) button in the '支援者用設定' sub-menu.

対応メニュー	設定項目	設定値
基本設定	文字の大きさ	32 ポイント
	スキャン速度	
読上げ設定	文字盤の大きさ	
	文字盤拡大	
	読上げ	
	優先の選択	
	声の性別	
	読上げ速度	
	声の高低	
	読上げ音量	

(3)「コエステーション連携ツール」画面にて、「コエステーションと連携」ボタンを選択します。

The screenshot shows the '伝の心 コエステーション連携ツール' (Den no Kokoro Co-Station Linking Tool) screen. A pink circle highlights the 'コエステーションと連携' (Co-Station Linking) button. Below the button, there are fields for '最終利用日' (Last Used Date) and '有効期限' (Validity Period), with a note: ※最終利用日から90日間利用可能です (Up to 90 days of use possible from the last used date). At the bottom, there are radio buttons for '日立音声合成を利用する' (Use Hitachi voice synthesis) and 'コエステーションを利用する' (Use Co-Station). A '終了' (End) button is at the bottom right.

コエステーションとの連携：
連携状態： コエステーションとの連携状態が取得できないため、コエステーションは利用できません。「コエステーションと連携」を実行してください。

最終利用日：
有効期限：
※最終利用日から90日間利用可能です

「文書」読み上げ画面で使用する音声
 日立音声合成を利用する コエステーションを利用する


コエステーション 利用状況：
本日の利用回数/利用回数上限： 0 / 100

終了

- (4) 確認画面にて「はい」ボタンをクリックするとブラウザが起動して、ログイン画面が表示されます。
コエステーションアプリで登録したメールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。




- (5) 下記のような画面に遷移するので、「接続」ボタンをクリックしてください。

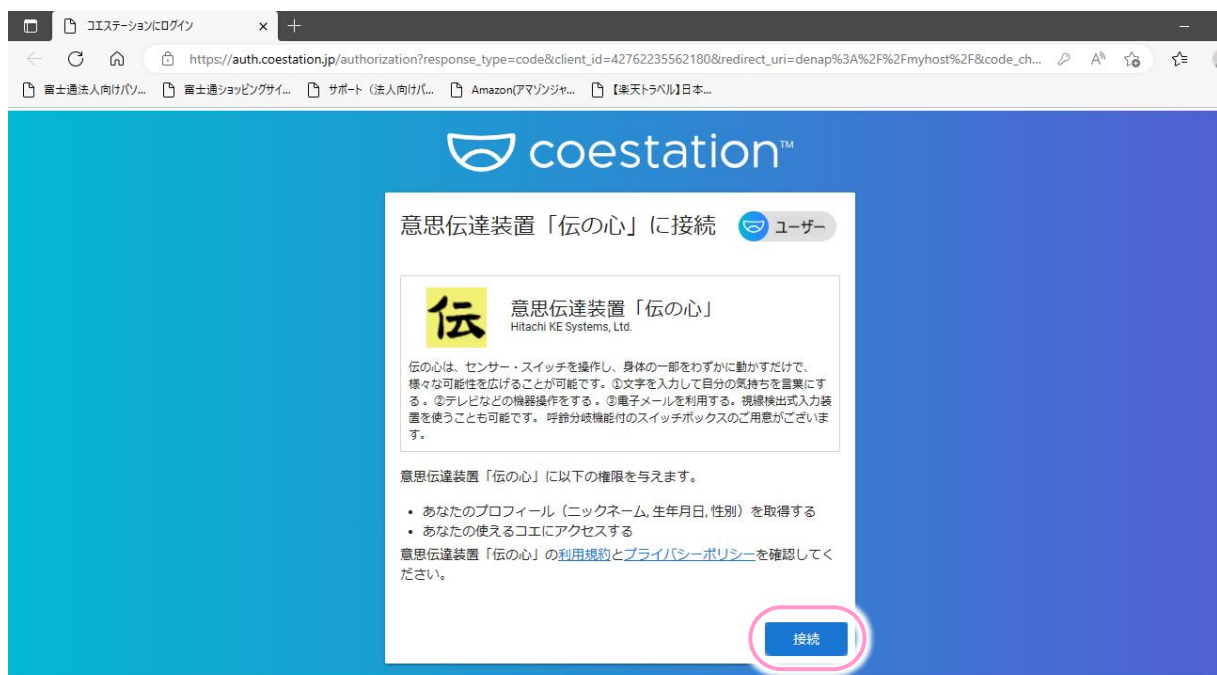


(6) 確認画面が表示される場合は、**開く**ボタンをクリックしてください。




(7) 接続が完了すると下記画面が表示されるので、**OK**ボタンをクリックして画面を閉じてください。ブラウザ画面も閉じてください。

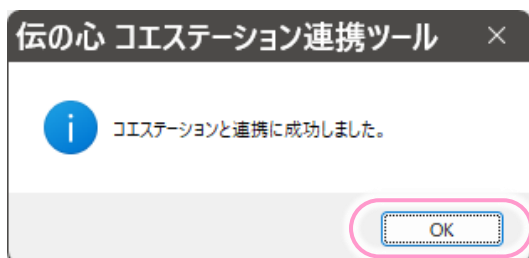


(8) 「コエステーション連携ツール」画面の連携状態が「コエステーションは利用可能です。」に変更されていることを確認してください。

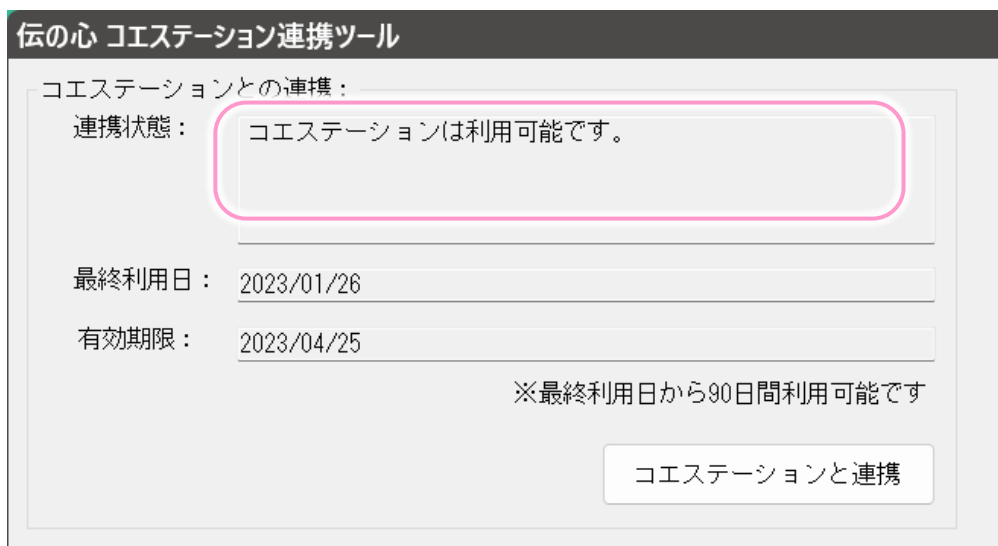


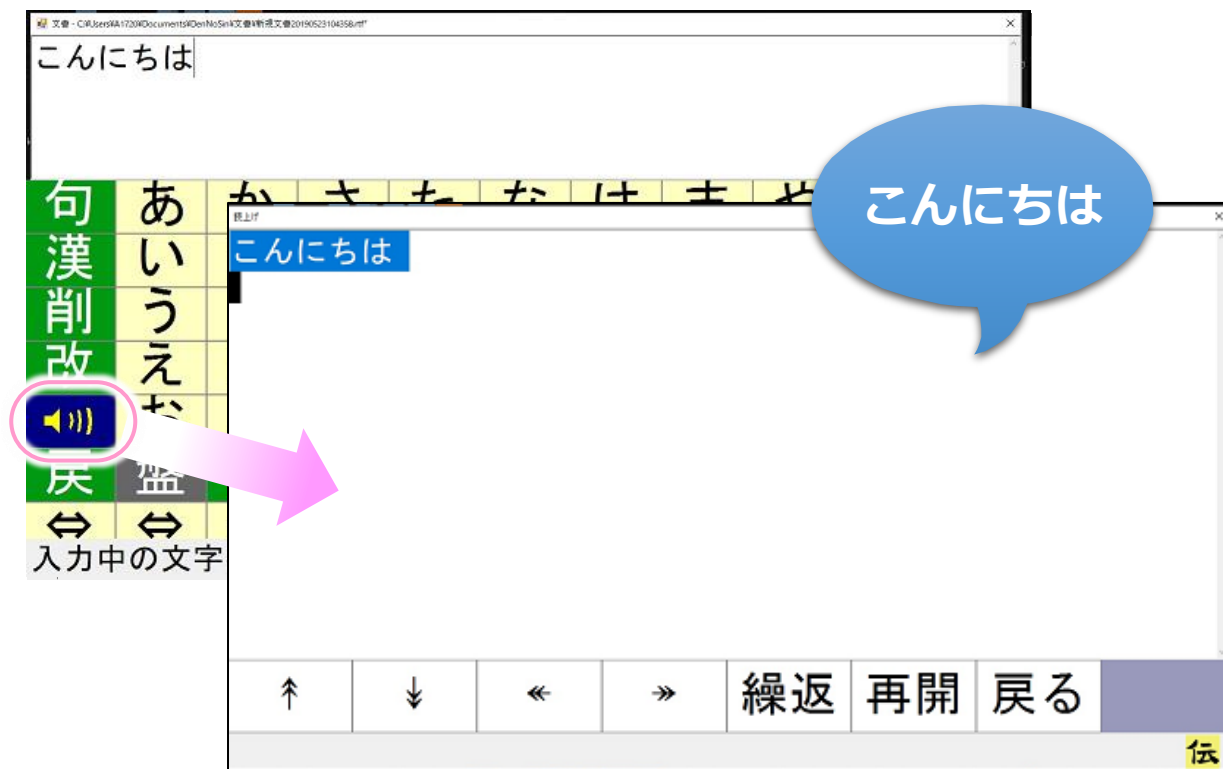
(9) 「文書」の読み上げ画面で利用する音声の項目で「コエステーションを利用する」を選択します。

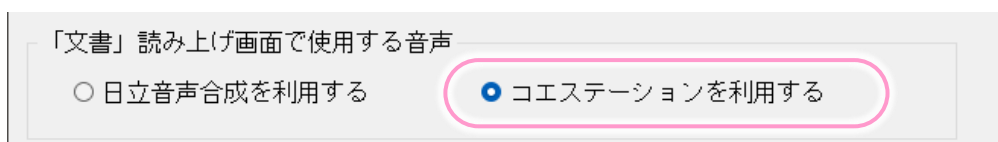


(10) 設定はこれで終わりです。**終了**ボタンをクリックして画面を閉じます。

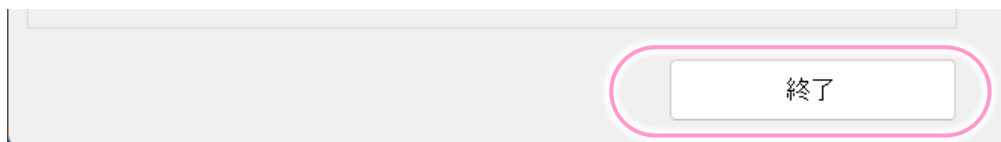

(11) 支援者用設定画面を閉じて「伝の心」に戻り、読み上げを確認してみましょう。
「文書」にて文字を入力し、「」を選択すると、読み上げ画面を表示して読み上げます。



● 制限事項

- ・ 対応している「伝の心」のバージョンは 06-50 以降です。
- ・ コエステーションの声は、「文書」から開く文字盤の「」にて表示される読み上げ画面でのみ有効です。
- ・ コエステーションの声で読み上げを行う場合は、常にインターネット接続が必要です。
- ・ 1日の利用回数は100件となっております。件数は1度に読み上げる回数となっており、1度に読み上げる文章の区切りは「。」または128文字となります。
例えば「こんにちは。今日は、良い天気ですね。」を読み上げる場合は、「こんにちは。」と「今日は、良い天気ですね。」に分かれて読み上げるので2件となります。
- ・ コエステーションとの連携は最終利用日から90日以上経過すると、自動的に解除されます。その場合は、8ページの「「伝の心」と連携させる」を参照して再度連携を行ってください。

こんな時には

●コエステーションアプリに関すること

スマートフォン向けコエステーションアプリの使用方法や質問は下記サイトまたは右の QR コードよりお願いします。




お問い合わせ | コエステ株式会社 (coestation.jp)
<https://coestation.jp/contact/>

●メッセージが表示されて読み上げができない

右記のようなメッセージが表示されて読み上げができない場合は、エラーコードとエラーメッセージを確認してください。

下記にご対応方法の一覧を記載します。

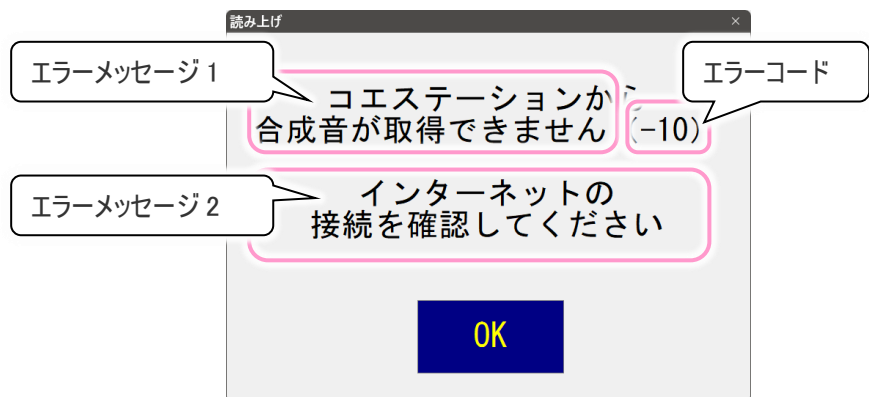

エラーメッセージ 1	エラーメッセージ 2	エラーコード	対応方法
	コエステーションの本日の利用回数が上限に達しました。本日はご利用できません。	なし	本日は使用できません。明日また使えるようになります。 1 日の利用回数は 100 件となっております。件数は 1 度に読み上げる回数となっており、1 度に読み上げる文章の区切りは「。」または 128 文字となります。
コエステーションから合成音を取得できません	インターネットの接続を確認してください。	-10	ネットワークの接続が不安定な場合も表示されます。ネットワーク環境をご確認ください。
	コエステーションとの連携を確認してください。	-30	
		-100	
		-101	
		400	8 ページの「「伝の心」と連携させる」を参照してコエステーションとの連携を行ってください。
	伝の心が破損しているため修理依頼してください	-2	コエステーション側で「コエ」の登録がない場合も表示されますので、併せてご確認ください。 「コエ」の登録は 4 ページの「「コエ」の登録」を参照ください。
		-11	
		-200	

エラーメッセージ 1	エラーメッセージ 2	エラーコード	対応方法
ライブラリファイルが見つかりません	伝の心が破損しているため修理依頼してください	-1000	ご購入いただいた販売店にご連絡ください。
コエステーションのサービスに問題が発生しています	しばらく待ってから再度実行してください	404 429 500	コエステーションのサーバー側に問題が発生しています。しばらく待ってから、再度読み上げを行ってみてください。

● 文書以外の読み上げ画面ではコエステーションの「コエ」で読み上げができない

コエステーションの「コエ」が使用できるのは、「文書」の文字盤から表示される「読み上げ画面」のみです。「会話」や「メール」の「読み上げ画面」では使えません。またメニューの読み上げへの設定もできません。

重要なお知らせ（必ずお読みください）

● お断り

- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載あるいは引用する事を禁止します。
- ・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書に記載の画像は一例ですので、実際の画面と異なる場合があります。
- ・本書の記述内容について万が一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- ・「伝の心」での「コエステーション」のコエを運用した結果については前項にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は日本国内のみに使用してください。(For Japanese Domestic Use Only)

● 商標と技術について

- ・「伝の心」は株式会社 日立ケーイーシステムズの登録商標です。
- ・コエステ、コエステーションは、コエステ株式会社の登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。