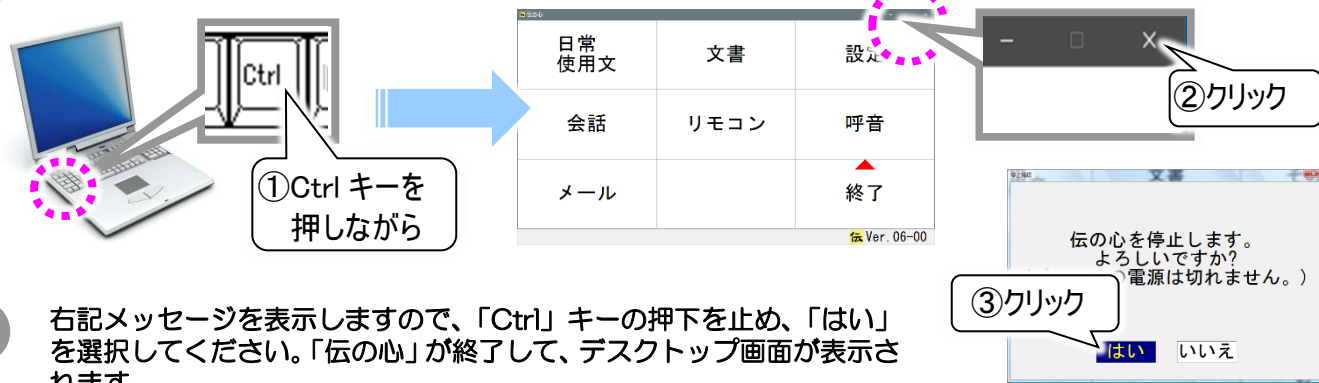
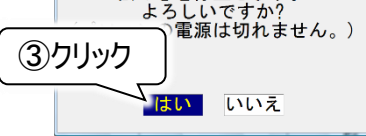
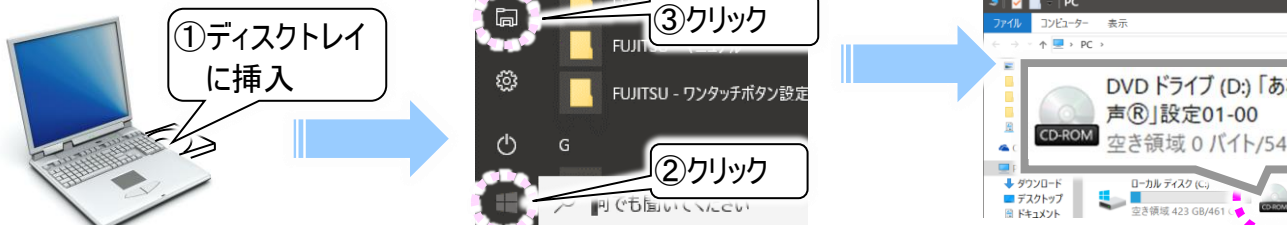
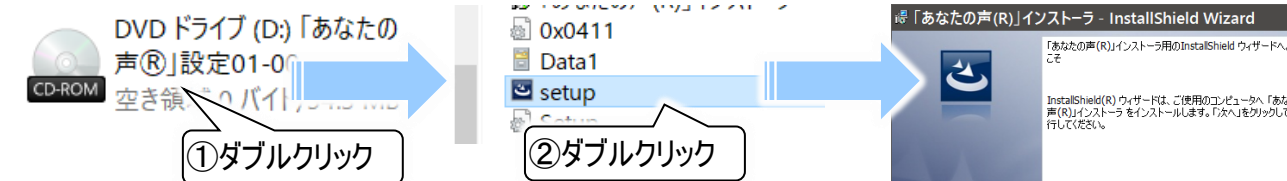
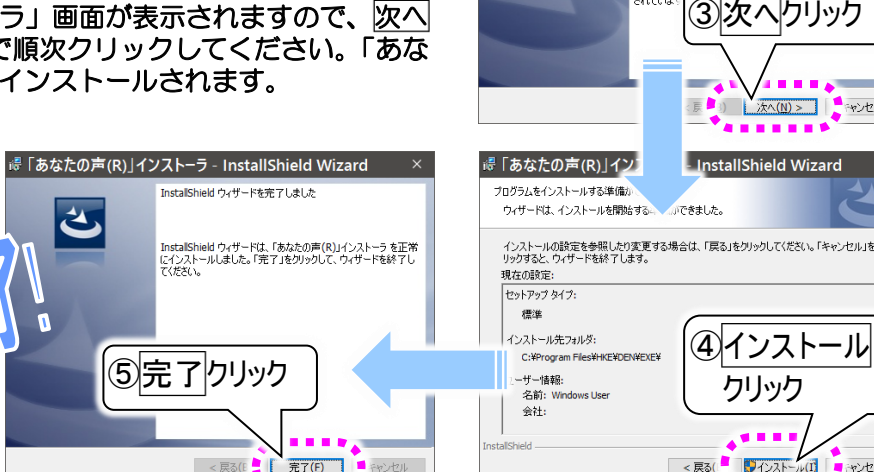







「伝の心」を停止します

- 「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上[×]ボタンをマウスでクリックしてください。
- 
- 右記メッセージを表示しますので、「Ctrl」キーの押下を止め、「はい」を選択してください。「伝の心」が終了して、デスクトップ画面が表示されます。
- 
- ※ 「ウイルスバスター」などのセキュリティソフトを使用している場合は、インストールをブロックする場合がありますので、停止させてください。

「あなたの声®」設定ユーティリティをインストールします

- 添付の「あなたの声®」設定ユーティリティ CD を「伝の心」のディスクトレイに挿入して、デスクトップ画面から[スタート]⇒[エクスプローラー]の順にマウスでクリックしていきます。
- 
- PC 画面が開きますので、[あなたの声®設定]⇒[setup]の順にマウスでダブルクリックしていきます。
- 
- 「あなたの声 (R)」インストーラ画面が表示されますので、次へ⇒インストール⇒完了をマウスで順次クリックしてください。「あなたの声®」設定ユーティリティがインストールされます。
- 
- インストール完了!**


あなたの声®の「音声データ」をコピーします

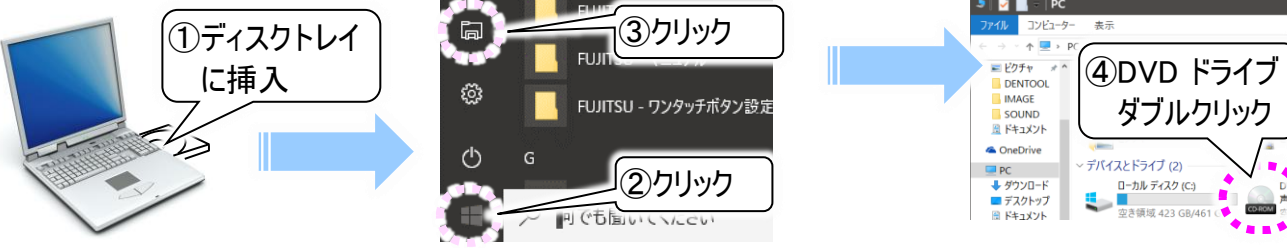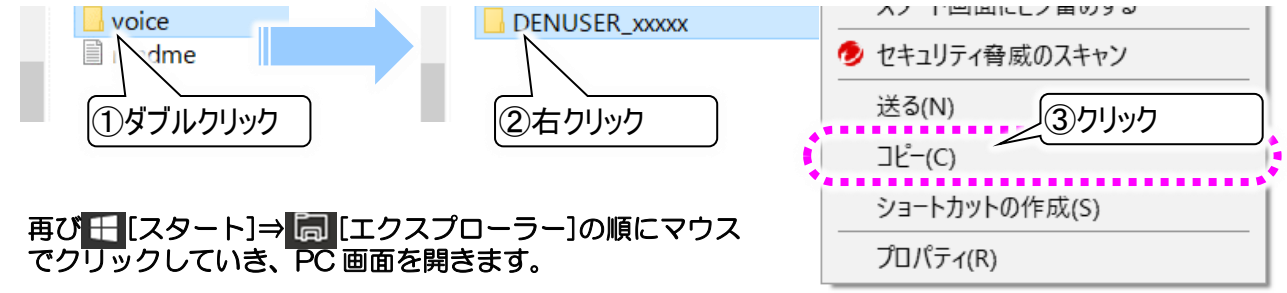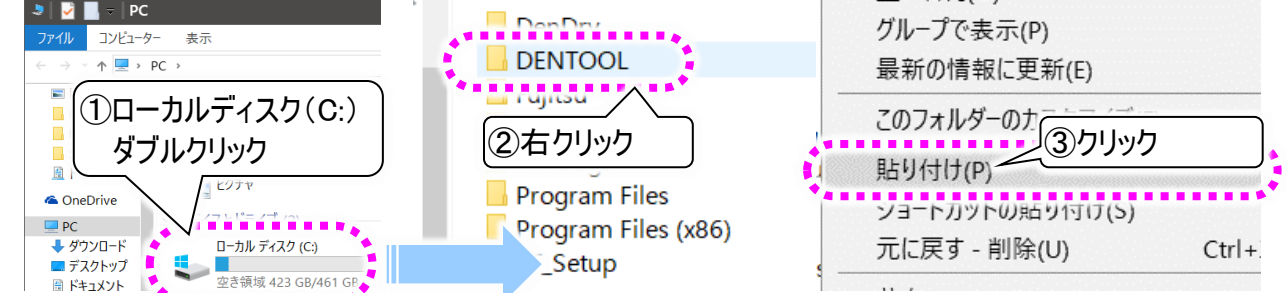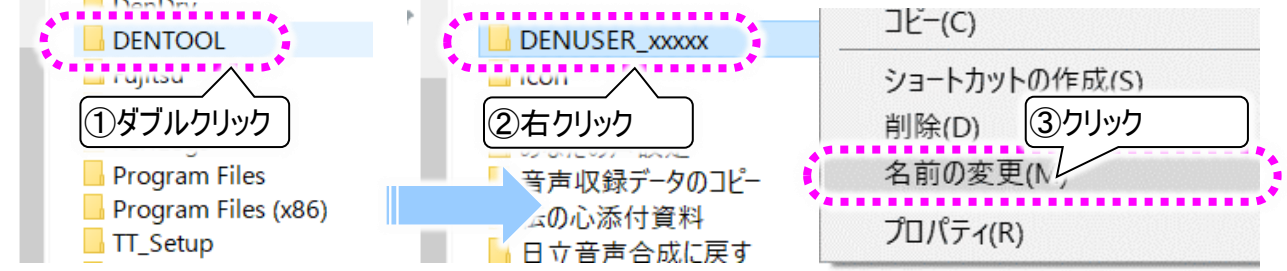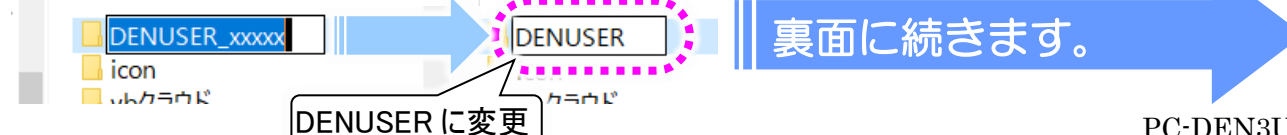- 「あなたの声®」の収録データディスク（株）エーアイより別途提供）を「伝の心」のディスクトレイに挿入して、デスクトップ画面から[スタート]⇒[エクスプローラー]の順にマウスでクリックしていきます。
- 
- PC 画面が開きますので、DVD ドライブをダブルクリックして、[Voice] をダブルクリックします。次に[DENUSER_xxxxx]を右クリックして[コピー]をクリックします。※_xxxxx の部分はユーザー様によって異なります。
- 
- 再び[スタート]⇒[エクスプローラー]の順にマウスでクリックしていき、PC 画面を開きます。
- 次に[ローカルディスク (C:)]をダブルクリックし、[DENTOOL]を右クリックして[貼り付け]をクリックします。
- 
- データのコピーが終了したら、[DENTOOL]をダブルクリックしてフォルダを開き、コピーされた[DENUSER_xxxxx]を右クリックして[名前の変更]をクリックします。
- 
- [DENUSER_xxxxx]の文字が反転表示され編集可能になるので、[DENUSER]に変更します。
- 
- 裏面に続きます。


あなたの声®の「音声データ」を「伝の心」で使えるようにします

- 「あなたの声®」の収録データを[DENTOOL]フォルダにコピーしてから行います。
※コピーしていない場合は前頁の(あなたの声®の「音声データ」をコピーします)を行ってください。


- [DENTOOL]フォルダより、[音声収録データのコピー]⇒[DenYourvoiceCopy]の順にダブルクリックします。

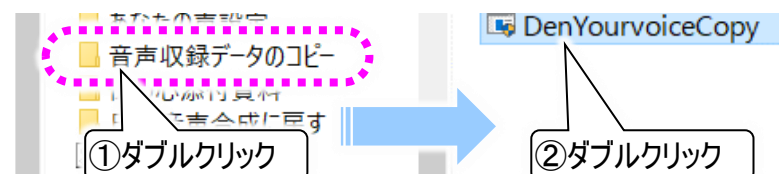


- 下記のような画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。

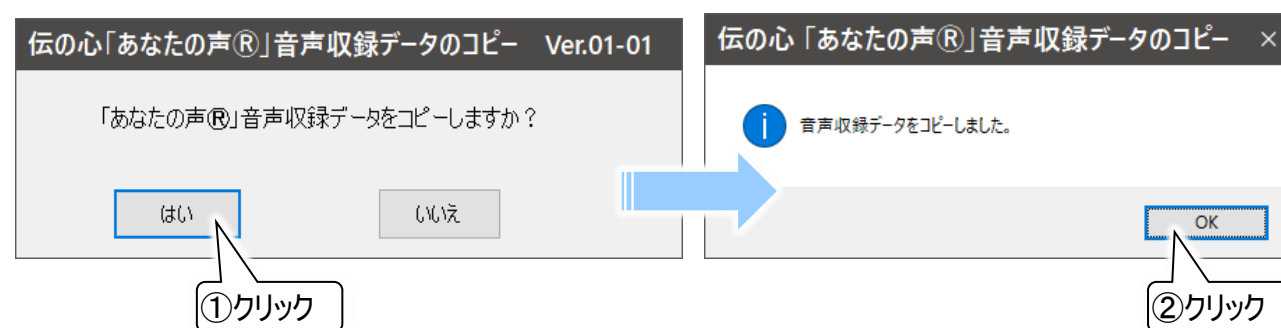

- 再び[DENTOOL]フォルダに戻って、[あなたの声設定]⇒[DenYourvoiceSet.]の順にダブルクリックします。

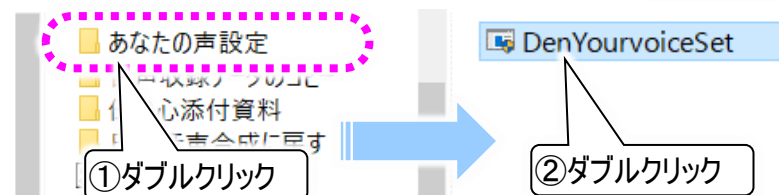

- 下記のような画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。

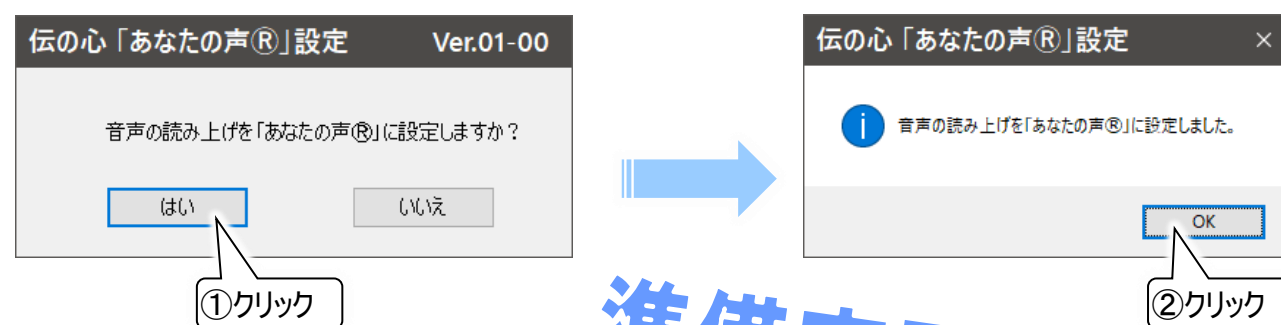

これで準備完了です。お疲れ様でした。


準備完了!

- 「伝の心」を起動して、トップ画面の右下のバージョン表示の右端に「AI」が追加されている事を確認します。




こんなときには

- 「伝の心」トップ画面の右下のバージョン表示の右端に「AI」が追加されていない。
➡ 「あなたの声設定」⇒[DenYourvoiceSet.]を実行してください。 **左頁参照**
- 音が鳴らない。読み上げしない。
➡ [音声収録データのコピー]⇒[DenYourvoiceCopy]を実行してください。 **左頁参照**
➡ 改善しない場合、(あなたの声®の「音声データ」をコピーします)からやり直してください。
- 読み上げのおかしい単語を正しく読み上げさせたい。
➡ 次頁の(間違えた読み上げをしている単語を、正しい読みに変更できます)を参照して、単語登録を試みてください。
- 日立の音声合成の読み上げに戻りたい。
➡ 「C:\DENTOOL\日立音声合成に戻す\DenYourvoiceReset」を実行してください。

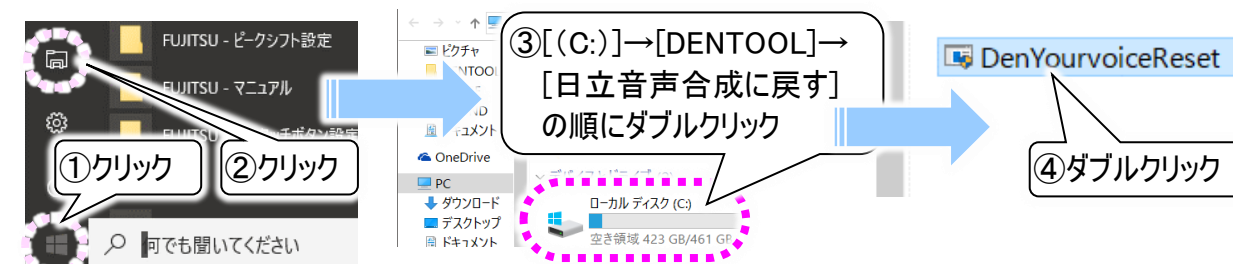


下記のような画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。

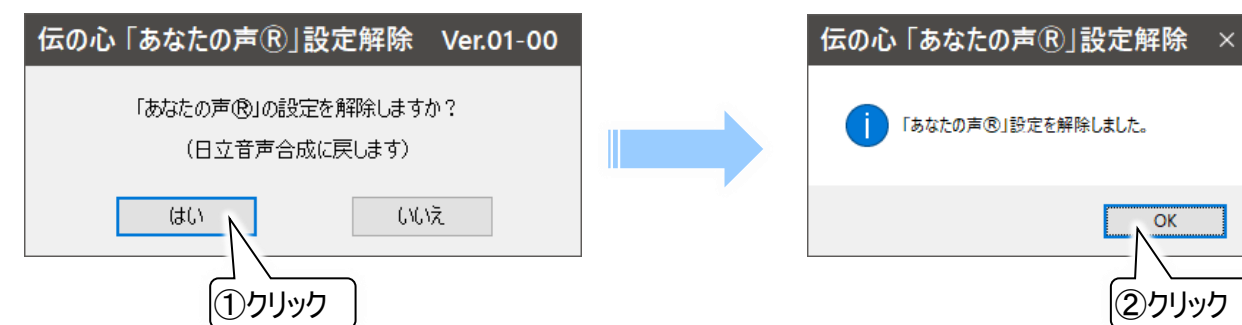

※再度「あなたの声®」に設定したい場合は、(あなたの声®の「音声データ」を「伝の心」で使えるようにします)の④項から実行してください。


日常使用文を読み上げてみましょう

- 「伝の心」トップ画面の[日常使用文]を選択し、日常使用文の画面で読み上げたい項目を選択すると、あなたの声で読み上げます。

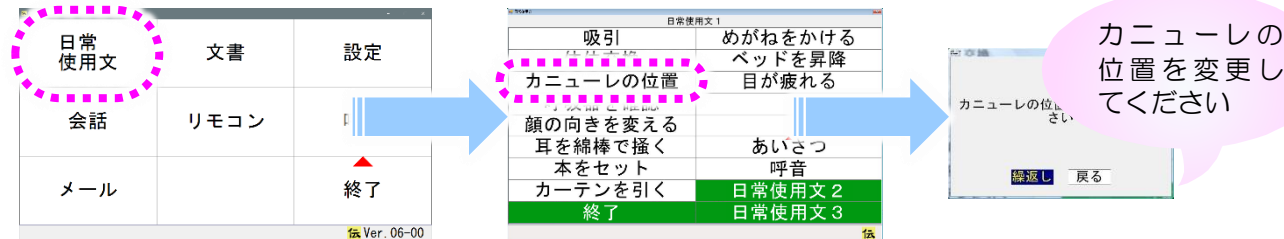

文字盤から[句]を選択して定型句を読み上げてみましょう


- 「伝の心」トップ画面の[文書]を選択し、文書画面のメニューの[文字]を選択します。

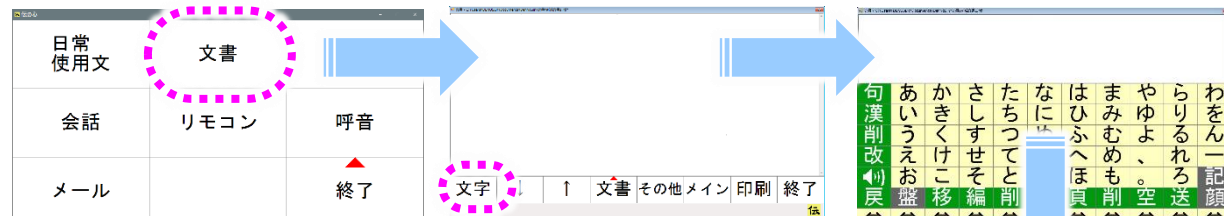

- 文字盤が表示されるので、**あ**を選択し、**句**を選択してみましょう。

- 「あ」で始まる定型句の一覧が表示されるので、読み上げたい項目を選択します。

- 左端にリストが表示されるので、[音声]を選択すると、あなたの声で読み上げます。

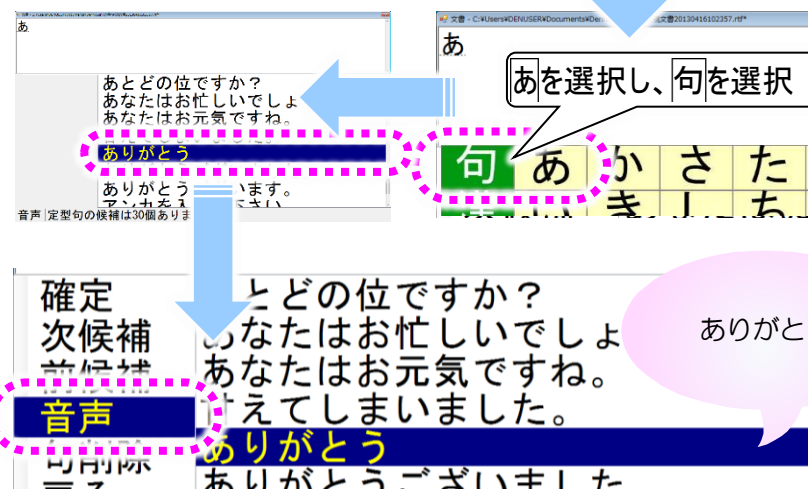

文字盤から[音声]を選択して文章を読み上げてみましょう


- 「伝の心」トップ画面の[会話]を選択し、文字盤で文字を入力します。
※[会話]だけでなく、[文書][メール]の文字盤からも同様です。



- [音声]を選択すると、読み上げ画面に切り替わり、読み上げる対象の文字列を反転表示してあなたの声で読み上げます。（※読み上げが終わると自動的に前の画面（ここでは会話画面）に戻ります。）
※読み上げ画面の詳細は、「伝の心取扱説明書」をご覧ください。

声の調子を変更できます

- 「伝の心」トップ画面の[設定]を選択し、設定画面で[読上]を選択すると、読み上げに関する設定の変更ができる画面を表示します。

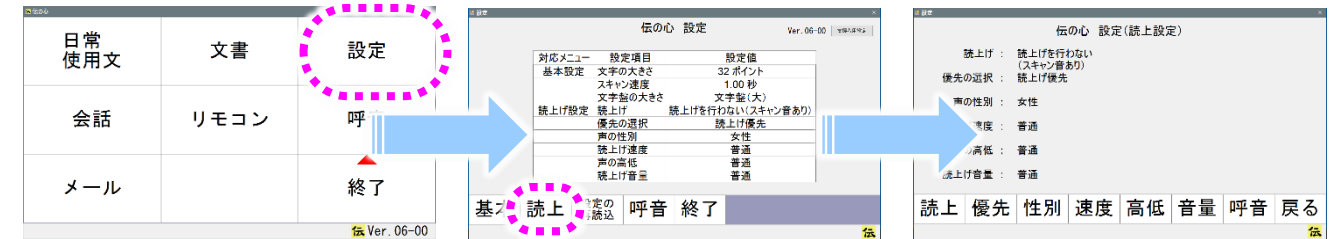


- ※ [設定]で[読み上げを行う]に設定すると、「伝の心」のメニューや文字盤もあなたの声®で読み上げます。
（読み上げの設定の詳細は、「伝の心取扱説明書」をご覧ください。）

- ※ [性別][速度][高低][音量]の変更時、「この設定で読み上げます」と音声ガイダンスが流れますが、「日立音声合成」とは違って、このガイダンスは変更後の設定で読み上げません。

- ※ [設定]で変更できる読み上げの設定において、あなたの声®を有効にしている場合は、[性別]を変更しても音声に変更はありません。

間違えた読み上げをしている単語を、正しい読みに変更できます

- デスクトップ画面から[スタート]⇒[伝の心]⇒[音声合成ユーザー辞書編集（あなたの声）]の順にマウスでクリックしていきます。

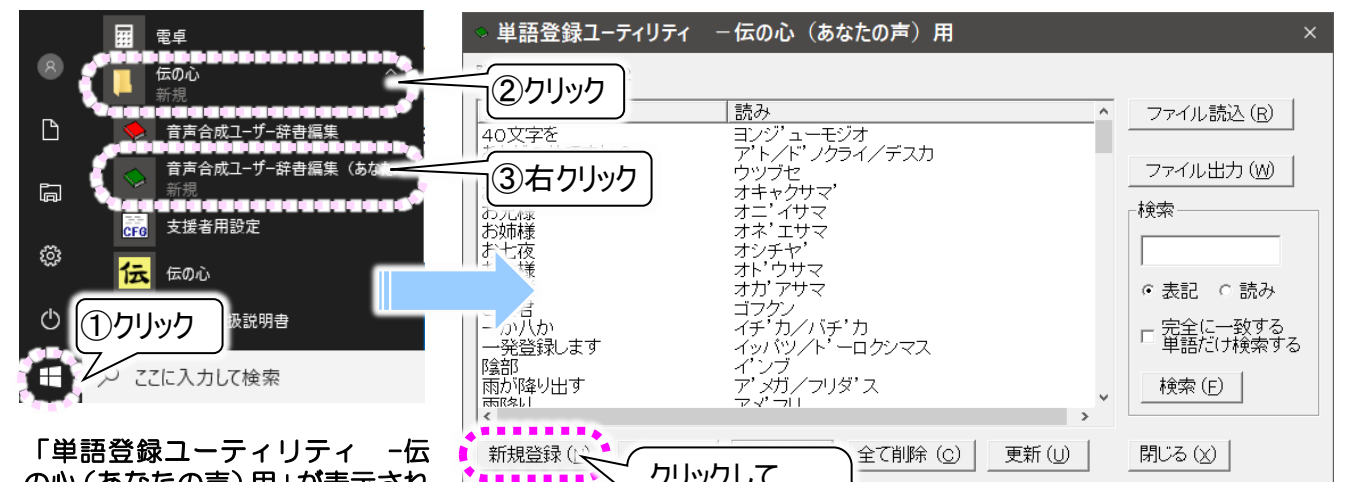

- 「単語登録ユーティリティ - 伝の心（あなたの声）用」が表示されるので、**新規登録**ボタンをクリックして、単語の読みを登録します。

- ※ [単語登録ユーティリティ - 伝の心（あなたの声）用]の使用方法は[日立音声合成 単語登録ユーティリティ]と同等です。
（詳細は、「伝の心取扱説明書」の「音声合成ユーザー辞書について」をご覧ください。）