
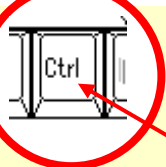


Windows Update による更新プログラムのインストール方法


ここでは、「伝の心」のシステム装置をインターネットに接続し、オンラインで更新プログラムをインストールする方法について説明します。

本作業は、「伝の心」を含めた全てのアプリケーションを終了した状態で行ってください。システム装置の電源を切らずに「伝の心」を終了させる方法は下記の通りです。

- ①「伝の心」のメインメニューを表示します。
- ②キーボード左側にある「Ctrl」キーを押してください。
- ③「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上「X」ボタンをマウスでクリックしてください。

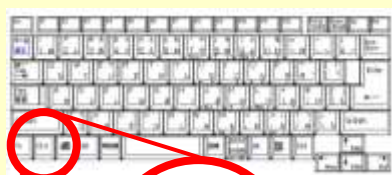


押し続けます。

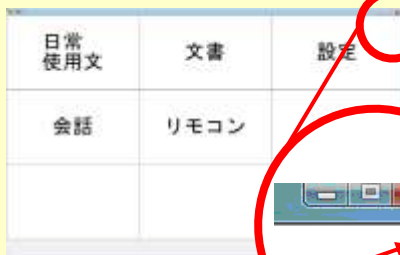


マウスで
クリックします。

- ④「伝の心を停止します。よろしいですか？(パソコンの電源は切れません。)」のメッセージが表示されるので、「Ctrl」キーの押下を止め、「はい」を選択してください。

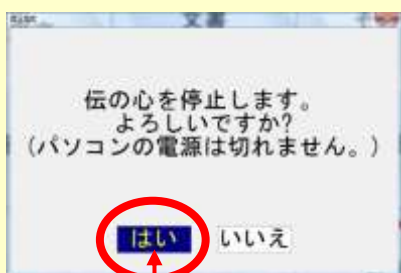

選択します。

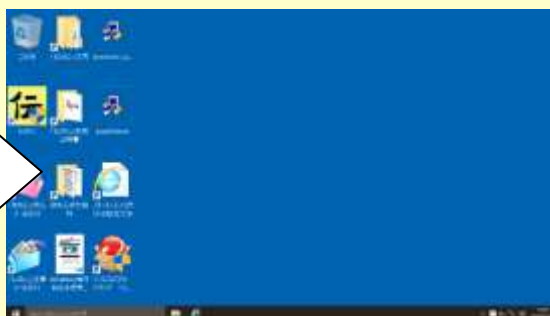

- ⑤「伝の心」が終了して、デスクトップ画面が表示されます。

(1) Windows のスタートメニューから「設定」→「システム」を順次マウスでクリックしていきます。



(2) 左メニューの「バージョン情報」をクリックし、バージョンを確認します。
バージョンが、適用したい Update のバージョンであれば、既に適用されていますので、再適用の必要はありません。(※ここで終了です。)




適用可能なバージョンであれば(3)に進みます。

(3) 左上「←」ボタンをマウスでクリックして「設定」画面に戻り、「更新とセキュリティ」をクリックします。



(4) 更新とセキュリティ画面が表示されるので、左メニューの「Windows Update」をクリックし、**更新プログラムのチェック**ボタンをクリックします。

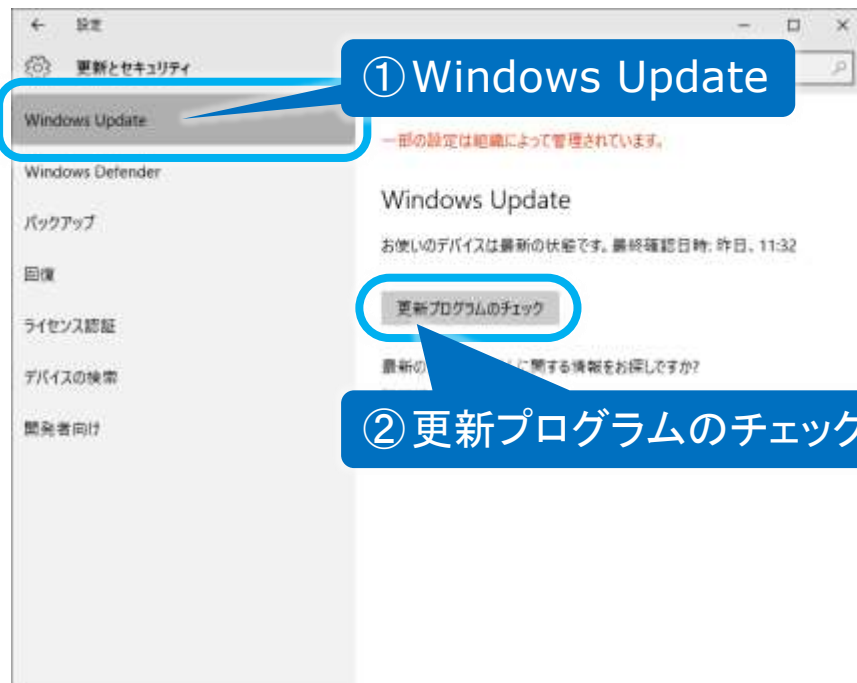

(5) 利用可能な更新プログラムが検索され、ダウンロードとインストールが、実行されます。




初めて Windows Update を行う場合は、ダウンロードおよびインストールする修正プログラムが多くなるため、ダウンロードに時間が掛かることがあります。

また、Windows Update サーバーが混雑している時などは、Windows Update に失敗したり、ダウンロードの途中でシステム装置がフリーズしたりすることがあります。

このような場合は、時間を置いて再度 Windows Update を行ってください。

(※既にインストール済みのものや、インストール不要と判断されたプログラムは表示されません。また、この時インストールしなかったプログラムは、次回の Windows Update 時にインストールすることが可能です。)

(6) 適用に再起動が必要な場合は、“再起動がスケジュールされています”メッセージが表示されます。**今すぐ再起動する** ボタンをクリックしてください。

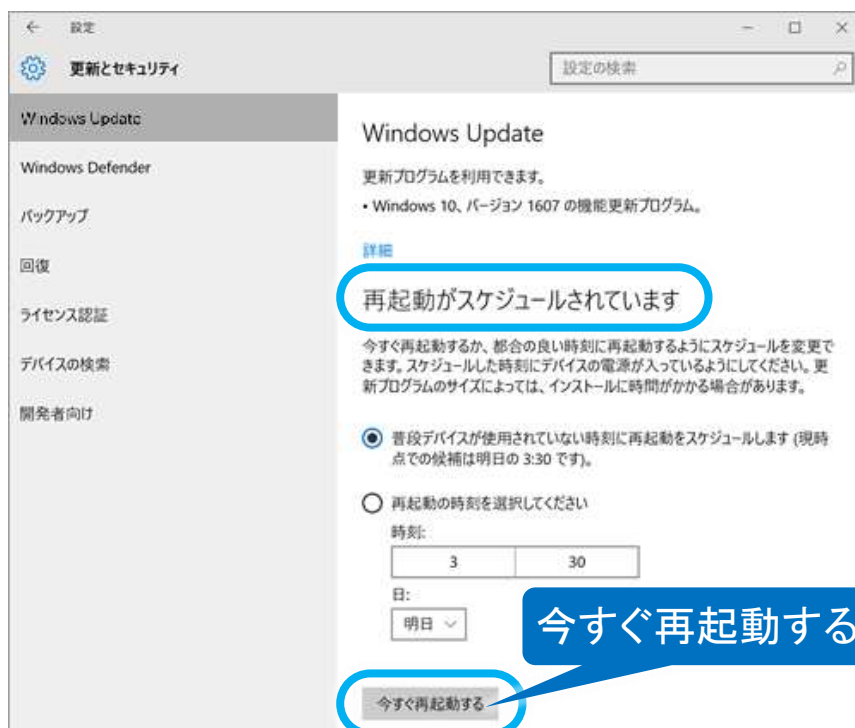

(※**今すぐ再起動する** ボタンが表示されない場合もあります。この場合、更新とセキュリティ画面を 1 度閉じて、再起動は行わず、(4)を行ってください。)

- (7) Fall Creators Update を適用前には、再起動後、下記画面が表示される場合があります。
※「プライバシーの設定について」を参照して設定を行ってください。



- (8) 再起動後、(4)を再度行い、「お使いのデバイスは最新の状態です。最終確認日時: 今日、…」と表示されれば終了です。



プライバシーの設定について

ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。



- (1) **設定の確認** ボタンをクリックすると、「デバイスのプライバシー設定の選択」の画面に切り替わりますので、**承諾する** ボタンをクリックして次の画面に進みます。
OK ボタンをクリックすると画面が閉じます。

これで Windows 10 Creators Update のダウンロードが開始されるようになります。

① 設定の確認

Windows 10
継続して保護されるように、今すぐ
プライバシー設定を確認する

より高度なセキュリティを実現するために、Windows 10 Creators Update に備えて、今すぐプライバシー設定を確認してください。

設定を確認

② 承諾する

← 戻る

デバイスのプライバシー設定の選択

Microsoft では、ユーザーによる設定によってプライバシーを管理します。次の情報は、ご自身の現在の設定に基づいています。ここを何かが変更すると、変更はこのデバイスのすべてのアカウントに反映され、Windows 10 Creators Update のインストール直前に適用されます。

- オフ 位置情報 Windows とアプリで位置情報を活用しません。地域の天気、道順、デバイス検索などの機能は利用できなくなります。
- オフ 音声認識 Cortana や一部のストアアプリに話しかけることができなくなります。
- 基本 診断データをオフにすると、より少ないデータが Microsoft に送信され、発生したエラーの修正に使用されます。
- オン 診断データを使用してエクスペリエンスをカスタマイズするより適切なヒントと推奨事項を取得して、Microsoft の製品やサービスもニーズに合わせてカスタマイズできるようになります。これを無効にした場合、Microsoft はお客様の診断データを使用します。
- オフ 関連性の低い広告が表示されるお宝の数は変わりませんが、広告の関連性が低くなる可能性があります。

上の設定や、Windows Defender SmartScreen の機能、関連するデータ転送、使用方法を確認するには、[詳細情報](#) を参照します。

詳細を見る 承諾する

③ OK

← 戻る


Windows 10

ありがとうございます。次のアップ
デートに備えてプライバシー設定
が保存されました


SDK を選択したときアップゲイナが始まるわけではありません。バックグラウンドで作業を行った後、アップデートが転送されるまでお待ちください。

OK

(2) Windows のスタートメニューから「設定」→「更新とセキュリティ」を順次マウスでクリックしていきます。

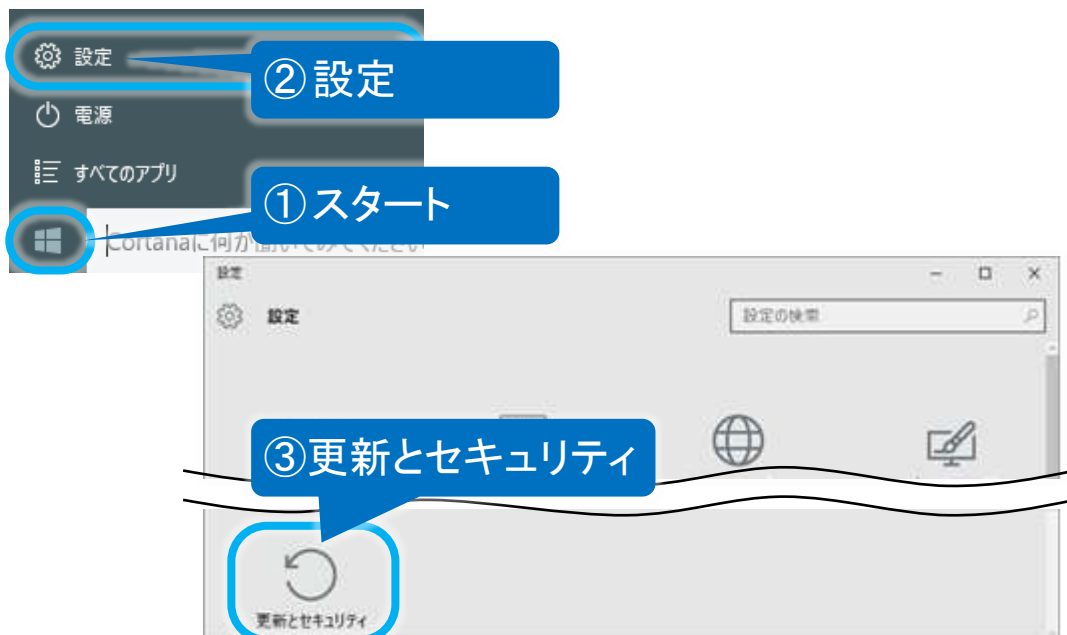


(3) 更新とセキュリティ画面が表示されるので、左メニューの「Windows Update」をクリックし、**更新プログラムのチェック**ボタンをクリックします。

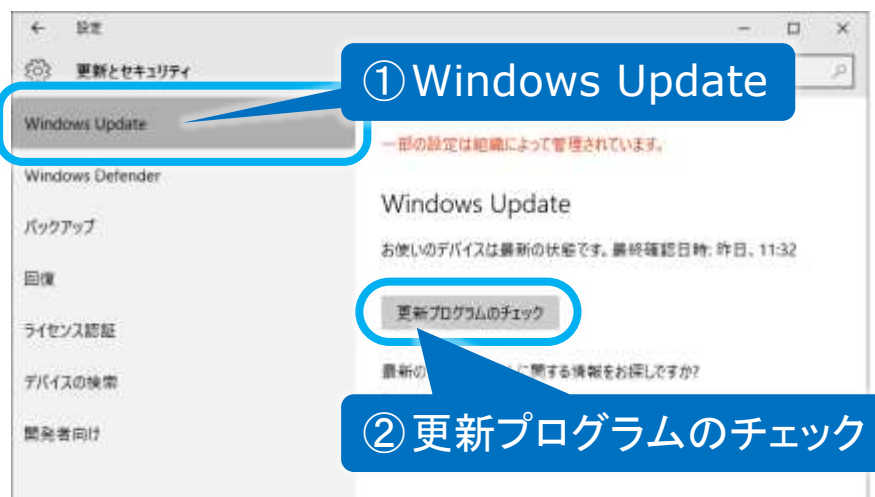

(4) Windows 10 Creators Update のダウンロードが開始されます。
下記のように「お使いのデバイスは最新の状態です。最終確認日時: 今日、・・・」と表示された場合は、数日後に再度(2)からお試ください。




- (5) 準備が完了すると、インストールを開始するための再起動を求めるメッセージが表示されます。ここでは「再通知」をクリックして画面を閉じてください。

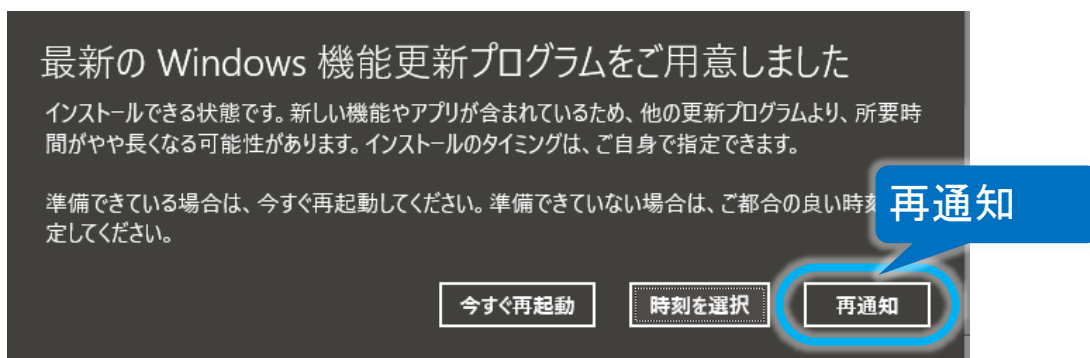

※「伝の心」が起動している場合は、今すぐ再起動を選ぶと「伝の心」に不具合が生じる場合があります。ご注意ください。

- (6) 「伝の心」が起動している場合は、システム装置の電源を切らずに「伝の心」を終了させてください。
(7) Windows のスタートメニューから「電源」→「電源」→「更新して再起動」順次マウスでクリックしていきます。

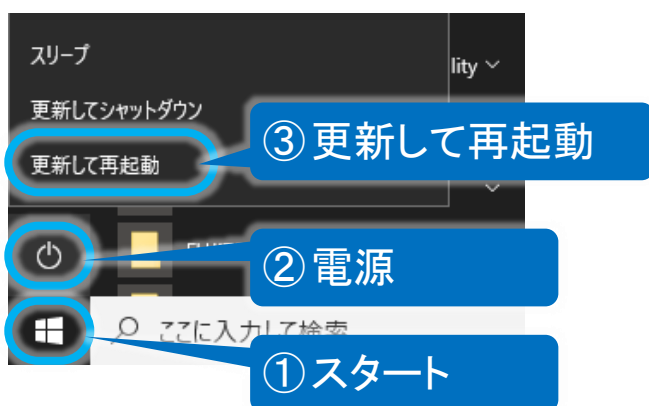

- (8) Windows 10 Creators Update の更新が始まります。途中数回の再起動が自動で繰り返されます。

※ Microsoft セキュリティ情報について

Windows における脆弱性については Microsoft セキュリティ情報を参照ください。

Microsoft セキュリティ情報

<https://technet.microsoft.com/ja-jp/security/bulletin/>