HITACHI Inspire the Next

伝の心販売会社 御中

発行:2016年7月27日

(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第7号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

「伝の心通信」(第7号)を発行させて頂きます。

トピックス① Windows10アップグレード表示について	
-------------------------------	--

Windows10への無償アップグレード期間が、2016年7月29日(金)までとなっておりますが、現在下記のような表示が出る場合があります。

この場合は、「今後、この通知を表示しない」をクリックすると、予約解除が可能となります。



※本お知らせの記載の手順でWindows10にアップグレードされないことを保証するものでは ありませんので、ご注意ください トピックス②

Windows10のCドライブ表示方法

伝の心Ver.06-00(Windows10)の販売が開始になりましたが、Windows7と違う点がありますので、 Windows10について今後何回かに分けてご説明します。 今回は、ローカルディスク(Cドライブ)の表示方法です。

(1)「スタート」⇒「エクスプローラ」を選択します。



(2)エクスプローラ画面が開くので、「PC」を選択すると、各ドライブが見えるようになります。 (「コンピューター」は、『PC』に名称が変更になりました)



トピックス③

隠しフォルダの表示方法

・伝の心の設定データ等が格納されている、XMLがあるフォルダは、隠しフォルダになっているので、下記のように設定します。

①Windows7の場合(Ver.05-30~05-73)

- (1)「スタート」⇒「コンピューター」を選択します。
- (2)「整理」を選択します。
- (3)「フォルダーと検索のオプション」を選択します。
- (4)「フォルダーオプション」の「表示」タブを選択します。
- (5)「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」にチェックを入れます。
- (6)「OK」を押下します。
- (7)設定や、ファイルの修正が済んだら、隠しフォルダの設定を必ず元に戻してください。



②Windows10の場合(Ver.06-00~)

- (1)「スタート」⇒「エクスプローラ」を選択します。
- (2)「表示」を選択します。
- (3)「隠しファイル」にチェックを入れます。
- (4)設定や、ファイルの修正が済んだら、隠しフォルダ(隠しファイル)の設定を必ず元に戻して ください。

= 2 - エク	マプローラー							
ファイル ホーム	共有 表示	2)						+ 0
ビグーション ワインドウ・	1- ウインドウ 📰 : ウインドウ 🔢 : 1011	中アイコン 2000 小アイコン ・ 一覧 1000 詳細 並べて表示 2000 コンテンツ ・	±∧₩X (3)	 □ 項目チェック ボック □ ファイル名拡張子 ☑ 隠しファイル 	7ス 2 選択した項目を 表示しない	נפל <i>ד</i> א עפלדא		
パイン		レイアウト	現在のビュー	表示/#	表示			
 ∮ワンロード デスクトップ ドキュメント ビクチャ ビクチャ ビクチャ ビデオ ・シュージック ニーカル ディス ー(E) 		7748-	をいくつか聞いた後、	ここに最近使ったファイル	が表示されます。			
 ライブフリ 第 ドキュメント 第 ドクチャー・ 4 個の項目 1 個の項目を 	選択 163 KB							(iii (M)

トピックス④

文字盤が表示されない場合等のXMLファイルの復元方法

電源ボタン長押しで、電源を切ったり、「文書」機能等を起動したまま、伝の心の「終了」を選択し、電源を切った場合等に、文字盤の設定ファイルが破損して、文字盤が表示されないことがあります。

その場合は、下記の手順で文字盤の設定ファイルを、工場出荷時のデフォルトファイルに戻します。

(1)「スタート」⇒「コンピューター」⇒「ローカルディスク」⇒「ProgramData」⇒「HKE」⇒「DEN」⇒「XML」と選択し ます。

★ GOOV 素 広のOV 素 広のOV 素 広のOV 素 広のOV 素 広のOV の 支援教育印設計 DENUSER ドキュメント ビーマント	(*, 3)) (*) (*) (*) (*) (*)	Good v are ProgramData → HKE → DEN → XML	• 4) XMLの構成 タ
とクサヤ ミュージック 最近受った項目 ・ コンビューター コントロールパネル デバイスとブリンター 販売のプログラム ヘルプとサポート	■日本 - 5.458.06/70.05 (F) ● 10.05 (F) ● 0.06 (F) ● 0.06 (F) ● 2.578.05 (F) ■ 2.578.05 (P#FEIB P#FEIB P#FA P#FA 2014/12/2 XML (P*Fa 45 KB 2014/07/1 XML (P*Fa 45 KB 2014/07/1 XML (P*Fa 45 KB 2014/07/1 XML (P*Fa 15 KB 2016/07/1 XML (P*Fa 15 KB 2016/07/1 XML (P*Fa 25 KB 2016/07/1 XML (P*Fa 5 KB 2016/07/1 XML (P*Fa 25 KB 2016/07/1 XML (P*Fa 15 KB 2016/07/1 <td< th=""></td<>

(2)「DENKEYBD.xml」を削除します。

bakDENMOU	間く(0)) XML ド≠ユ	5 KB
a bakDENNOS	編集(F)	XML F=1	21 KB
a bakDENRCCI	プログラムから壁く(用)・	XML ドキュ	42 KB
bakDENRCU	2000/2000 000 (0)	XML F+1	517 KB
bakDENSMM	ACTION (- 5-5 5 (5) (4)	XML F#1	43 KB
bakDENTALK	送る(N) ・	XML ドキュ	12 KB
akDENWIN	(1)の間の(1)	XML ドキュ	35 KB
DENCEGEU	⊐P'-(C)	XML ドキュ	45 KB
E DENDAILY		XML ドキュ	1,086
E DENDOCS	ショートカットの作時(S)	XML ドキュ	131 KB
■ DENDOCSU	削除(D)	XML ドキュ	1 KB
E DENDVD	名前の変更(M)	XML ドキュ	33 KB
DENEILE	the set set	XML E#1	23.KB
- DENKEYBD	2010/07/12	XML F=1	660 KB
DENMAIL	2016/07/1.	XML F+1	182 KB

※ファイルの拡張子(.xml)は、表示されていませんので、フォルダ内の「種類」で「XMLドキュメント」であることをご確認ください。

(3)「スタート」⇒「コンピューター」⇒「ローカルディスク」⇒「Program Files」⇒「HKE」⇒「DEN」⇒「EXE」⇒ 「DEFAULT」と選択します。

NO CALOR	ドキュメント	00		・日日日日 ・日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	🚱 🗣 📕 + Program Files	+ HKE + DEN + EXE + DEFAULT	т.	4 DEFAULT	の検索	د ا م
	ピクチャ	整理・ システムのプロパティ	プログラムのアンインストールと変更 キットワーク	9-170803T * 🗄 • 🔄 😡	整理 - 5イブラリに直接 -	州町・ 新しいフォルダー			(n	
	ミュージック 単近使った項目 ・ コンビューター コントロール パネル デバイスとプリンター 厳定のプログラム ヘルプとサポート	 ★ お床に入り ▲ OnaChree ▲ ダウンロード ■ デスクトップ 型 第ご表示した場所 ロ ライブラリ ロ ドキュメント ビクチャ ビデオ ゴ ミュージック 	 ハードディスタドライブ(1) □ DJL ディスタ(C) ② ● 101 (194 (3)/24) ○ DA 「(1) (104 (3)/24) 	: (2) リムーブルディスタ (E)	◆ 万味に入り ○ OneShie ③ ダウンロード ■ デスクトップ ③ 酸过表スレン塩軒 □ ライブラリ マ チイコメント ビクチャ ビデオ メ ミュージック	S.III 	現新日時 2014/12/2 2013/05/3 2013/05/3 2018/04/1 2018/04/1 2014/10/2 2013/02/3 2014/12/20 2014/12/20 2014/12/20 2014/12/20 2014/11/2 2014/11/2 2014/11/2	勝期 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ 20%」ドキュ	45 KB 1,068 131 KB 23 KB 660 KB 182 KB 22 K0 5 KB 22 K0 5 KB 22 K0 5 KB 22 K0 5 KB 21 KB 42 KB 507 KB 42 KB 14 KB 12 KB 11 KB	
 すべてのプログラム 「プログラムとファイルの… P 	STORAGE	▲ ローカルディスク(C ■ リムーバブルディスク			▲ ローカルディスク(C ■ リムーバブルディスク	DENWEB DENWIN MSGD8 bek_DENNOSIN TRemoteControlData.def	2015/01/2 2014/12/2 2014/12/0 2015/10/1 2014/11/1	XML ドキュ XML ドキュ GOMメディ XML ドキュ DEF ファイル	42 KB 35 KB 119 KB 21 KB 3,095	

DENDVD	2008/04/1.	XML ドキュ XML ドキュ	33 KI
DENKEYBD	00444030	XML ドキュ	660 Ki
DENMAIL DENMAIN DENMOUMV DENNOSIN DENRCCFG DENRCUSR	★(40) 構成(E) プログラムから聞く(H) 以前のバーションの優元(V) 送る(N) 切り取り(T) コピー(C)	ХМL FF1 ХМL FF1 ХМL FF1 ХМL FF1 ХМL FF1 ХМL FF1 ХМL FF1	182 Ki 22 Ki 5 Ki 21 Ki 42 Ki 507 Ki 43 Ki
	ショートカットの作成(5) 制除(D) 名前の皮質(M) プロパティ(R)	ARE設定 XML ドキュ XML ドキュ XML ドキュ XML ドキュ GOM メディ	1 K 12 K 11 K 42 K 35 K

(5)(1)の「XML」フォルダに「_DENKEYBD.xml」を貼り付けます。

名前	更新日時	種類	サイズ
DENKEYBD	2014/10/2	XML F#1	660 KB
bakDENCFGEU	2014/12/2	XML ドキュ	45 KB
bakDENDAILY	2016/07/1	XML ドキュ	1,086
bakDENDOCS	2016/07/0	XML ドキュ	131 KB
bakDENKEYBD	2016/07/1	XML ドキュ	660 KB
🖹 bakDENMAIL	2016/07/1	XML ドキュ	182 KB
bakDENMAIN	2016/07/1	XML ドキュ	24 KB
bakDENMOUMV	2014/12/0	XML ドキュ	5 KB
bakDENNOSIN	2016/07/1	XML ドキュ	21 KB
bakDENRCCFG	2011/11/1	XML ドキュ	42 KB
bakDENRCUSR	2016/07/1	XML ドキュ	517 KB
bakDENSMM	2014/11/2	XML ドキュ	43 KB
bakDENTALK	2014/11/2	XML ドキュ	12 KB
🖃 bakDENWIN	2016/07/0	XML ドキュ	35 KB
DENCEGEU	2014/12/2	XML ドキュ	45 KB
E DENDAILY	2016/07/1	XML ドキュ	1,086
DENDOCS	2016/07/1	XML ドキュ	131 KB

(6)「_DENKEYBD.xml」のファイル名より、「名前の変更」で、「_(アンダーバー)」を削除します。

名前	更新日時	種類	サイズ
DENKEYBD	004414020	···· F+2	660 KB
bakDENCFGEU bakDENDAILY bakDENDOCS bakDENKEYBD	構実(E) プログラムから騙く(H) 以前のパージョンの現元(V)	ギュ キュ キュ キュ	45 KB 1,086 131 KB 660 KB
bakDENMAIL	送る(N)	· *+그	182 KB
bakDENMAIN bakDENMOUMV bakDENNOSIN	切り取り(T) コピー(C)	ドキュ ドキュ	24 KB 5 KB 21 KB
bakDENRCCFG bakDENRCUSR	ショートカットの作成(S) 削除(D)	*キュ	42 KB 517 KB
bakDENSMM	名前の変更(M)	キュ	43 KB
bakDENTALK bakDENWIN	プロパティ(R)	ドキュ	12 KB
DENCEGEU	2014/12/2 2016/07/1	XML ドキュ XML ドキュ	45 KB 1,086

(7) 伝の心を起動して、文字盤が表示できることを確認してください。

※上記の方法は、文字盤が表示されない場合です。その他の場合も同様に、XMLファイルをデフォルトの XMLファイルと入れ替えてください。

※上記の方法は、Windows7機の場合になります。Windows10機の場合は、伝の心フォルダ構成は変更ありませんが、「コンピューター」を「PC」等と各所を読み替えてください。

次回のトピックス予告

☆次回のトピックスは・・・「Windows10についての情報」を予定しております。

今後も「伝の心通信」を通じて、少しでも皆様のお役に立つ情報をお伝えして参ります。

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。