

伝の心販売会社 御中

発行：2017年9月26日  
(株)日立ケーイーシステムズ

## \*\*\*「伝の心通信」(第21号)\*\*\*

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
「伝の心通信」(第21号)を発行させていただきます。


### トピックス①

### パネル型「伝の心」について

2017年9月1日より、新しいパネル型「伝の心」の出荷を開始致しました。パネル型「伝の心」は従来機に比べて、全体的に小さく、薄く、軽くなっていますので、外出時の持ち運びには大変便利です。今回はパネル型「伝の心」の本体右側にある便利なボタンの説明、タッチキーボードの表示方法および電源まわりの留意点についてご説明させていただきます。


#### 1. 本体右側の便利なボタンについて

新パネル型「伝の心」には、本体右側の電源ボタンの下に便利なボタンがあります。

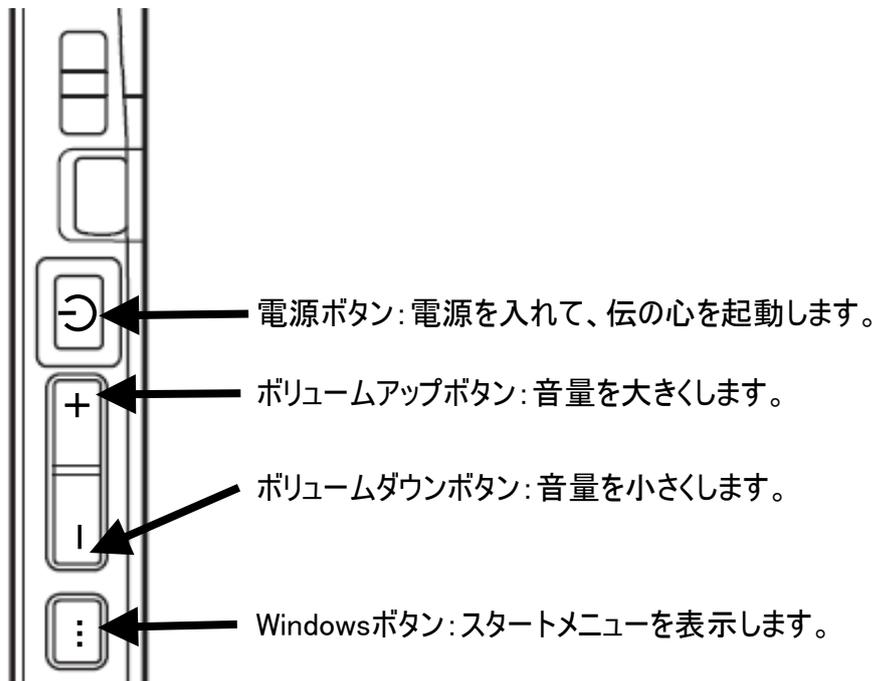

## 2. タッチキーボードの表示方法について

本体右側にあるWindowsボタンを押すと、スタートメニューとタスクバーが表示されます。タスクバー右端の「タッチキーボード」アイコンをタッチすると、タッチキーボードが表示されます。

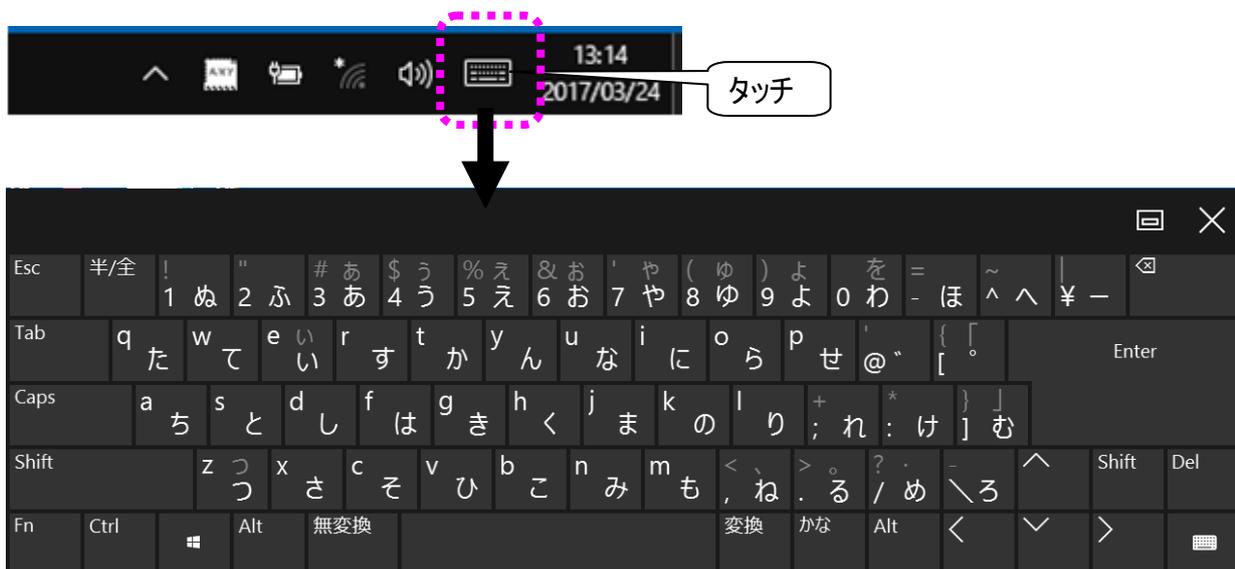

## 3. パネル型「伝の心」の留意点

### (1) 電源ボタンを押しても電源が入らない場合について

電源コードで電源に接続している場合でも、電池がほとんどない場合(使用していない期間が長く、放電している場合)、暫く充電しないと電源ボタンを押しても電源が入らないことがあります。1～2ヶ月程度使用していない場合は充電を行ってから電源を入れてください。

### (2) バッテリーについて

リチウムポリマーバッテリーが内蔵されています。内蔵バッテリーはユーザー様では、取り外し・交換ができません。バッテリーの寿命(使用頻度にもよりますが寿命は5年程度です)、または、故障等でバッテリーを交換する場合は、修理対応になりますので、修理を依頼してください。

### 次回のトピックス予告

今後も「伝の心通信」を通じて、少しでも皆様のお役に立つ情報をお伝えして参ります。

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。