HITACHI Inspire the Next

伝の心販売会社 御中

発行:2018年3月22日

(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第27号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 「伝の心通信」(第27号)を発行させて頂きます。

トピックス ユーザーデータのバックアップとリストアについて

今回はユーザーデータのバックアップとリストアについて説明します。「伝の心」終了時の自動バックアップ以 外にもバックアップ、リストアツールを使用することにより随時ユーザーデータをUSBメモリにバックアップ、ま た、USBメモリにバックアップしたデータをシステム装置内にリストアすることができます。本号ではVer.06-XXの バックアップツールとリストアツールの使用方法を示します。





1. ユーザーデータをバックアップする方法

(1)「伝の心」を起動します。

(2)「伝の心プログラム」を停止させます。

「伝の心」が起動した後、キーボードの Ctrl キーを押しながら「伝の心」の画面右上の×をクリックして、「伝の心」を停止させます。





(5) バックアップツールを起動します。

(4)で表示されたウィンドウの左側のペインで、「ライブラリ」→「ドキュメント」→「ドキュメント」→「DenNoSin」と順に展開します。「DenNoSin」の中にある「伝の心データバックアップツール」をクリックします。 す。右側のペインに表示された「バックアップ」をダブルクリックします。



(6)「伝の心」ユーザーデータのバックアップ先を指定します。 伝の心ユーザーデータのバックアップ画面が表示されます。(4)で確認した USB メモリのドラ イブ名を入力し、OKボタンをクリックします。

■ 伝の心ユーザーデータのバックアップ ×
バックアップ先のドライブ名を入力してください。 OK ②クリックします。 (<入力例> f:)
キャンセル
①ここにUSBメモリのドライブ名を入力します。
例)E:
(7)「伝の心」ユーザーデータのバックアップを開始します。 「伝の心」ユーザーデータのバックアップ開始確認画面が表示されます。はいボタンをクリック
して、「伝の心」ユーザーデータのバックアップを開始します。
伝の心ユーザーデータのバックアップ
伝の心ユーザーデータのバックアップを開始します。 クリックします。
はい() いいえ()
(8)バックアップツールを終了します。
「伝の心」ユーザーデータのバックアップが終了すると、バックアップ完了画面が表示されます。 OKボタンをクリックして、バックアップツールを終了します。
伝の心ユーザーデータのバックアップ ×
「E:DENBAK」に伝の心のユーザーデータはバックアップされました。 クリックします。
ОК
以上で「伝の心」ユーザーデータのバックアップは完了です。
「伝の心」ユーザーデータは、USB メモリの「DENBAK」フォルダーにバックアップされます。

I

2. バックアップしたユーザーデータをリストアする方法

(1)「伝の心」を起動します。

(2)「伝の心プログラム」を停止させます。

「伝の心」が起動した後、キーボードのCtrlキーを押しながら「伝の心」の画面右上の×をクリックして、「伝の心」を停止させます。





(5)リストアツールを起動します。

(4)で表示されたウィンドウの左側のペインで、「ライブラリ」→「ドキュメント」→「ドキュメント」→「DenNoSin」と順に展開します。「DenNoSin」の中にある「伝の心データバックアップツール」をクリックします。 す。右側のペインに表示された「リストア」をダブルクリックします。



(6)「伝の心」ユーザーデータがバックアップされたUSBメモリのドライブ名を指定します。
伝の心ユーザーデータのリストア画面が表示されます。(4)で確認したUSBメモリのドライブ名を入力し、
OKボタンをクリックします。

■ 伝の心ユーザーデータのリストア	×
バックアップされた伝の心データが入っているドラ イブ名を入力してください。(<入力例> f:)	● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	①ここにUSBメモリの
	ドライブ名を入力します。 例)E:

(7)「伝の心」ユーザーデータのリストアを開始します。

「伝の心」ユーザーデータのリストア開始確認画面が表示されます。はいボタンをクリックして、「伝の心」ユ ーザーデータのリストアを開始します。

伝の心ユーザーデータのリストア	×
伝の心ユーザーデータのリストアを開始します。	クリックします。
(III)	いいえ(<u>N</u>)

(8)リストアツールを終了します。

「伝の心」ユーザーデータのリストアが終了すると、リストア完了画面が表示されます。OKボタンをクリックして、リストアツールを終了します。

伝の心ユーザーデータのリストア	×	
「E¥DENBAK」から伝の心のユーザーデータはリストアされました。		クリックします。
	ОК	

以上で「伝の心」ユーザーデータのリストアは完了です。

【注意事項】

●「伝の心」ユーザーデータのバックアップ、リストア中は、PCからUSBメモリを取り外さないでください。

- ●バックアップした「伝の心」ユーザーデータのフォルダーは名称を変更しないでください。
- ●バックアップした「伝の心」ユーザーデータのフォルダーは移動しないでください。

次回のトピックス予告

次回も「伝の心通信」を通じて、少しでも皆様のお役に立つ情報をお伝えして参ります。 また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。 e-mail:dennoshin@hke.jp

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。