

伝の心販売会社 御中

発行：2018年10月24日
(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第35号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
「伝の心通信」(第35号)を発行させていただきます。

トピックス

・リモコン操作で、同じ病室の隣のTVまで、切り替えてしまう場合の対処方法

今回は、『リモコン操作で、同じ病室の隣のTVまで、切り替えてしまう場合の対処方法』をご紹介します。

なんでもIRは、お部屋の隅々までリモコン操作できるように広範囲に赤外線飛ばす為、広範囲に飛ばさないようにする必要があります。

1. 箱で覆ってしまう

なんでもIRの正面以外を箱で覆ってしまうと赤外線が正面のみに発光するので、隣のTVを切り替えることが軽減されます。



箱の正面と、背面にUSBケーブル
が出せるように箱を切り取って、
なんでもIRに被せます。

2. なんでもIR用エミッターを使用する

オプションの「なんでもIRエミッター」を、なんでもIRの「EMITTER」ポートに接続するだけで、エミッターから赤外線が発光されるようになります。

エミッターをご自分のTVのリモコン受光部前に貼り付けて使用しますが、伝の心のリモコン操作では、なんでもIR本体からも赤外線が発光してしまうので、なんでもIR本体は、箱などで覆うと、エミッターの前のTVのみが反応するようになります。(※エミッターは、テクノツール株式会社よりお求めいただけます。)

ケーブルが3mあるので、赤外線が届きにくいAVラックなどに入った機器に対して使用することも可能です。



エミッター



TVへのエミッター
貼り付け例

— 以上 —

次回のトピックス予告

次回も「伝の心通信」を通じて、少しでも皆様のお役に立つ情報をお伝えして参ります。
また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。
e-mail: dennoshin@hke.jp

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。