

伝の心販売会社 御中

発行：2020年4月22日
(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第53号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
「伝の心通信」(第53号)を発行させていただきます。

トピックス1

伝の心Ver. 06-20についてのご紹介(1)

今月より、伝の心の新しいバージョン06-20の発売が開始されました。
今回から数回に分けて、この新しいバージョンで何が変わったか、お知らせ致します。

1. 「日常使用文」のスマートスピーカー対応

「日常使用文」で登録した各文章の読み上げ時に、スマートスピーカーへの呼びかけを追加して読み上げることができるようになりました。



例えば、「あいさつパネル」の「おはよう」を「Google Home」のスマートスピーカーに設定した場合、「おはよう」の前に「オッケー Google」といったスマートスピーカーへの呼びかけが追加されて読み上げられます。スマートスピーカーは「おはようございます・・・」と応答して答えてくれます。

●スマートスピーカーの種類

「Google Home」と「Amazon Echo」に対応しています。

●スマートスピーカーの設定


スマートスピーカーはお客様でご用意願います。スマートスピーカーをご使用になる場合は、それぞれの機器について設定が必要です。

2. 「ユーザーデータバックアップ」機能の強化

内蔵 HDD へのバックアップが出来るようになりました。また、バックアップの回数も最大20回まで保持可能になりました。それに伴い、内蔵 HDD へのバックアップを出荷時の設定とさせて頂き、バックアップ用メディアの添付を廃止させて頂きました。

また、お客様が別途 USB メモリをご用意頂ければ、以前と同じように USB メモリへバックアップすることも可能です。

(※バックアップの設定は、支援者用設定から可能です。)

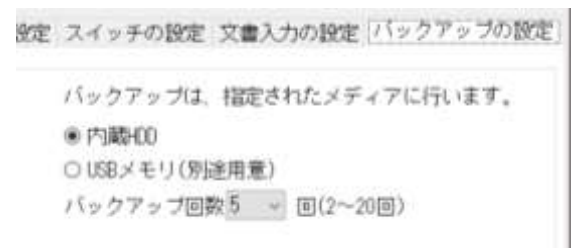


3. 「クイック起動」機能の追加

伝の心の終了直前に使用していた機能を、次回起動時にメインメニューを介さずに起動できる機能です。また、指定した機能から起動することも可能です。

(※クイック起動の設定は支援者用設定から可能です。)



4. 「定型句」候補の文書編集域表示

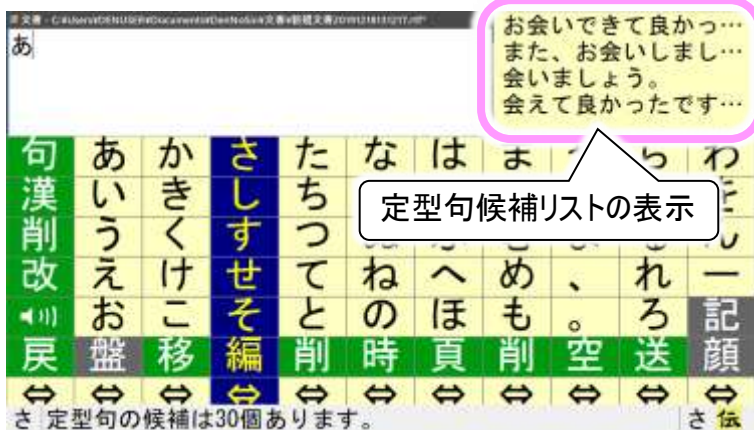

「文書」にて文字を入力すると、定型句候補リストを文字盤右上部に表示するようにしました。定型句の選択・決定は、従来通り「句」を選択して行いますが、視線入力オプション使用時は、直接定型句候補リストを注視して選択できます。

本機能は「文書」だけでご利用可能です。「会話」や「メール」などのほかの機能ではご利用になれません。ご注意ください。

5. スイッチボックスに外部出力機能追加

約12年、ご愛顧いただいたスイッチボックス「なんでもスイッチUSB」が「なんでもスイッチUSBプラス」として生まれ変わりました。

従来の「なんでもスイッチUSB」は1～5番ポートすべてが入力ポートでしたが、「なんでもスイッチUSBプラス」は入力と出力の両方が可能になりました。入力専用ポートが1番、出力専用ポートが4、5番となり、さらに2、3番は入力と出力の切り替えが可能となります。

(※「なんでもスイッチUSBプラス」のディップスイッチで切り替えます。)

●「伝の心」からの外部出力

支援者用設定から、「呼音」との連動や、外部出力メニューからの出力の設定が可能です。

●スイッチ操作(長押し・連続3回押し)による外部出力

「なんでもスイッチUSBプラス」に給電されている状態であれば、入力側のスイッチ操作(長押し・連続3回押し)で5番ポートから1ショットの出力が可能です。

(※別途「なんでもスイッチUSBプラス」のディップスイッチの設定が必要です。)



※今回ご紹介した新機能の詳細は、次回以降の伝の心通信でご紹介致します。

トピックス2

伝の心Ver. 06-20の動画紹介

伝の心Ver. 06-20の紹介動画を下記サイトにて順次公開いたします。是非ご視聴ください。

■伝の心 - YouTube サイト

https://www.youtube.com/channel/UCR_NH9JdraexNZtQT_bHLRw

— 以上 —

次回のトピックス予告

次回は、視線入力オプションの新機能についてご紹介したいと思います。

これからも皆様のお役に立つ各種情報をお伝えして参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。

また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。

e-mail: dennoshin@hke.jp

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。