

伝の心販売会社 御中

発行：2020年5月27日
(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第54号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
「伝の心通信」(第54号)を発行させていただきます。


トピックス1

伝の心Ver. 06-20についてのご紹介(2)—視線検出式入力装置オプション

先月より、伝の心の新しいバージョン06-20の発売が開始されました。
前回から数回に分けて、この新しいバージョンで何が変わったか、お知らせ致しております。
今回はその2回目として、視線検出式入力装置オプションの新機能についてご紹介させていただきます。

1. キャリブレーション距離合わせ機能(位置補正画面)の追加

「視線検出式入力装置」との距離や傾きを自動検出して表示し、ご利用者の方と「伝の心」との設置位置の調整を容易にしました。

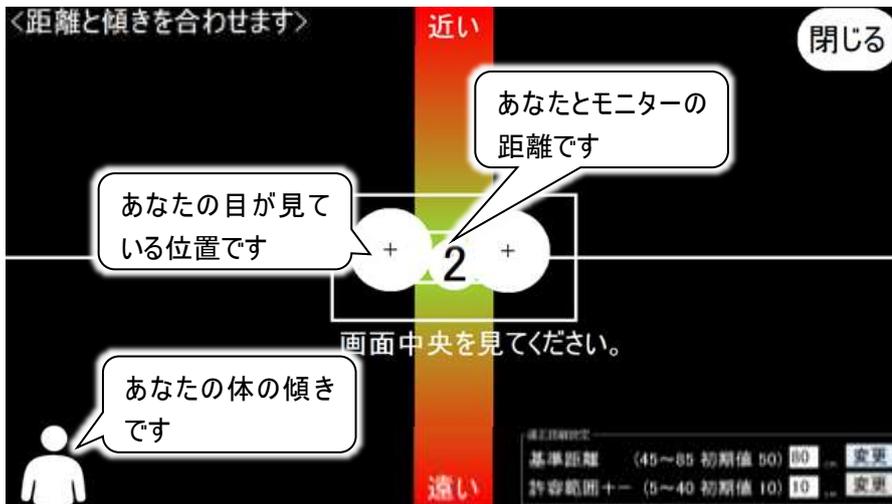


キャリブレーション前に、左図のような位置補正画面を表示します。
左右の目の位置と体の傾きが表示されるので、適切な設定位置が視覚的に分かるようになりました。
また、左右の目の位置(大きな2つの○)と距離(小さな○)が有効範囲内に入ると自動的にキャリブレーションに進みます。

2. ボタン吸着の機能追加


文字盤、メニュー等の枠内に視線が入ると、目標物の中央に視線カーソルを吸着する機能を追加し、より視線での選択精度を向上させました。

マウスカーソルがボタンに入ったらボタン中央に吸着

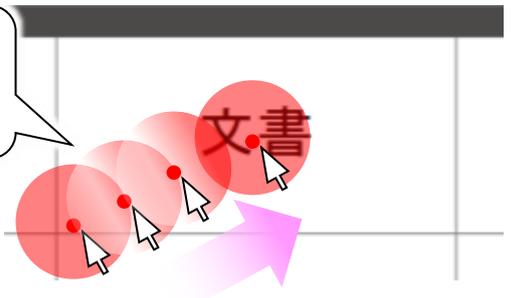

3. 練習機能の追加

視線練習モードを追加して、視線での入力練習をゲーム感覚で楽しく行えるようにしました。

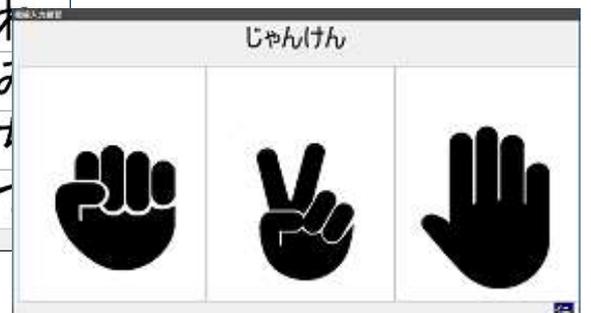

4. 休止モード機能の改善



休止モードを視覚的により分かりやすい表示に変更し、使いやすさを改善しました。

また、従来は画面下部だけを見て休止と休止解除を行っていましたが、

- ・画面下部を注視して休止、
- ・画面上部を注視して休止解除に変更しました。




5. 「まばたきスイッチ」モードの追加

同じ視線検出式入力装置で、まばたきをスイッチ入力として使う機能を追加しました。

「視線入力メニュー切り替えツール」で「まばたきスイッチ」を選択すると、まばたきスイッチアイコンがタスクトレイに常駐します。

まばたきスイッチアイコンをクリックして「設定」を選択すると、まばたき時間の設定が可能です。


判定時間以上の間目を閉じて、目を開けたときにスイッチ入力が入ります。

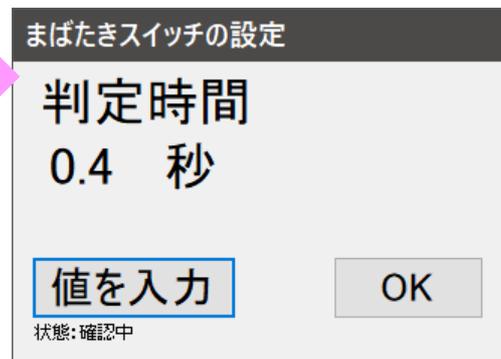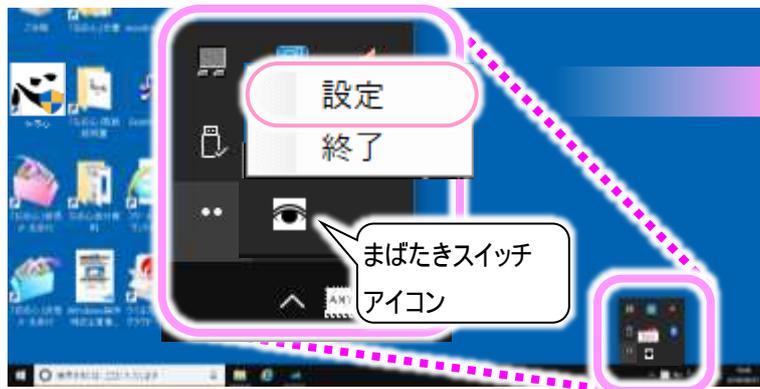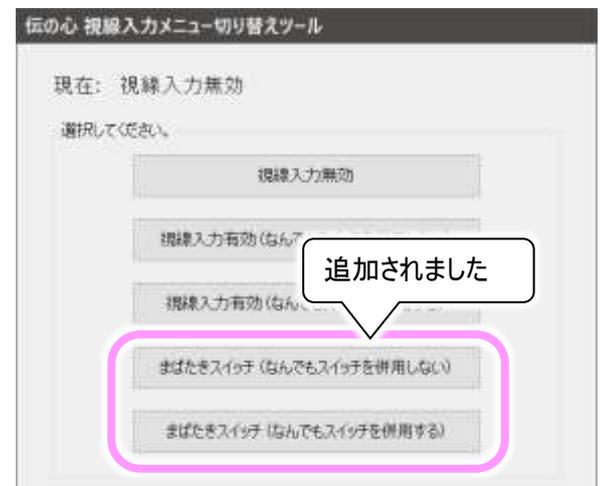

6. 入力切替機能の追加

従来のスキャン方式と視線入力方式との切り替えを、ユーザー設定にて適宜切り替えられるようになりました。

(※この機能は、一度「視線入力メニュー切り替えツール」で視線入力に切り替えると有効になります。)

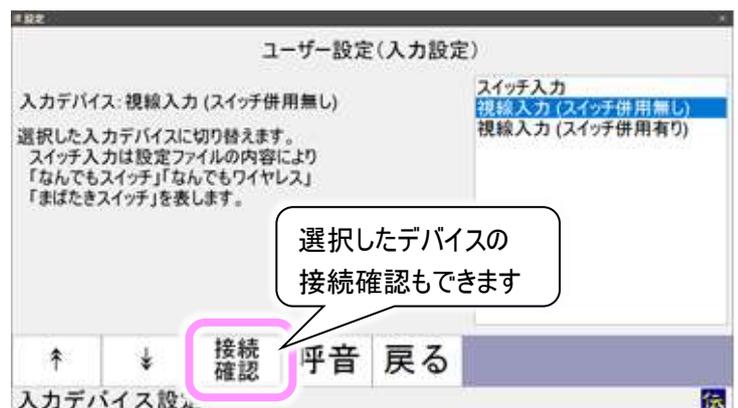

伝の心Ver. 06-20を搭載して出荷される「伝の心」には、その他にも便利な機能が搭載されています。

1. 移行ツール

Ver. 06-20への移行ツールが搭載されています。格納場所は、「C:¥DENTOOL¥「伝の心」移行ツール(for Ver.06-20)」になります。



以前お使いになられていた「伝の心」からのデータ移行にお使いいただけます。(Ver. 05-30からの「伝の心」に対応しております。)

ご利用時は、フォルダの中身を USB メモリなどにコピーして、ご使用ください。また、フォルダ内には、操作手順書も格納されております。

2. 取扱説明書ボタン

支援者用設定に、「取扱説明書」ボタンを追加して、容易に取扱説明書のフォルダを開くことが可能になりました。



— 以上 —

コミュニケーションアプリ「LINE」についての速報です。

「LINE」の2020年5月のアップデートにて、「伝の心」での新規アカウント登録(電話番号ログイン)ができなくなります。(※すでにアカウントをお持ちの方は大丈夫です。)また、友だちリストの表示領域が広がったことにより、トーク画面が表示されない不具合が発生しております。

「伝の心」にて「LINE」をご利用のお客様には、ご迷惑おかけいたしますが、対処方法等の詳細は近日お知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。

次回のトピックス予告

今回は、先月号(第53号)でご紹介した新しいスイッチボックスの新機能について特集します。これからも皆様のお役に立つ各種情報をお伝えして参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。
e-mail: dennoshin@hke.jp

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。