

伝の心販売会社 御中

発行：2020年6月24日
(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第55号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

「伝の心通信」(第55号)を発行させていただきます。

トピックス1

伝の心Ver.06-20についてのご紹介(3)ーなんでもスイッチUSBプラス



2020年4月より、伝の心の新しいVer.06-20の発売を開始しました。

「伝の心通信」では第53号から数回に分けて、この新しいバージョンで何が変わったか、お知らせ致しております。今回はその3回目として、なんでもスイッチUSBプラスの機能と設定についてご紹介させていただきます。

1. 入力機能と出力機能


「なんでもスイッチ USB プラス」は、「スイッチ接続側」のポートから外部への信号出力が可能になりました。「スイッチ接続側」の5ポートは下記のように、入力ポートと出力ポートに分かれます。

- ・1 番ポートは入力専用
- ・2 番、3 番は入力と出力の切り替えが可能(※ディップスイッチで切り替えます。)
- ・4 番、5 番ポートは出力専用


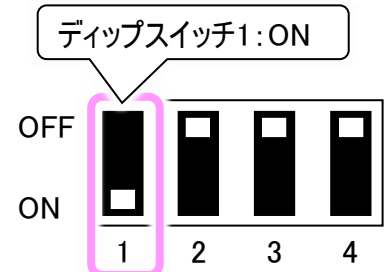
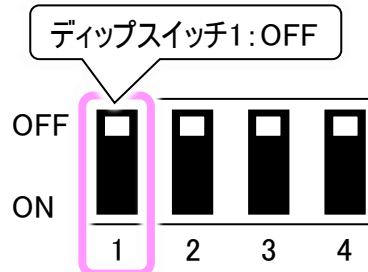


2. 伝の心側の出力設定

「支援者用設定」→「システム・アプリケーション設定」の「スイッチの設定」にて外部出力するポート、出力信号の出力時間、[呼音]と連動する出力ポートの設定が出来ます。

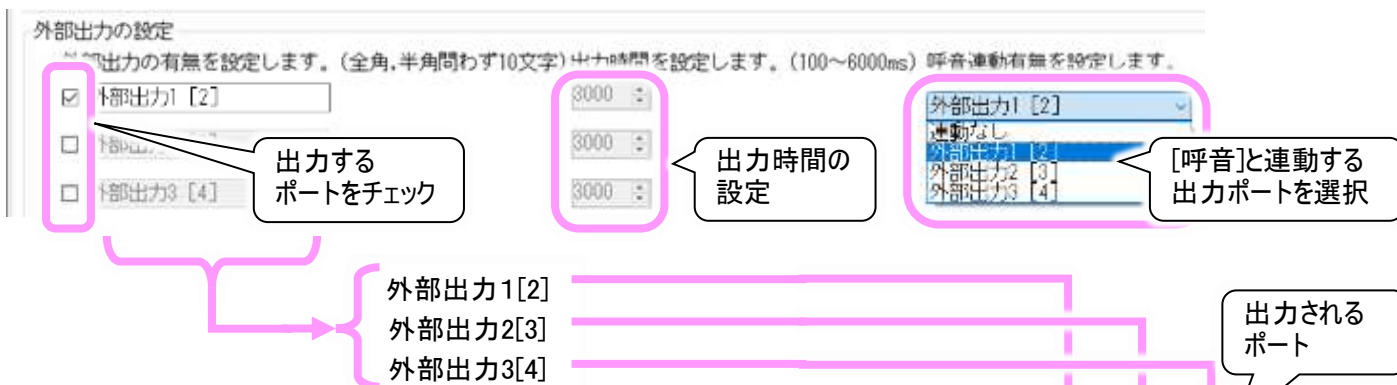

例えば、外部出力するポートに「外部出力1[2]」、出力時間「3000ms」で設定すると、メインメニューの応用操作に「外部出力1[2]」が追加され、「外部出力1[2]」を選択すると、2番ポートから、出力信号が「3000ms」出力されます。

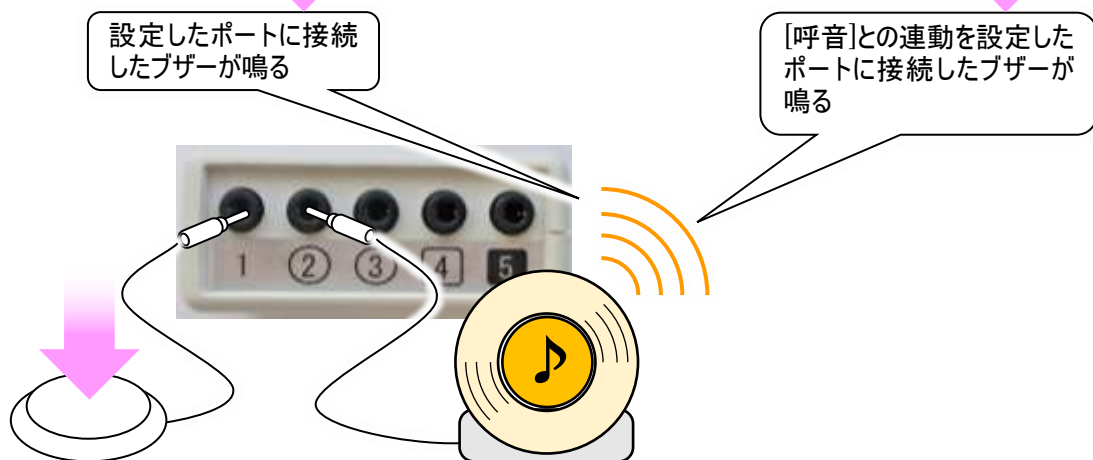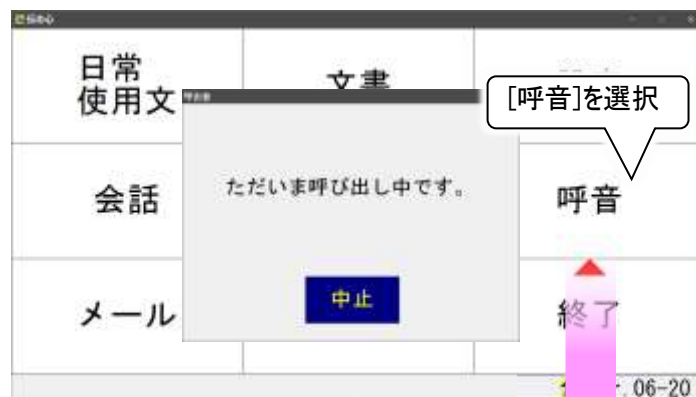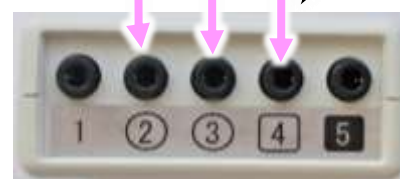


また、さらに[呼音]と連動する出力ポートを「外部出力1[2]」で設定すると、「呼音」を選択した際も、従来の伝の心本体からの呼び出し音に加えて、「外部出力1[2]」を選択した時と同様に2番ポートから、出力信号が「3000ms」出力されます。

3. スイッチ入力だけで出力する5番ポート

なんでもスイッチ USB プラスの 5 番ポートは、なんでもスイッチ USB プラスのディップスイッチの設定を行うと、入力側スイッチの長押しや 3 回連続押しなどの方法で、長押し 1 回につき 1 回、3 回連続押し 1 セットにつき 1 回、0.5 秒間信号出力させることが可能です。


(なんでもスイッチ USB プラスのご購入時の設定は 5 番ポート出力無効の設定になっています。)

■入力側スイッチの長押しで外部出力を行う場合

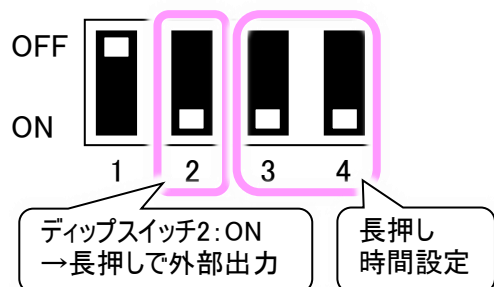

ディップスイッチの設定	長押し時間			5番ポート 出力無効
	2秒	3秒	5秒	
ディップスイッチ 2	ON			-
ディップスイッチ 3	ON	OFF	ON	OFF
ディップスイッチ 4	OFF	ON	ON	OFF

■入力側スイッチの 3 回連続押しで外部出力を行う場合

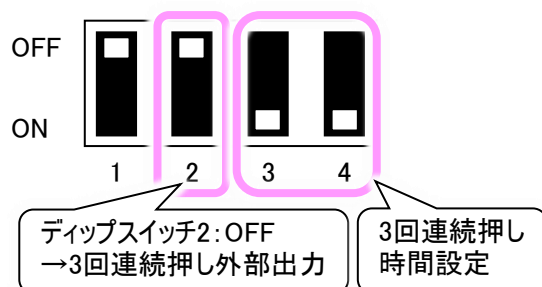


ディップスイッチの設定	3回連続押し時間			5番ポート 出力無効
	1.5秒	2秒	3秒	
ディップスイッチ 2	OFF			-
ディップスイッチ 3	ON	OFF	ON	OFF
ディップスイッチ 4	OFF	ON	ON	OFF

★★「伝の心」の電源 OFF 状態での 5 番ポートの使用方法★★

なんでもスイッチ USB プラスの 5 番ポートは、「伝の心」の電源 OFF の状態でも、なんでもスイッチ USB プラスが通電していれば、信号を出力可能です。

例えば、「伝の心」となんでもスイッチ USB プラスの間にセルフパワーの USB ハブを接続すると、「伝の心」の電源 OFF の状態でも、5 番ポートの機能をご利用になれます。

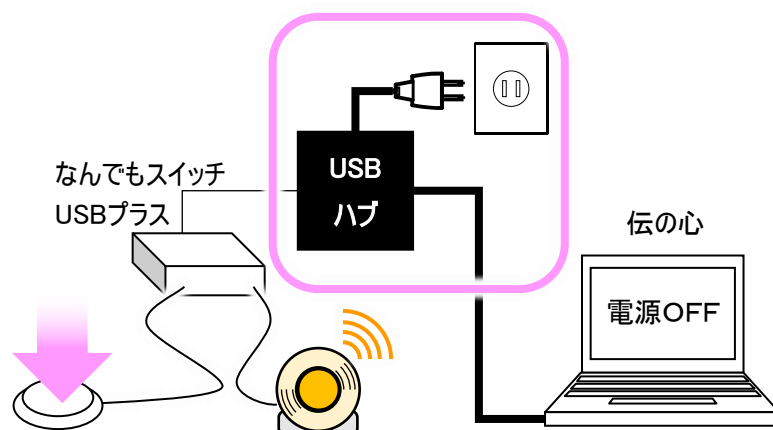

— 以上 —

次回のトピックス予告

3回にわたって特集しました「伝の心 Ver.06-20の新機能」は如何でしたでしょうか。
これからも皆様のお役に立つ各種情報をお伝えして参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。
また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。
e-mail: dennoshin@hke.jp

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。