

伝の心販売会社 御中

発行：2021年10月27日
(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第72号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
「伝の心通信」(第72号)を発行させていただきます。

トピックス1

伝の心Ver. 06-31についてのご紹介


今月10月1日より発売開始されている伝の心Ver.06-31の新機能・追加仕様について、お知らせ致します。

1. 視線検出式入力装置(PCEye5)への対応

視線検出式入力装置として PCEye5 も使用可能となりました。従来の PCEyeMini にも対応しています。
※同時に 2 種類使用することはできません。どちらか一方を選択してご利用ください。
なお PCEye5 対応に伴って、使用方法が変更になっておりますので、以下の内容をご確認ください。

●セットアップ方法の変更

セットアップの流れは下図の通りで、セットアップ時に視線入力デバイスの切り替えが追加になりました。

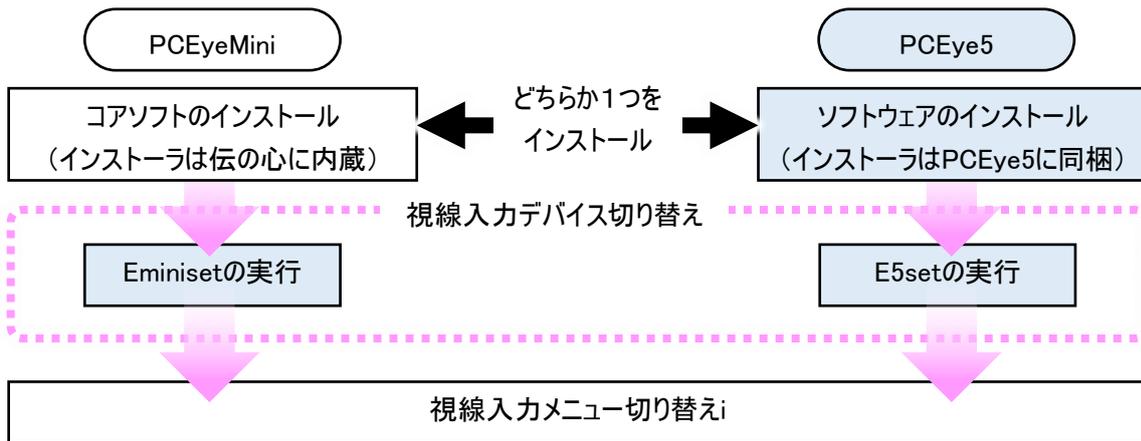

●「伝の心」起動時画面の変更

PCEye5 を使用する場合、「伝の心」起動時の画面が PCEyeMini と異なります。
また PCEye5 では「位置補正画面」が「キャリブレーション画面」に統合され、「キャリブレーション画面」→「伝の心メインメニュー」と遷移します。








「伝の心」メインメニュー





●キャリブレーション方法の変更

PCEye5 使用時は、キャリブレーション方法も PCEyeMini と異なります。


PCEyeMini

PCEye5

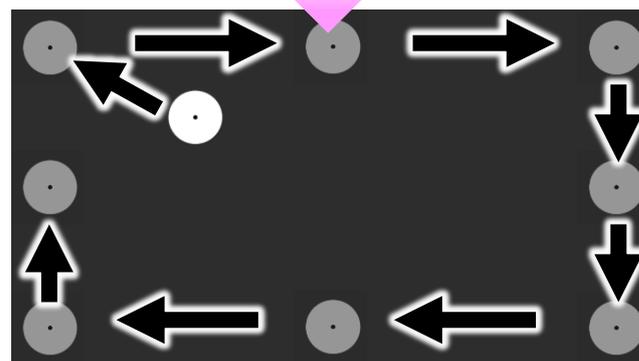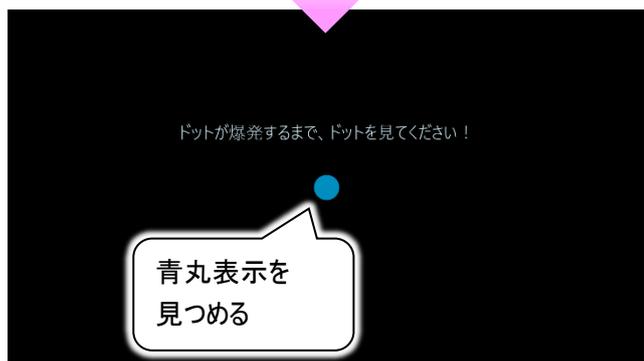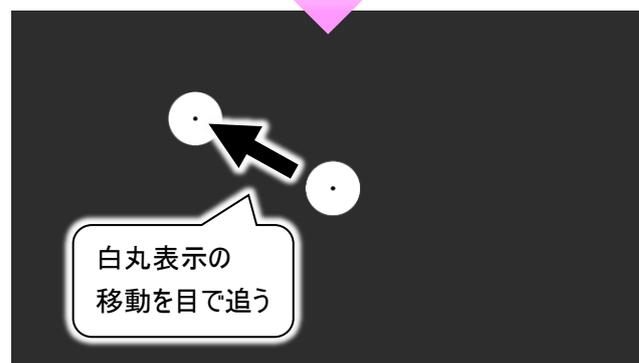


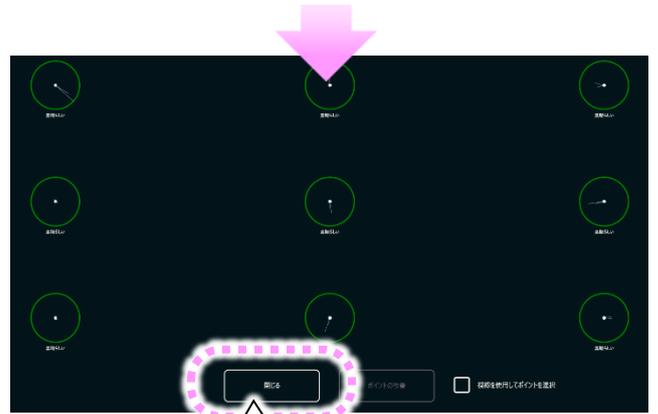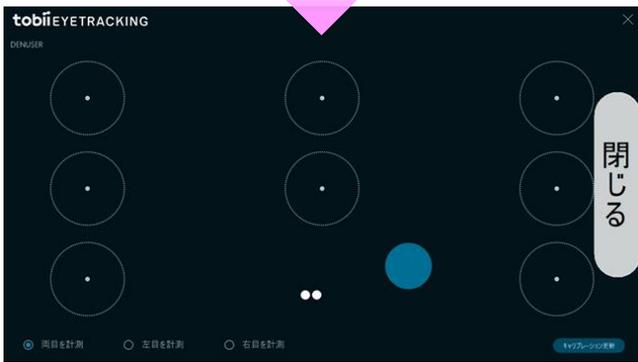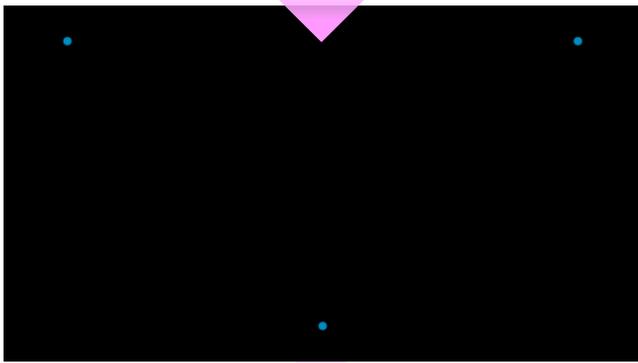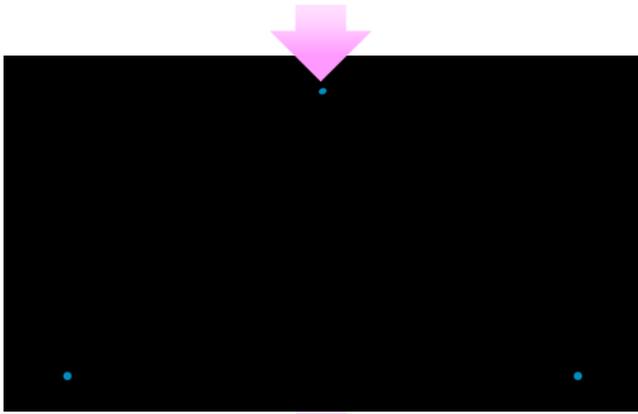

閉じるボタン
を見つめる

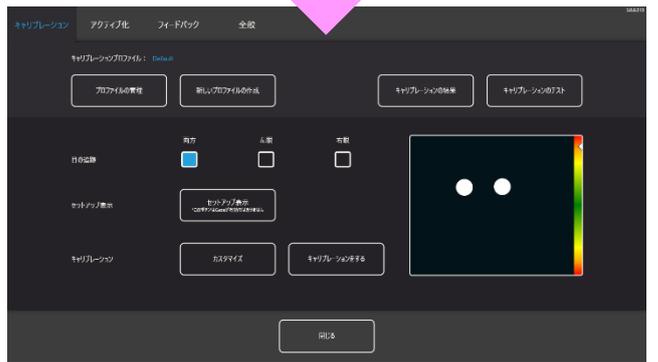

また PCEye5 使用時は、キャリブレーションの結果が円の色で表示され、改善したいポイントのみの再キャリブレーションも可能です。(※緑の円以外は再キャリブレーションを行ってください。)

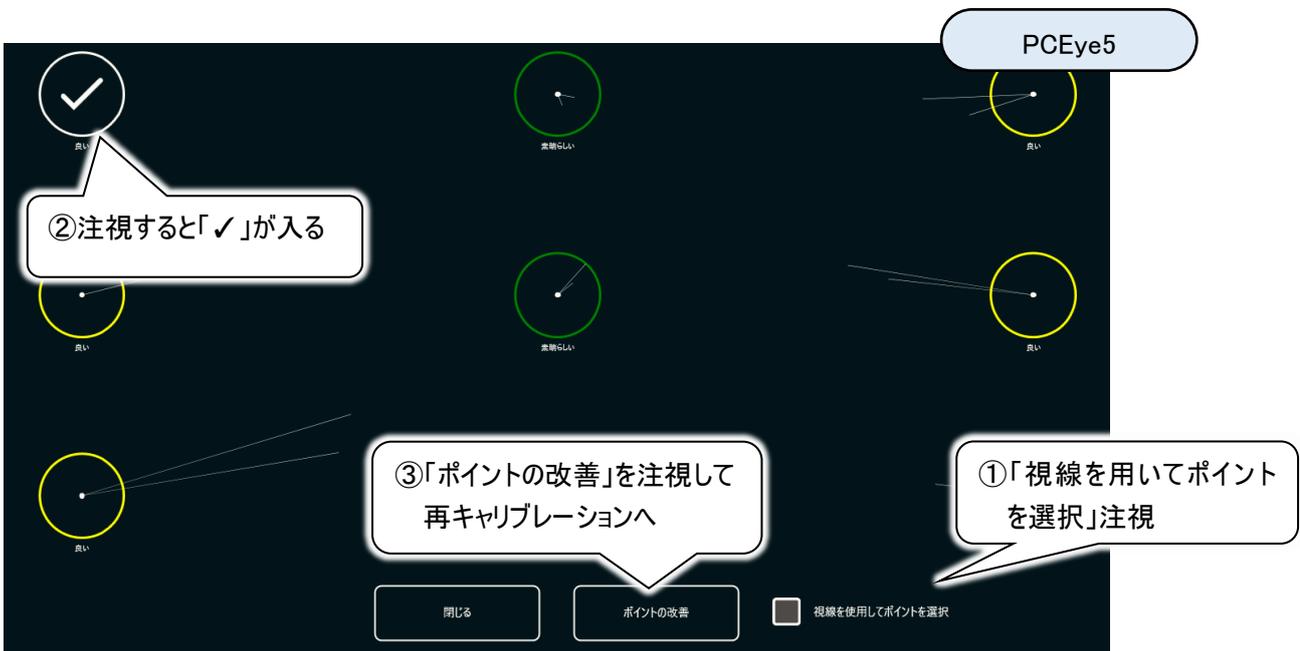

詳細に関しては、「伝の心」のデスクトップショートカット「伝の心」取扱説明書より閲覧可能な各視線入力オプション取扱説明書に記載されておりますので、ご参照ください。

取扱説明書は下記 Web サイトからもダウンロード可能です。

「伝の心」(でんのしん) : マニュアル 機能別マニュアル

https://www.hke.jp/products/dennosin/den_instruction_manual.htm#sect2

2. メールサンプルアカウントの追加

メールのサンプルアカウントとして、「Gmail」「Yahoo メール」「OCN メール」の 3 種類を追加しました。

サンプルですので、そのままご使用にはなれませんが、送受信メールサーバーの設定やポート番号は 2021 年 10 月現在の設定ですので、対象のメールをご使用になる場合は、参考にしてください。

「Gmail」「Yahoo メール」「OCNメール」の3種類のサンプルを追加

「Gmail(サンプル)」のアカウント設定画面

3. LINE (Ver.7) 仕様変更に対応

LINE アプリの起動処理の仕様変更に対応しました。

LINE (Ver.7) から**初回のみ起動時に LINE 画面の操作ができなくなる現象が発生しておりましたが**、「伝の心」Ver.06-31 より LINE アプリの仕様変更に対応し、**本現象は解消いたしました**。

また、伝の心で操作する際の見え方や機能は、以前のバージョン Ver.06-30 と変更はございません。

次回のトピックス予告

これからも皆様のお役に立つ各種情報をお伝えして参りますので、引き続きよろしくお願いたします。
また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。
e-mail: dennoshin@hke.jp

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。