

伝の心販売会社 御中

発行：2021年12月22日  
(株)日立ケーイーシステムズ

\*\*\*「伝の心通信」(第74号)\*\*\*

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
「伝の心通信」(第74号)を発行させていただきます。

トピックス1

音が小さい場合の対処方法-Realtek Audio Consoleの使用方法について

「伝の心」について、もっと音が大きくなりたいかと相談を受けることがあります。

現在発売中の「伝の心」ではRealtek Audio Consoleというアプリで、より大きい音を出すことができます。本号では、このRealtek Audio Consoleのサウンドエフェクトの設定方法についてご紹介します。

## 1. Realtek Audio Consoleの有無について

Realtek Audio Consoleは、下表の機種に入っております。対象の「伝の心」をお使いの場合は、ご利用いただけます。

伝の心モデル	システム装置型名	伝の心セット型式	伝の心バージョン(出荷時)
ノート型	FMVA6401SP	PC-DEN3N-010SP/S	06-20、06-30
	FMVA8404KP	PC-DEN3N-011SP/S	06-30、06-31
		PC-DEN4N-011SP/S	06-30、06-31
パネル型	FARQ22004	PC-DEN3P-005SP/S	06-13
		PC-DEN3P-006SP/S	06-20
		PC-DEN3P-007SP/S	06-20、06-30、06-31
		PC-DEN4P-007SP/S	06-30、06-31

## 2. Realtek Audio Console でのサウンドエフェクトの設定方法


1) スタートメニューから、Realtek Audio Console を起動します。




- 2) Realtek Audio Console 画面の左ペイン「スピーカー」をクリックすると、右側にサウンドエフェクトのメニューが表示されます。



- 3) まず、イコライザを選択します。  
「強力」を選択すると、より大きい音が出力されます。  
もっと大きい音を出したい場合は、各々のスライダーを直接マウスでドラッグして、一番上までスライドします。

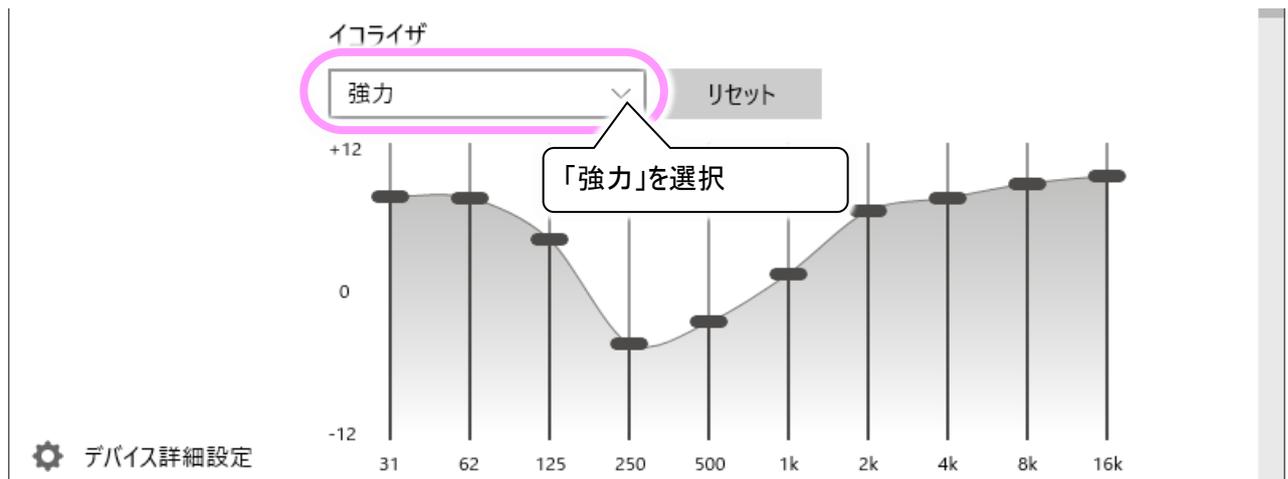

または

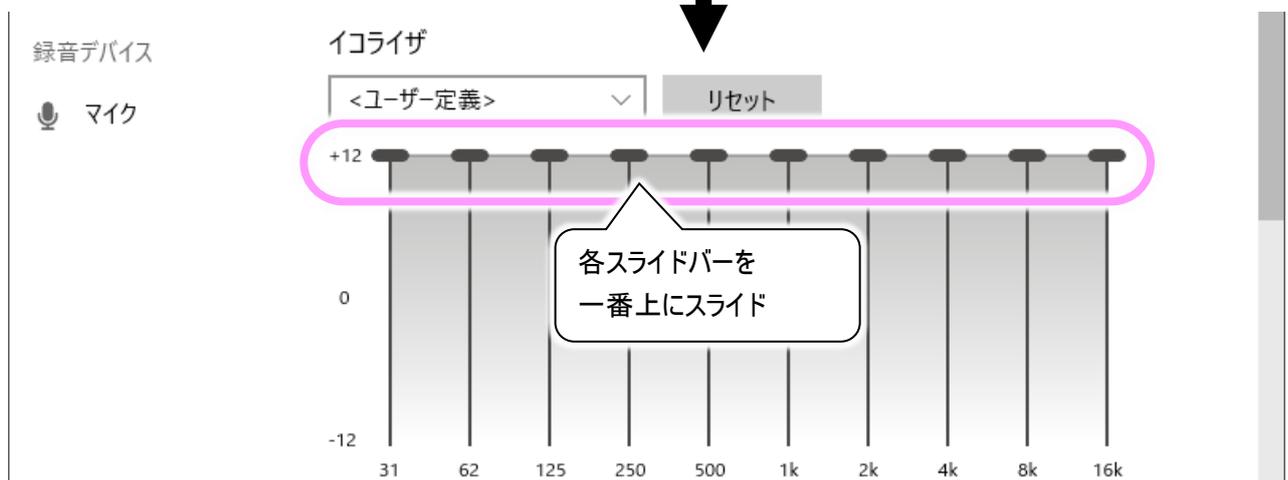

- 4) 次に環境を選択します。  
「居間」を選択してください。



- 5) これで設定は終了です。Realtek Audio Console 画面の右上「×」ボタンをクリックして画面を閉じてください。



## トピックス2

### ウイルスバスタークラウド(バージョン17.7)について

2021年10月14日より、ウイルスバスタークラウドの最新バージョン17.7が公開されております。

最新バージョン17.7につきましては、「伝の心」との組み合わせでの確認作業を完了し、伝の心」ホームページのお知らせにて設定手順書を掲載しております。

「伝の心」にてご利用される方は、下記お知らせをご参照ください。

#### ■「伝の心」ホームページ:お知らせ

ウイルスバスタークラウド(バージョン 17.7)のご利用について

<https://www.hke.jp/products/dennosin/dennews/dennews211213.htm>

2021年11月17日より、Windows 10の新しい機能アップデート「Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)」の配信が開始されております。

現在、「伝の心」との組み合わせでの確認作業が完了し、「伝の心」ホームページ掲載の準備を行っております。掲載は来月、2022年1月を予定しております。

注意事項等の内容は、今年春の機能アップデートに関するお知らせ「「伝の心」のWindows 10 May 2021 Update適用について」と同等となる予定です。

「Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)」へのアップデートは、「伝の心」ホームページ掲載まで今しばらくお待ちください。

—以上—

**次回のトピックス予告**

本年も「伝の心通信」をご覧いただき、ありがとうございました。少しでも皆様のお役に立つ情報がございましたら幸いです。

来年も皆様のお役に立つ各種情報をお伝えして参りますので、引き続きよろしく願いいたします。

また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。

e-mail: dennoshin@hke.jp

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。