

伝の心販売会社 御中

発行：2022年2月24日
(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第76号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

「伝の心通信」(第76号)を発行させていただきます。

トピックス1

視線入力オプション使用時と通常版「伝の心」との違い

「伝の心」が視線検出式入力装置にオプション対応してから、約3年が経ちました。最近、通常の「伝の心」との違いについてご質問を受けることが増えてきました。



今回はその中で、ご質問が多かったものをピックアップして記載いたします。

※記載内容は、視線入力オプションの取扱説明書にも記載されております。

1. 操作が連続して行われる機能の制限について

[↑]、[↓]、[←]、[→]などの、再度スイッチ入力するまで連続で動作するボタンに関して、**連続動作は行いません。1回のみ動作します。**


右の図は、連続動作しない項目の一例です。

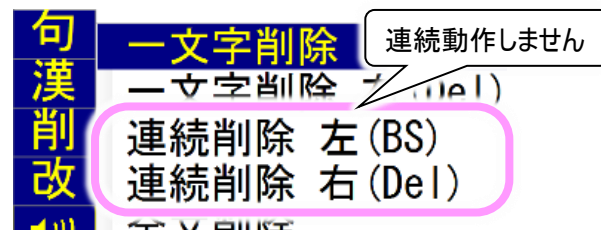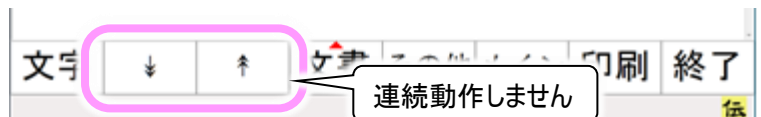

2. ブラウザ操作機能は使用できません

[ブラウザ操作]は、非表示に設定されます。支援者用設定でも選択できません。

[Windows操作]にてブラウザを起動して閲覧ください。

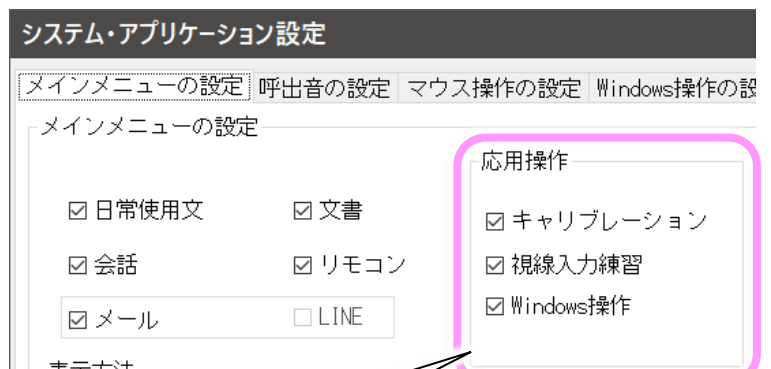

視線入力有効時の設定

通常版「伝の心」の設定


応用操作
☐ ブラウザ操作
☐ Windows操作

3. LINE操作支援機能は使用できません

[LINE]は、非表示に設定されます。支援者用設定でも選択できません。


LINEの操作は[Windows操作]にてデスクトップのLINEアイコンから起動して操作してください。
ただし、下記制限があります。

- ・[Windows操作]のメニューにもLINE操作支援機能はありません。
- ・文字盤に「LINE文字盤」はありません。

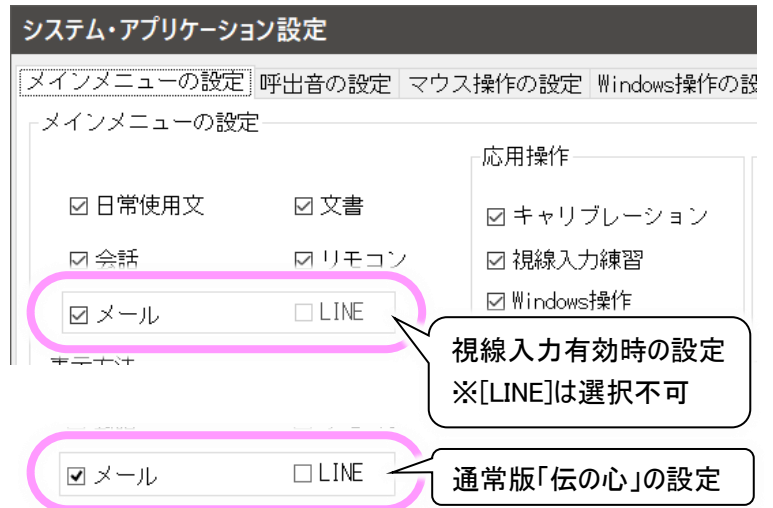

4. Windows操作は視線入力専用のメニューを表示します

視線入力オプション使用時のWindows操作のメニューは下記のようになります。

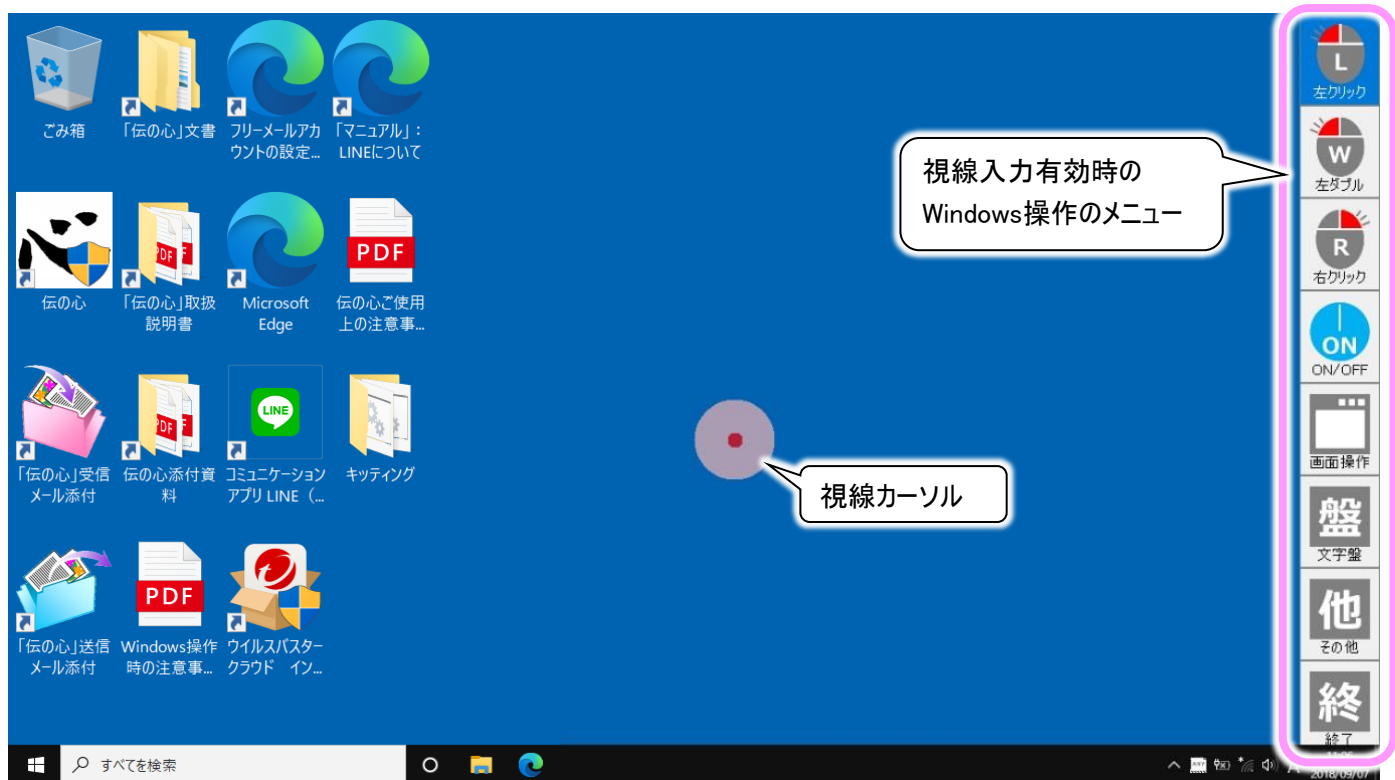

使用方法も通常版の「伝の心」とは異なりますので、詳細は視線入力オプション取扱説明書をご確認ください。

●視線入力オプション取扱説明書について

「伝の心」本体には「C:¥DENTOOL¥視線入力」フォルダに格納されています。同じものは下記Webサイトにも掲載されていますので、取扱説明書ご確認の際には、ご参照ください。

「伝の心」(でんのしん): マニュアル

https://www.hke.jp/products/dennosin/den_instruction_manual.htm#sect2

— 以上 —

次回のトピックス予告

これからも皆様のお役に立つ各種情報をお伝えして参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。
また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。
e-mail: dennosin@hke.jp

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも展開いただけますよう、お願い申し上げます。