

伝の心販売会社 御中

発行：2023年7月3日
(株)日立ケーイーシステムズ

「伝の心通信」(第83号)

毎度ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
「伝の心通信」(第83号)を発行させていただきます。

トピックス1

伝の心Ver. 06-50 についてのご紹介-シンプル会話機能(1)

このたび発売開始した伝の心の新しいバージョン、Ver.06-50の新機能・変更仕様について、前回は概要をお知らせいたしました。

今回はVer.06-50のご紹介の2回目として、シンプル会話機能について、ご紹介させていただきます。

1. シンプル会話機能の特徴


従来の会話機能を改良し、簡単に会話を行える機能を追加しました。

画面には編集域と文字盤が表示されます。文字盤には文字候補や機能ボタン等が5つだけ表示されており、従来と比較して非常にシンプルなものになっています。

文字候補や機能ボタンは自動的にスライドしていくので、画面の中心だけを見ながら文字入力が行えます。また文字盤の文字サイズも従来と比較して大きくなり、今までの文字盤が使いづらいと感じる方にも快適にご利用いただけます。


また、シンプル会話機能は、「タッチモード」「スイッチモード」「視線モード」の各々のモードで使用できます。さらに、各々のモードで特徴的な使い方も可能です。※使用方法是2項以降でご紹介します。

従来の会話機能

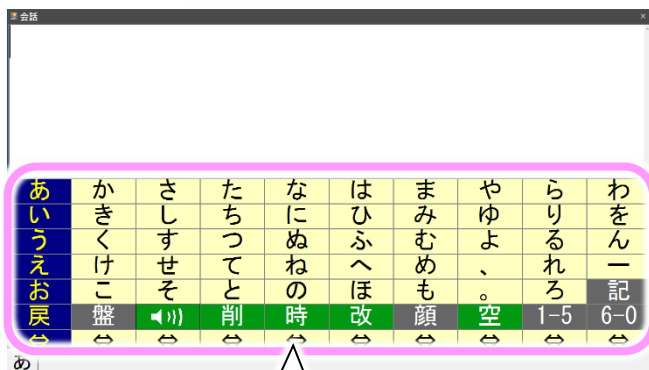

従来の文字盤

シンプル会話機能

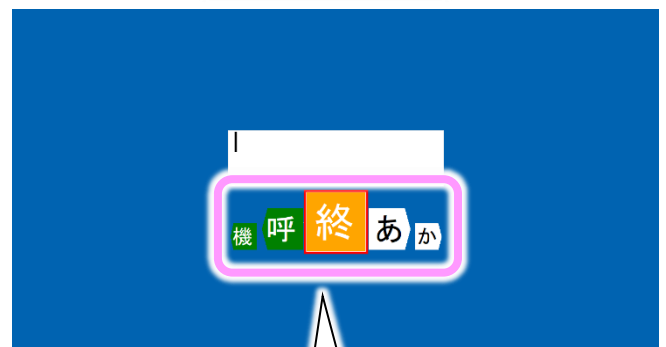

シンプル文字盤

特徴比較

	従来の会話機能	シンプル会話機能
文字盤の表示	全体表示(70個固定)	部分表示(選択可能な5個)
スクロール表示	なし(固定)	横スクロール
注視領域	全体	中心付近のみ
選択方法	70個の中から1つを選択	選択可能な5種類から1つを選択
その他		ショートカット機能(呼音など)


■補足: シンプル会話機能 切替手順

- ① 「伝の心」のメインメニューから「設定」を選択し、設定画面の「支援者用設定」を選択します。
- ② 「伝の心」の「支援者用設定」から、「システム・アプリケーション設定」を選択します。




- ③ 「システム・アプリケーション設定」画面の「メインメニューの設定」タブにおいて、「会話の設定」項目の「シンプル会話を使用する」にチェックを入れます。



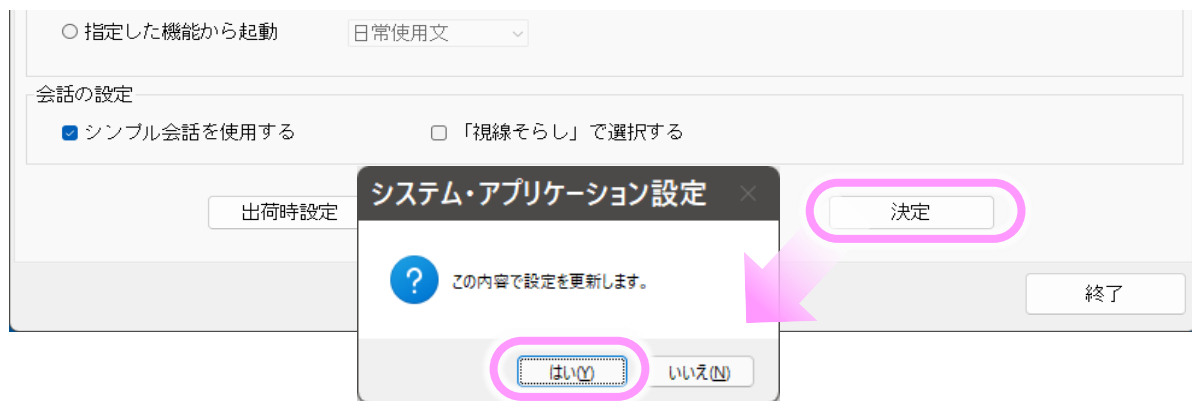

- ④ **決定** ボタンをクリックし、表示された確認メッセージで**はい**をクリックします。
- ⑤ **終了** ボタンをクリックして画面を閉じます。
- ⑥ 支援者用設定画面を閉じて「伝の心」に戻り、「会話」を選択すると、シンプル文字盤と編集域で構成されたシンプル会話画面が表示されます。

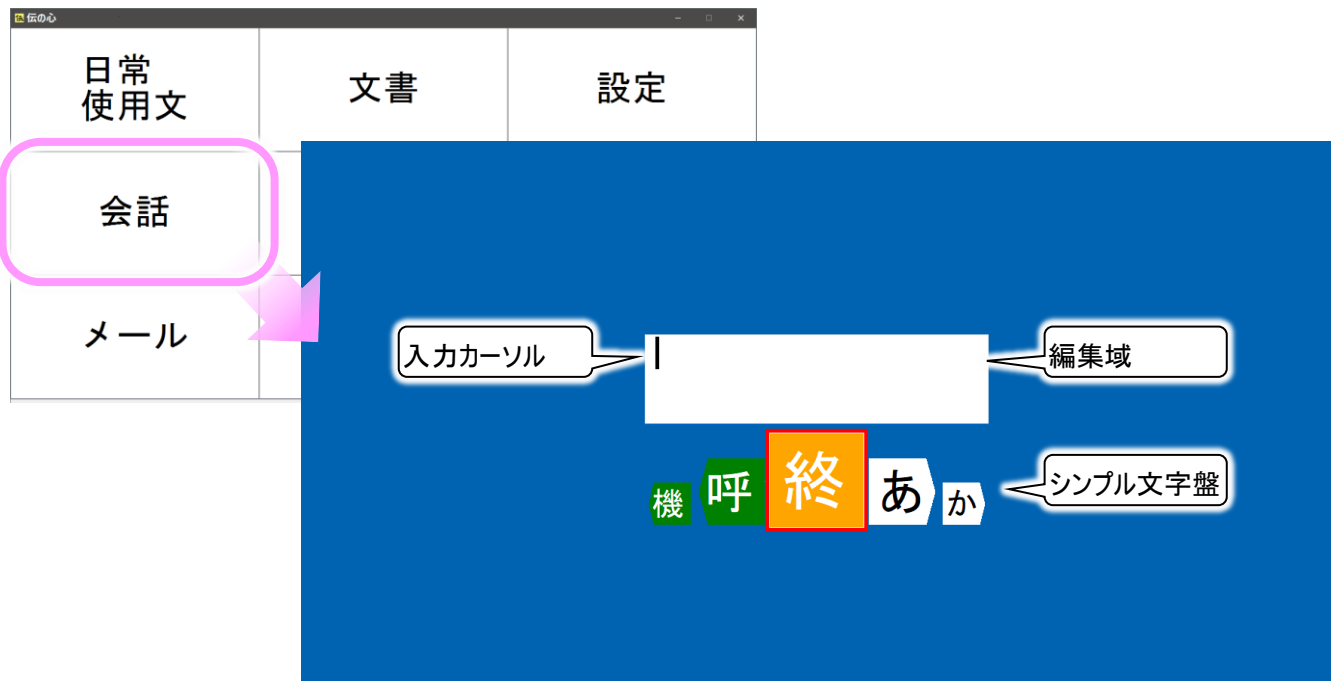


2. スイッチモードでの基本的な使用方法


まずは「スイッチモード」でのシンプル会話の使い方をご紹介します。

赤枠で囲われた選択候補に入った文字をスイッチで選択するだけの簡単操作で、文字入力が可能です。文字盤の選択候補周辺のみを見ていればよいので、視野が狭くても快適にご利用いただけます。

① シンプル文字盤は、文字盤が右から左に動きます。

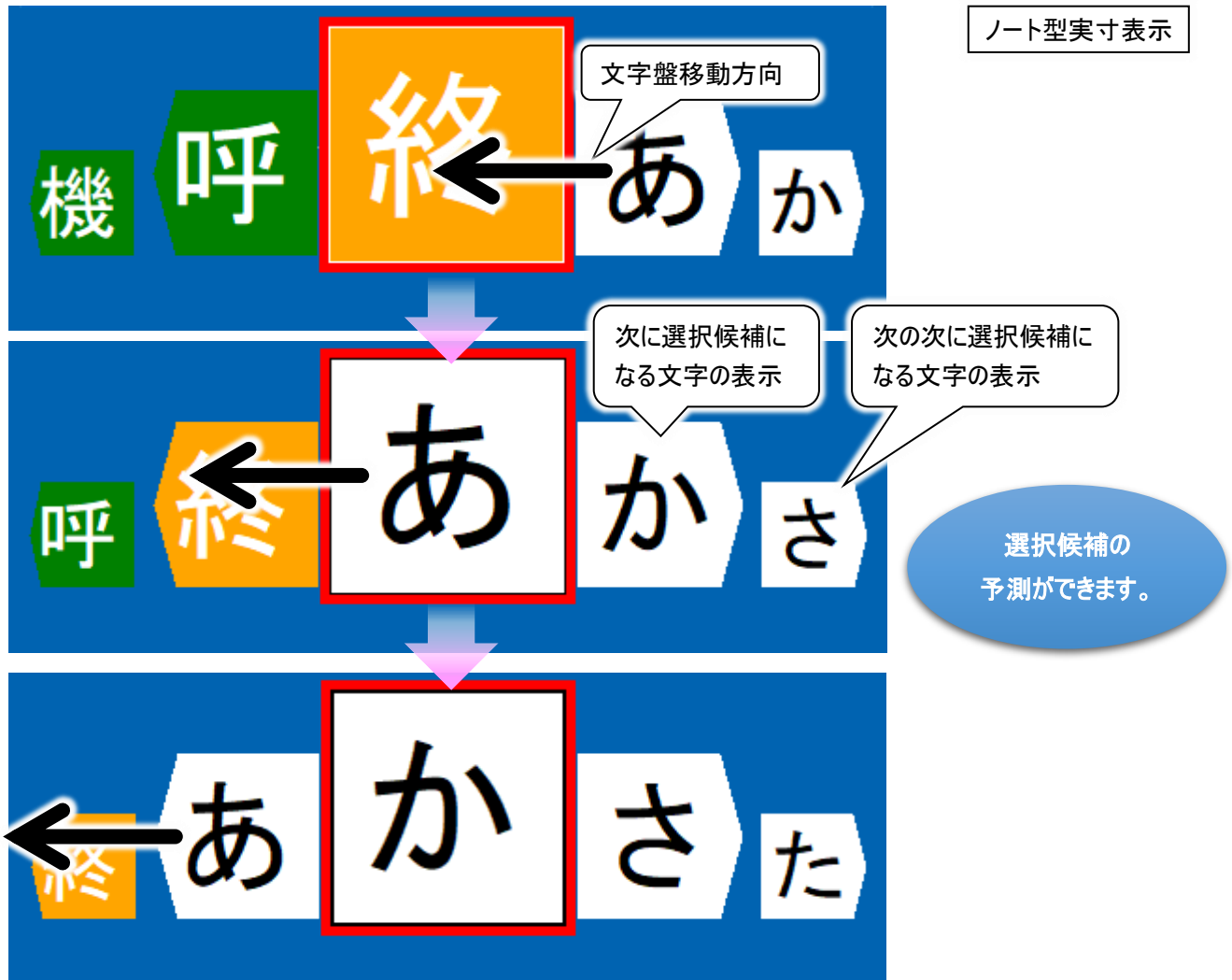

② 入力したい文字が選択候補枠に入ったら、スイッチ入力します。

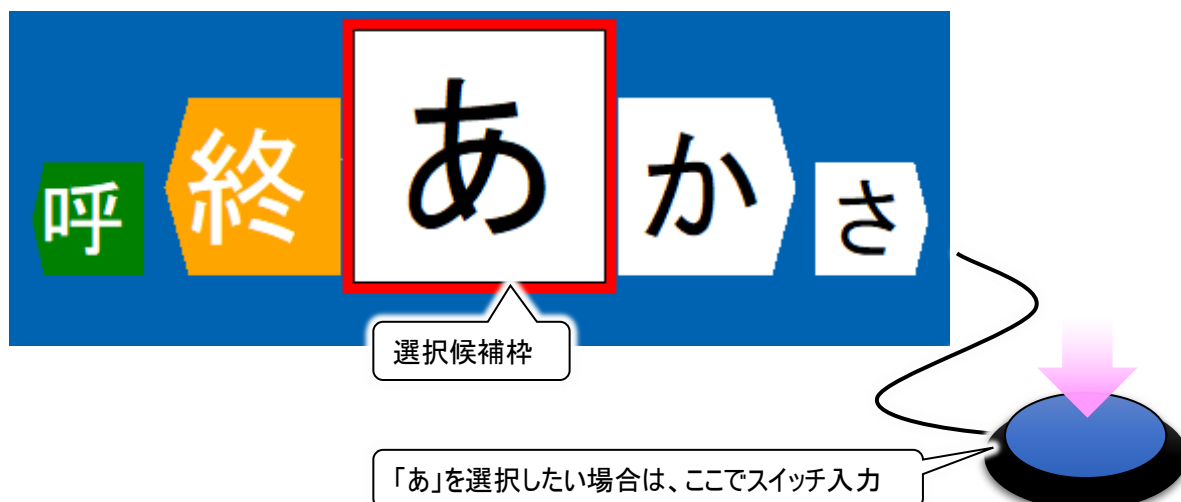


③ 下記は「あ」を入力する一例です。

初めに子音を選びます



次に母音を選びます

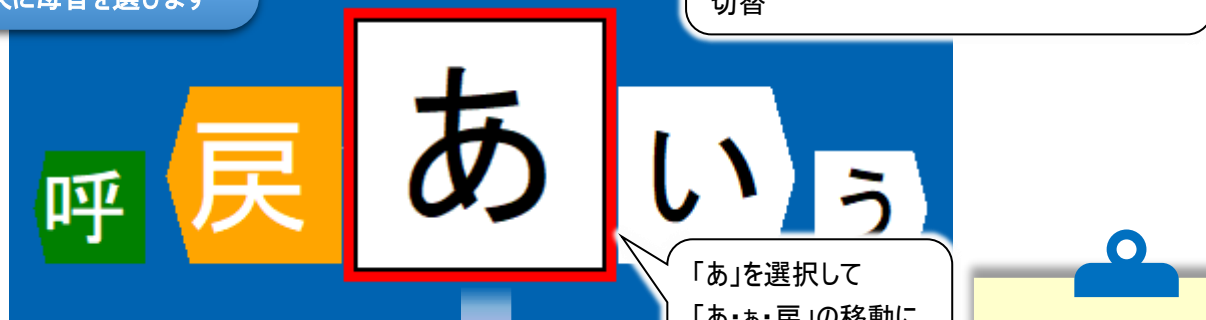

拗音や濁音等がある場合は、それらを選びます



小文字について

小文字には「 」下線を付けて分かりやすく表示しています。

入力される文字には、下線は表示されません。

反転表示について

実際に入力される文字候補は反転表示（青背景・黄色文字）で表示されます。それら以外の候補は文字入力されません。

スイッチ入力の回数

1文字入力するためにスイッチ入力する回数は、従来の文字盤と同じです。


④ 文字が入力されたら、最初の文字盤メニュー「あ・か・さ・た・な・は・ま・や・ら・わ・削・機・呼・終」の移動に戻ります。

3. スイッチモードならではの使用方法(2点スイッチ)

次にスイッチモードのみ使用可能な便利な機能との組み合わせをご紹介します。

スイッチモードでは2点スイッチの設定を行うと、シンプル文字盤でも「決定スイッチ」と「送りスイッチ」の機能が使用できます。


シンプル文字盤は、「送りスイッチ」で右から左に順次動かしていき、「決定スイッチ」で選択候補枠の選択を行い、操作します。

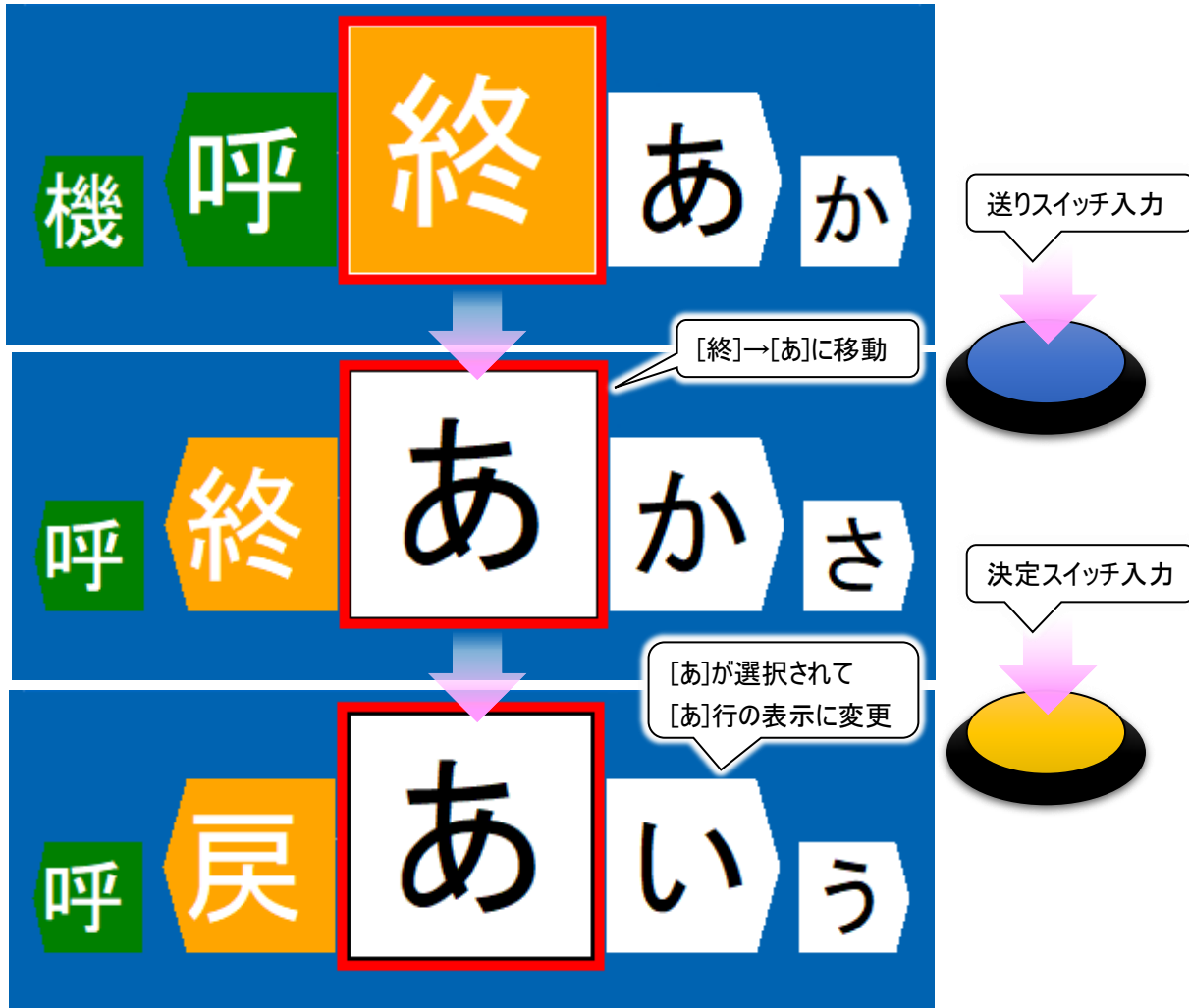


2点スイッチの設定をご利用になると、ご自身のタイミングで文字盤を動かし、ご自身のタイミングで選択していくことができます。

■補足:2点スイッチ切替手順

- ① 「伝の心」のメインメニューから「設定」を選択し、設定画面の「支援者用設定」を選択します。
- ② 「伝の心」の「支援者用設定」から、「システム・アプリケーション設定」を選択します。

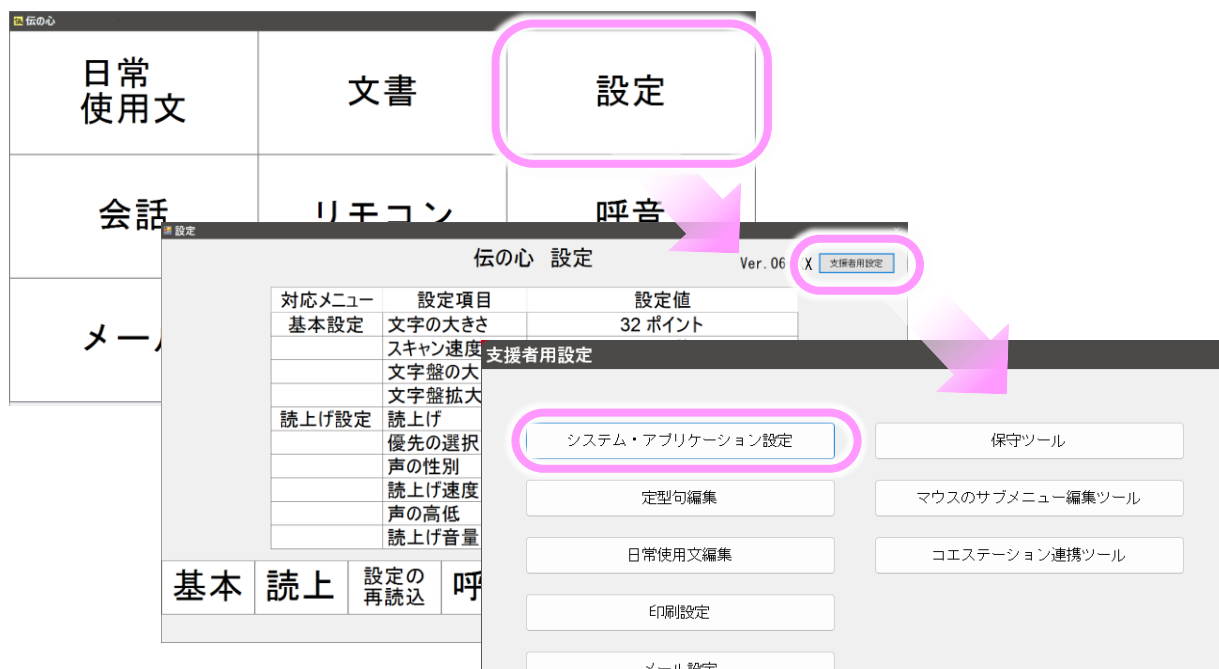

- ③ 「システム・アプリケーション設定」画面の「スイッチの設定」タブにおいて、スイッチ入力点数を[2]に設定します。
- ④ 決定スイッチと送りスイッチを接続する番号を設定します。

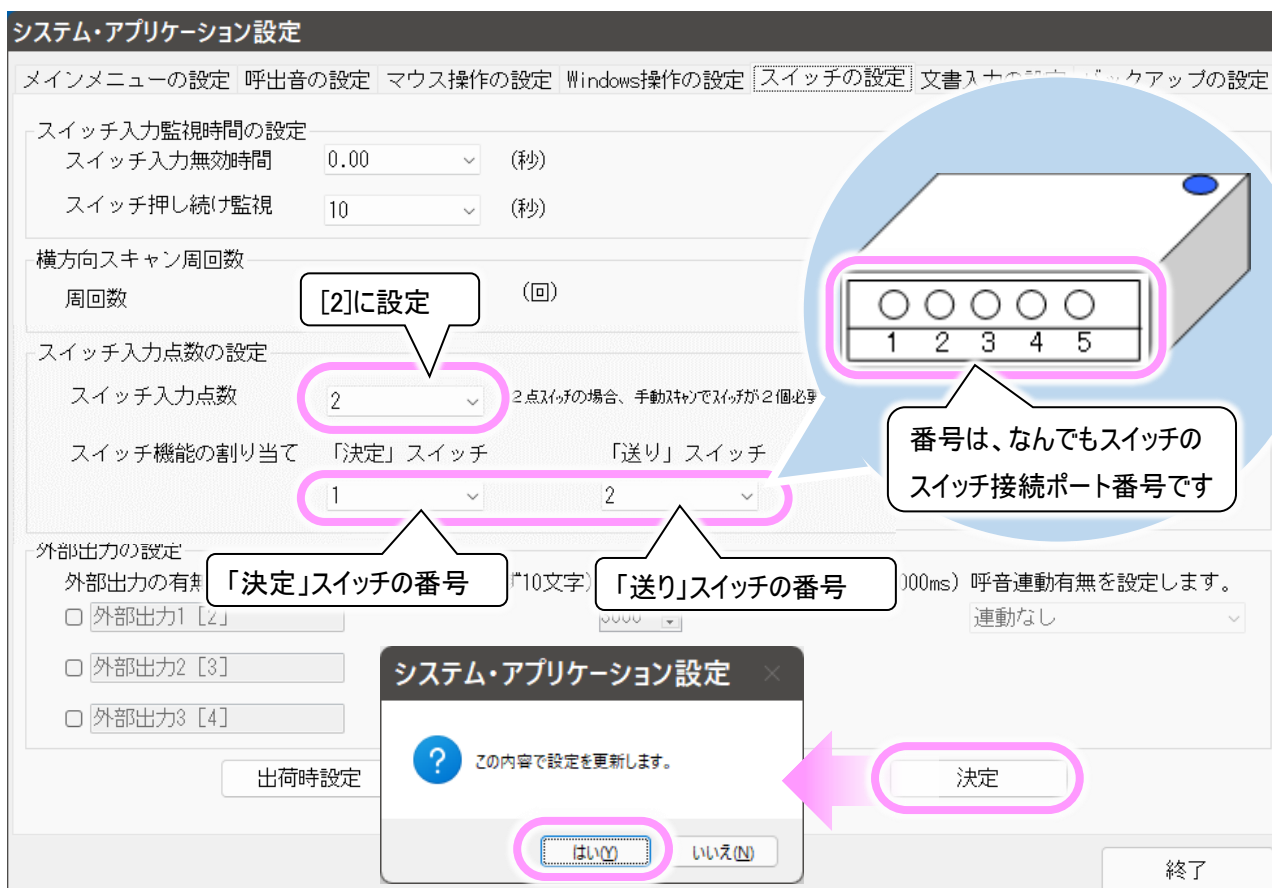


- ⑤ 決定ボタンをクリックし、表示された確認メッセージではいをクリックします。その後終了ボタンをクリックして画面を閉じます。

4. タッチモードでの基本的な使用方法


次は「タッチモード」でのシンプル会話の使い方をご紹介します。

タッチモードでは、選択候補枠に入った文字をマウスでクリックするだけの簡単操作で、文字入力が可能です。

① (2)マウスポインターは、選択候補枠の中に移動しておきます。

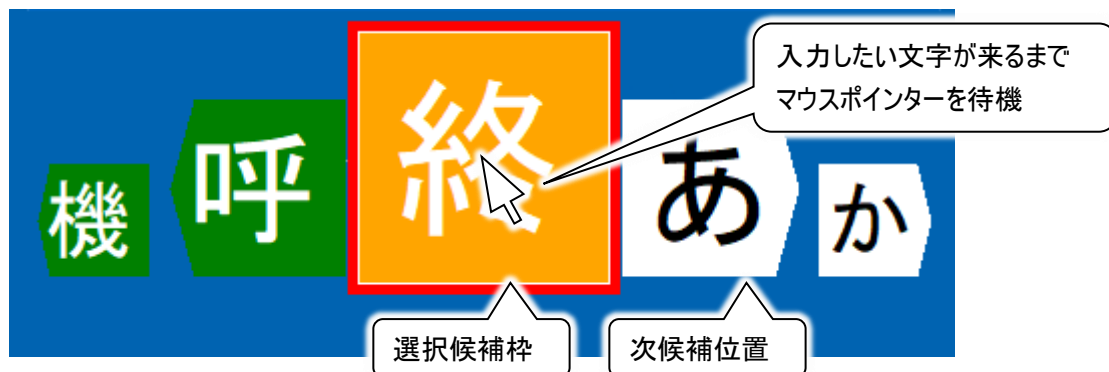

② 入力したい文字が選択候補枠に入ったら、マウスクリックします。

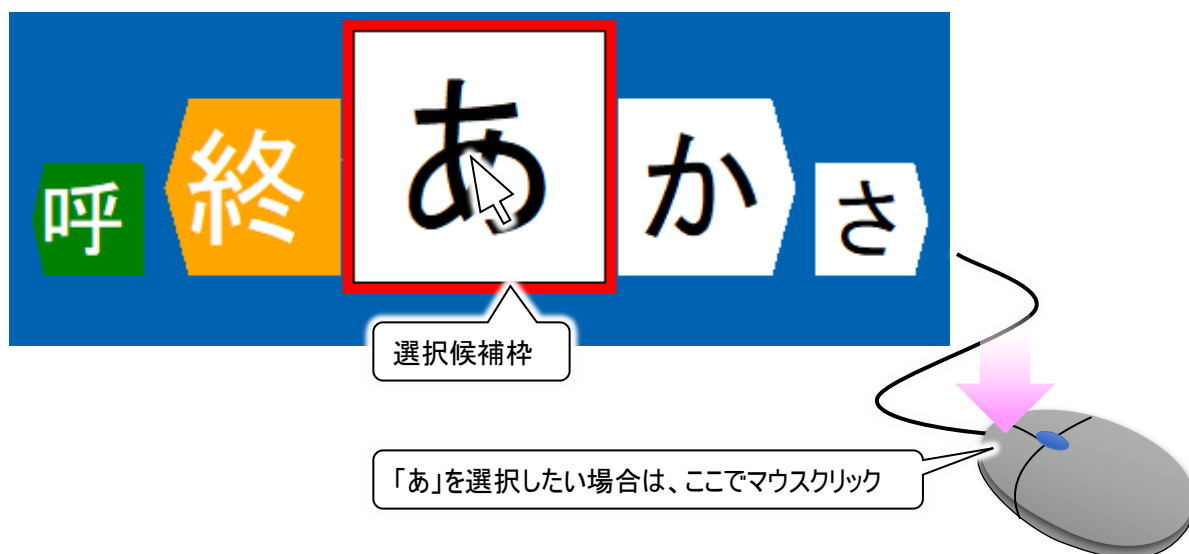


※タッチモードへの切り替えについては、前号(第 82 号)にて記載しておりますので、ご参照ください。

4. タッチモードならではの使用方法(スキャン方向の反転)

次に「タッチモード」で使用可能な、便利な機能をご紹介します。

シンプル文字盤は、文字盤が右から左に動きますが、前候補または前々候補をクリックすると、文字盤の移動が左から右に変更されます。

※元々左から右に動いている場合は、変更されません。

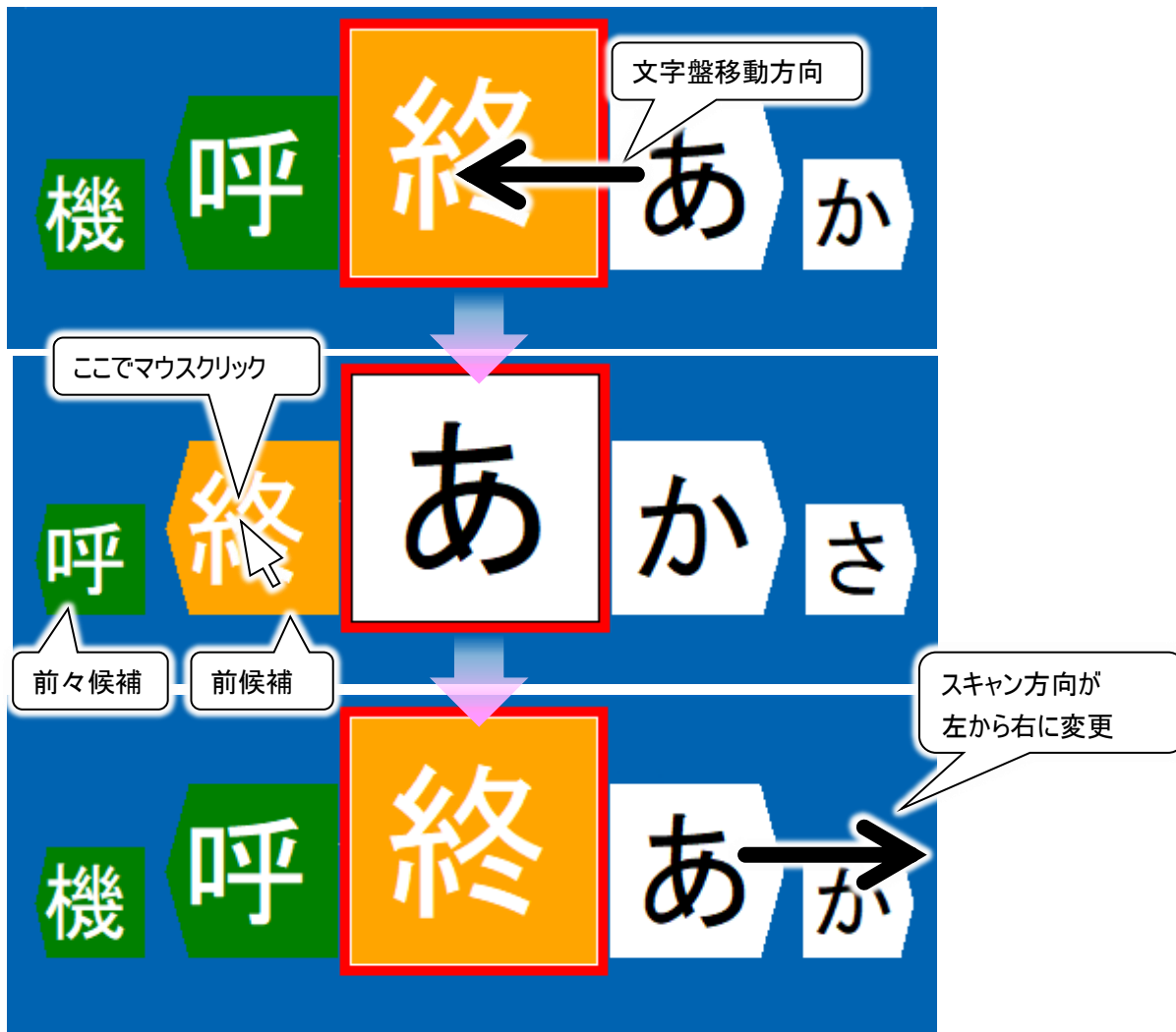

逆に、文字盤が左から右に動いている時に、次候補または次々候補をクリックすると、文字盤の移動が右から左に変更されます。

※元々右から左に動いている場合は、変更されません。

補足事項

スキャン方向の反転は、「スイッチモード」ではできません。

視線モードでの
使い方は
次回の特集号で
お届けします！

「伝の心」のブラウザ機能にて、2023年4月頃のMicrosoft Edgeの更新に伴い、2回に1回の割合で**ブラウザの画面(Microsoft Edgeの画面)**が表示されない現象が発生しております。



※弊社で確認したMicrosoft Edgeのバージョンは「**11.4.0.1823.37**」となります。

対象となる「伝の心」のバージョンは**06-30以降**のもので、詳細は下表の通りとなります。

伝の心モデル	システム装置型名	伝の心セット型式	伝の心バージョン(出荷時)
ノート型	FMVA6401SP FMVA8404KP	PC-DEN3N-010SP/S	06-30
		PC-DEN3N-011SP/S	06-30、06-31、06-40
		PC-DEN4N-011SP/S	06-30、06-31、06-40
パネル型	FARQ22004	PC-DEN3P-007SP/S	06-30、06-31
		PC-DEN4P-007SP/S	06-30、06-31
	FARQ28007	PC-DEN3P-008SP/S	06-31、06-40
		PC-DEN4P-008SP/S	06-31、06-40


本現象は、Microsoft Edgeの「検索バー」を非表示にすることで解消いたしますので、対象のお客様には、次頁の手順にて「検索バー」を非表示にして頂きますよう、お願い申し上げます。

■Microsoft Edge の「検索バー」を非表示にする方法

- ① デスクトップに表示されている「検索バー」の右端「…」ボタンをクリックします。
※「ブラウザ操作」メニューの「マウス」で表示されるマウス操作盤にて操作可能です。
- ② 表示されたサブメニューから、「検索バーを閉じる」を選択します。



- ③ 「ブラウザ操作」メニューの「終了」を選択して、メインメニューに戻ります。

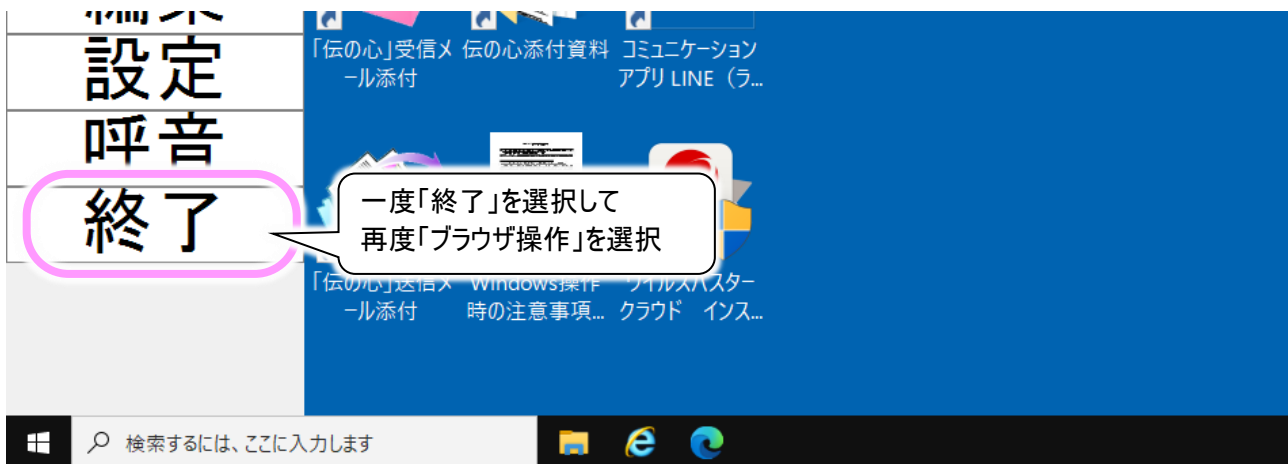

その後再度「ブラウザ操作」を選択すると、ブラウザの画面(Microsoft Edgeの画面)が正常に表示されるようになります。

補足事項

Microsoft Edgeの更新直後は、以下のような画面が表示される場合があります。
この画面上で「検索バーをオフにする」を選択すると、前述の手順と同様の結果が得られます。



— 以上 —

次回のトピックス予告

次回は7月26日発行予定です(臨時号となります)

今回は、シンプル会話機能についての特集号-第2弾-を予定しております。
「視線モード」での使い方をご紹介させていただきたいと思います。「タッチモード」や「スイッチモード」にはない、特徴的な使用方法をご紹介します。

これからも皆様のお役に立つ各種情報をお伝えして参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。
また、皆様より、ご意見、取り上げて欲しいトピックス等も募集しておりますので、下記までお送りください。
e-mail: dennoshin@hke.jp

※本書は2023年6月時点の情報に基づいております。また記載の内容は、予告なく変更になる場合があります。

※本お知らせを、「伝の心」の各ご担当者様にも周知いただけますよう、お願い申し上げます。