

なんでもスイッチ USB プラスユーティリティのインストール

注意:「伝の心」のバージョン 06-00 以降のバージョンに対応しています。


それ以前のバージョン 05-XX や 04-XX には対応しておりませんのでご注意ください。

(1) 伝の心が立ち上がったら、終了させます。


Ctrl キーを押しながら、伝の心メインメニュー画面の右上の **×** ボタンをクリックします。



(2) 停止確認画面で、**はい** ボタンを選択して伝の心を終了させます。

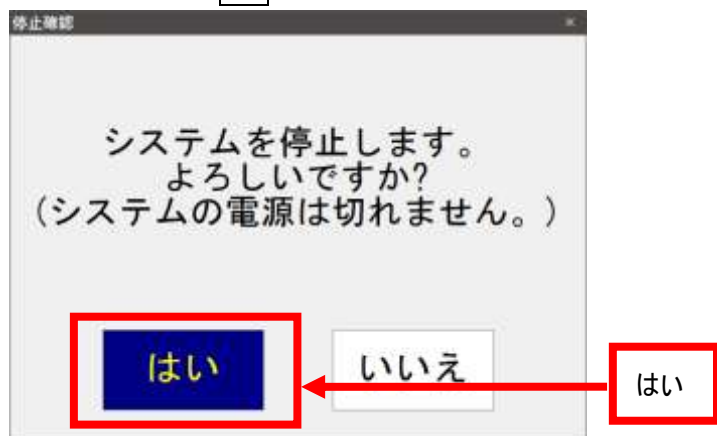


(3) なんでもスイッチ USB を「伝の心」から外します。

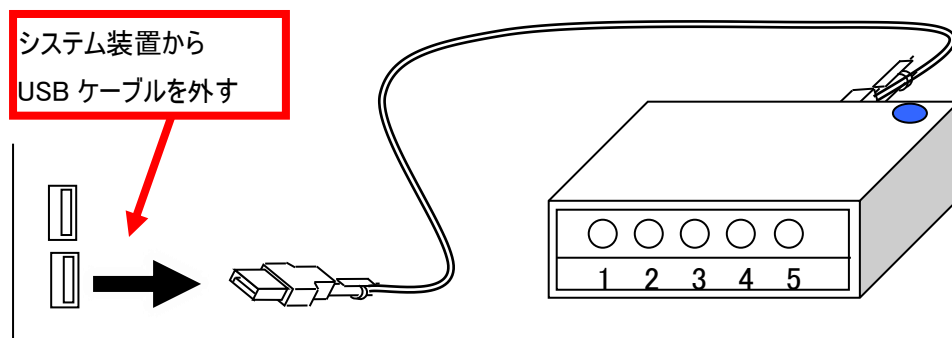

(4) なんでもスイッチ USB ユーティリティを終了させます。


タスクトレイのなんでもスイッチ USB ユーティリティをマウスで右クリックして、「終了」を選択してください。

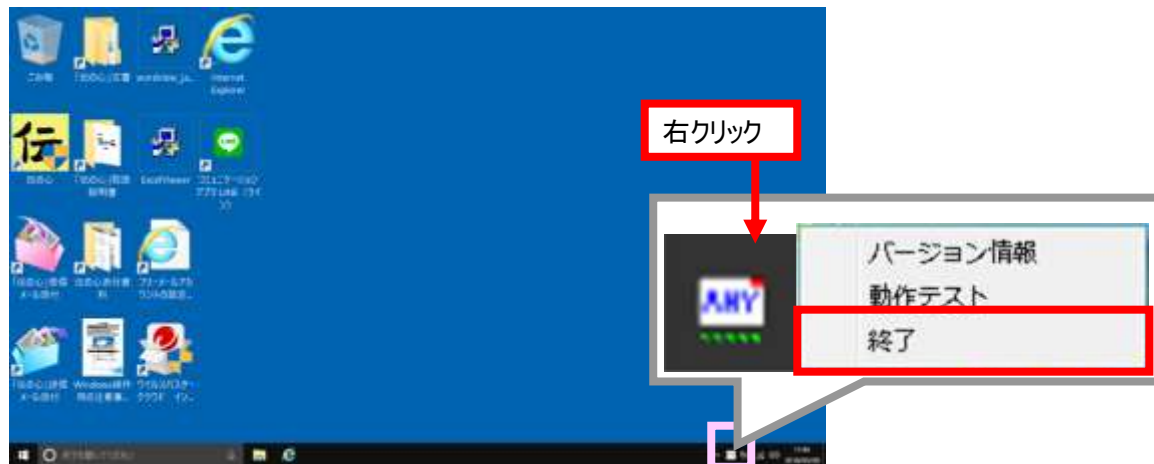

注意: セキュリティソフトをインストールしている場合は、一時的に停止させてください。インストールに時間が掛かったり、インストールできない場合があります。


(5) DVD ドライブに「なんでもスイッチ USB プラスユーティリティ」ディスクを挿入し、[スタート]→[エクスプローラー]を選択します。

※「なんでもスイッチ USB プラスユーティリティ」をダウンロードした場合は、ディスクの挿入は必要ありません。

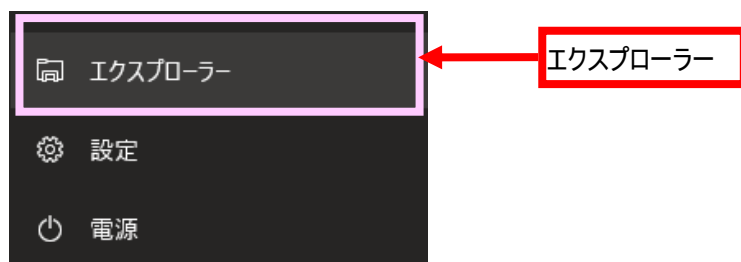


(6) 「なんでもスイッチ USB プラスユーティリティ」を右クリックしてメニューを開き、メニューから[開く]を選択します。

※「なんでもスイッチ USB プラスユーティリティ」をダウンロードした場合は、ダウンロードしたフォルダに対して右クリックしてメニューを開き、メニューから[開く]を選択します。

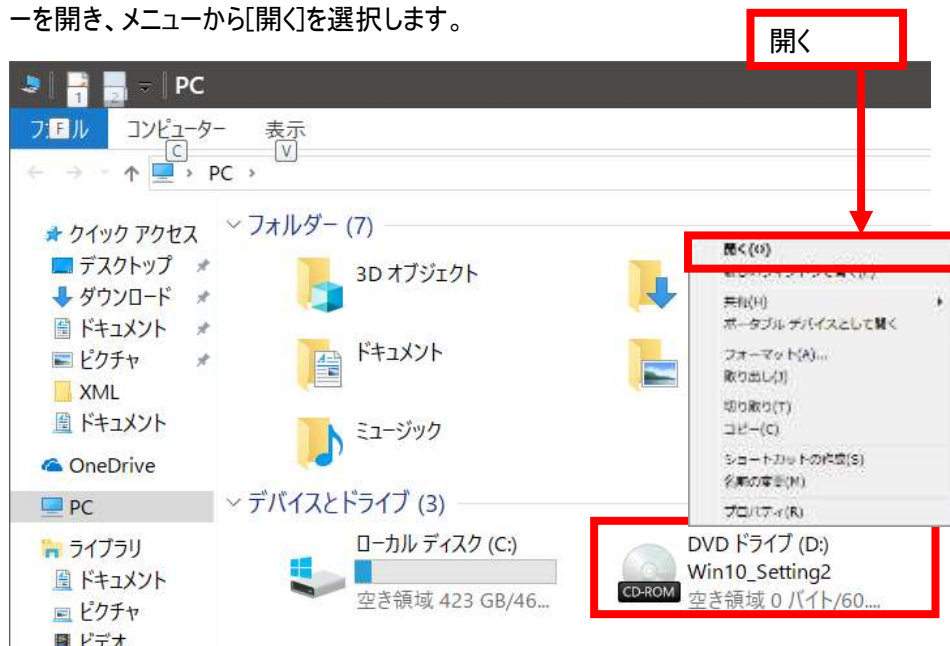


(7) 「なんでもスイッチ USB プラスユーティリティ」が開くので、「ttAnySwPlusUtil400」をダブルクリックで実行します。

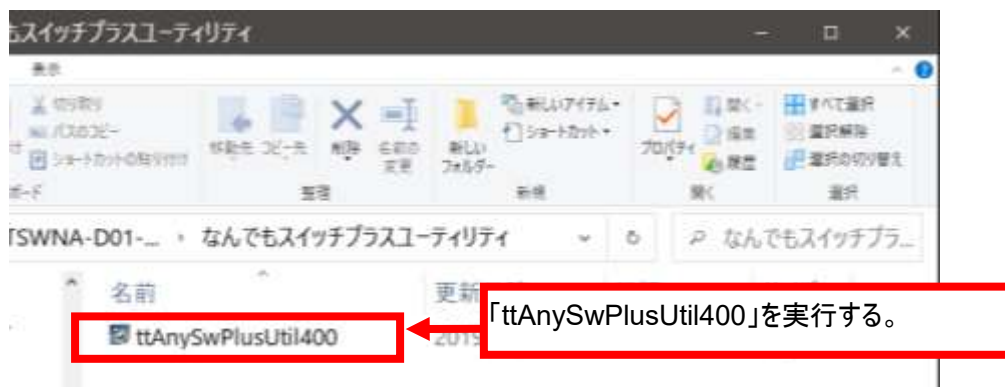


(8) 下記画面が表示されるので、「はい」ボタンをクリックします。




(9) 次に下記画面が表示されるので、「はい」ボタンをクリックします。

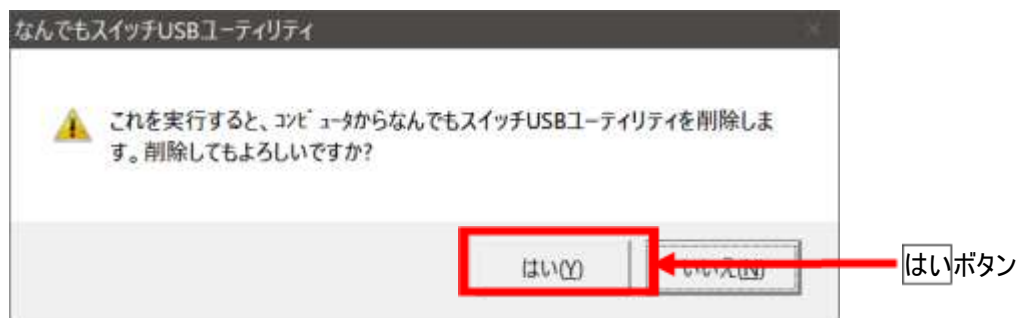


(10) なんでもスイッチ USB ユーティリティがアンインストールされ、下記画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。

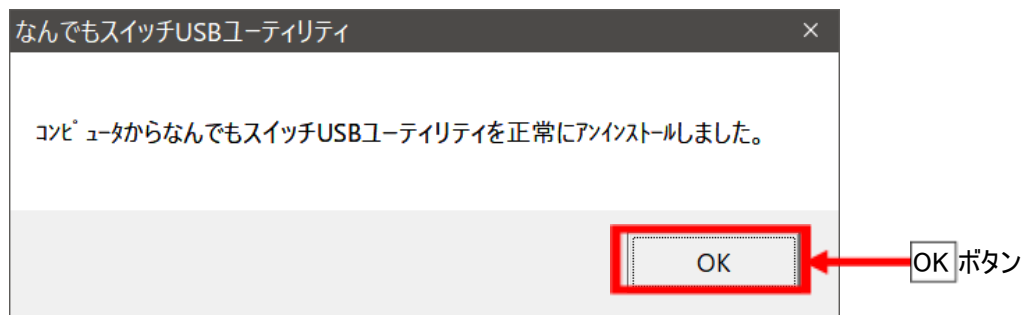


(11)なんでもスイッチ USB プラス接続ユーティリティ画面が表示されるので、**次へ**ボタンをクリックします。

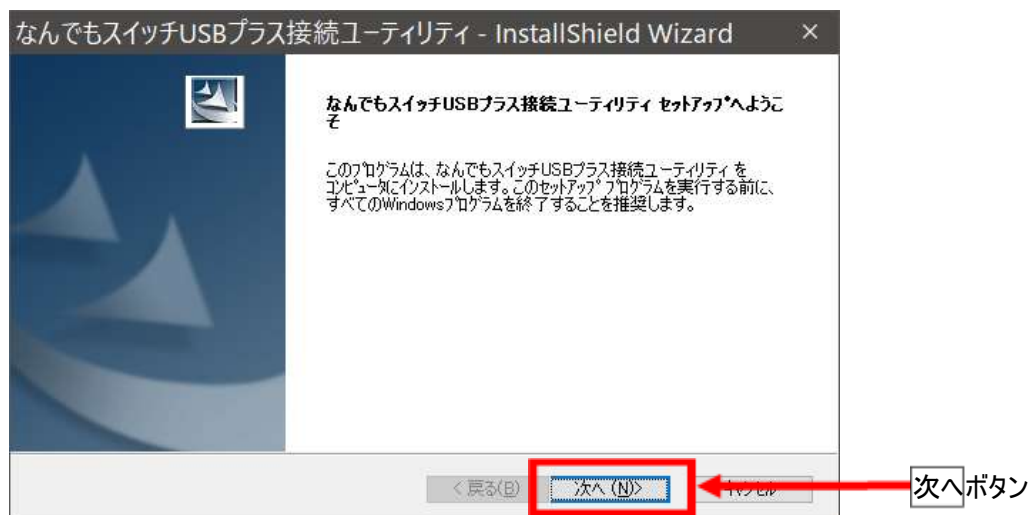


(12) 下記、使用条件画面に遷移するので、**はい**ボタンをクリックします。

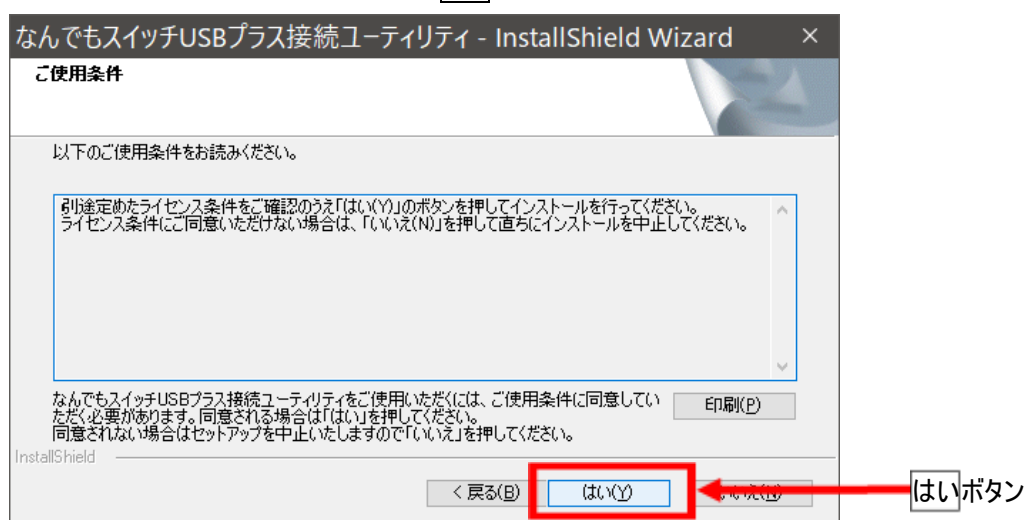


(13) 下記、インストール先の選択件画面に遷移するので、**次へ**ボタンをクリックします。

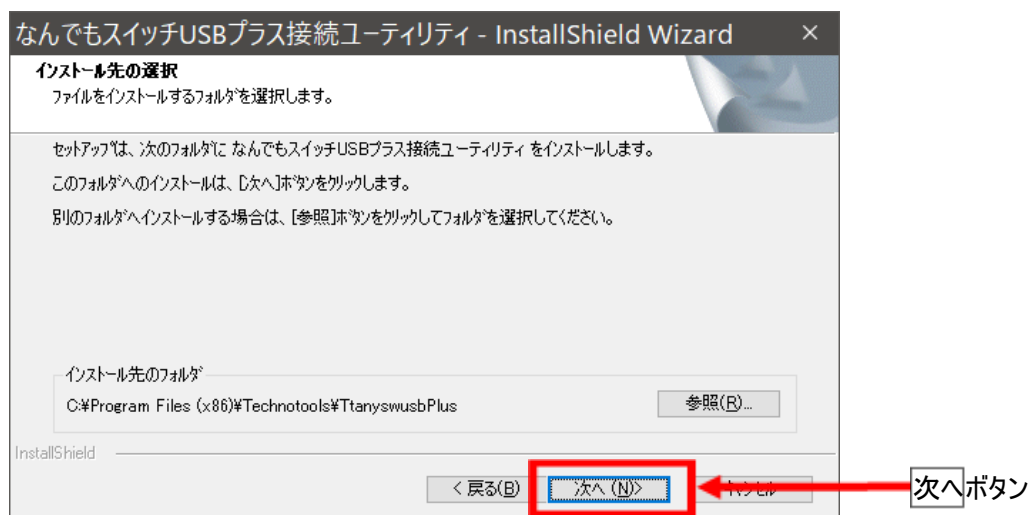


(14) 下記画面に遷移し、インストールが始まります。

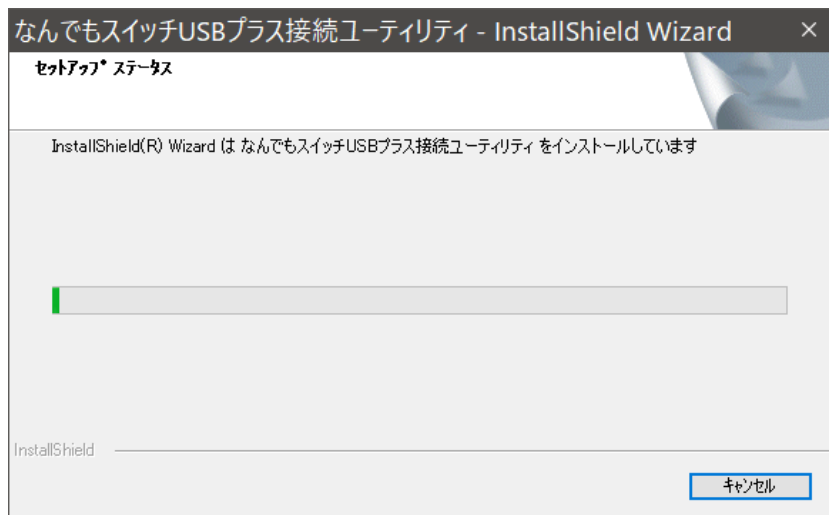


(15) インストールが完了すると、下記画面に遷移するので、**完了**ボタンをクリックして画面を閉じます。

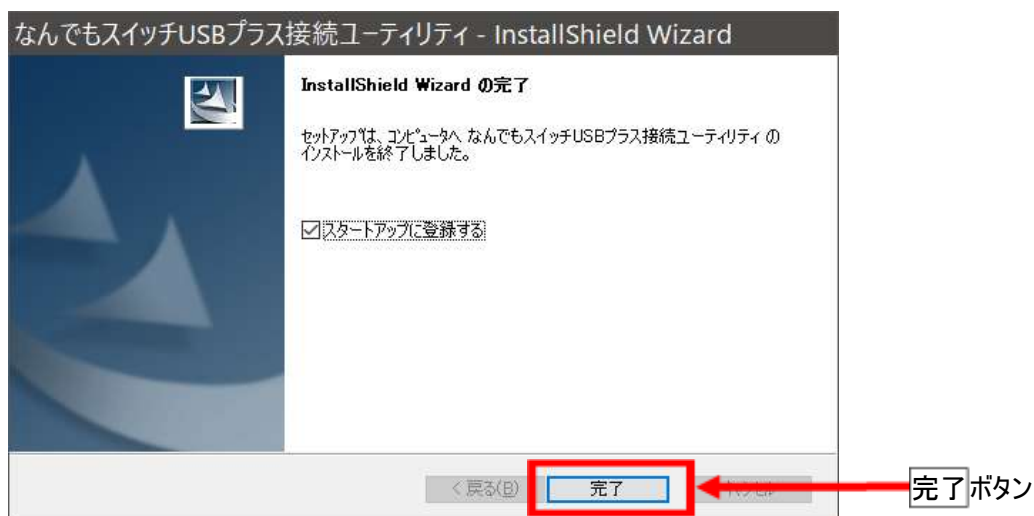


(16) タスクバーを右クリックして、表示されたメニューより「タスクバーの設定」を選択します。

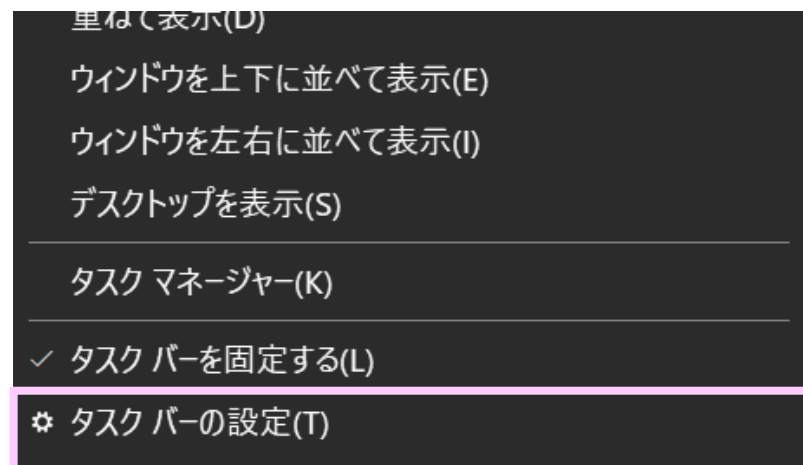

(17) 設定画面が表示されるので、右メニューの「タスクバーに表示するアイコンを選択します」をクリックします。

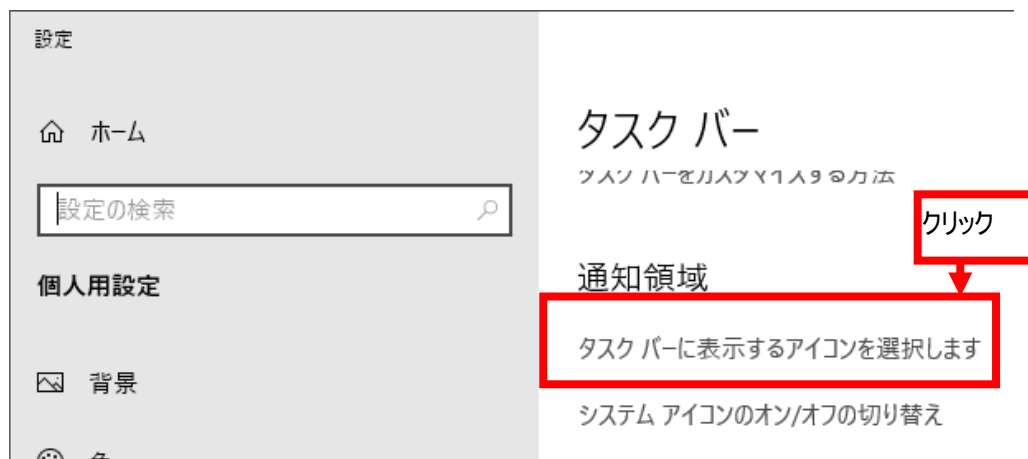


(18) タスクバーに表示するアイコンを選択します画面が表示されるので、「なんでもスイッチ USB プラス スイッチユーティリティ」を探し、スライドスイッチを「オン」にします。

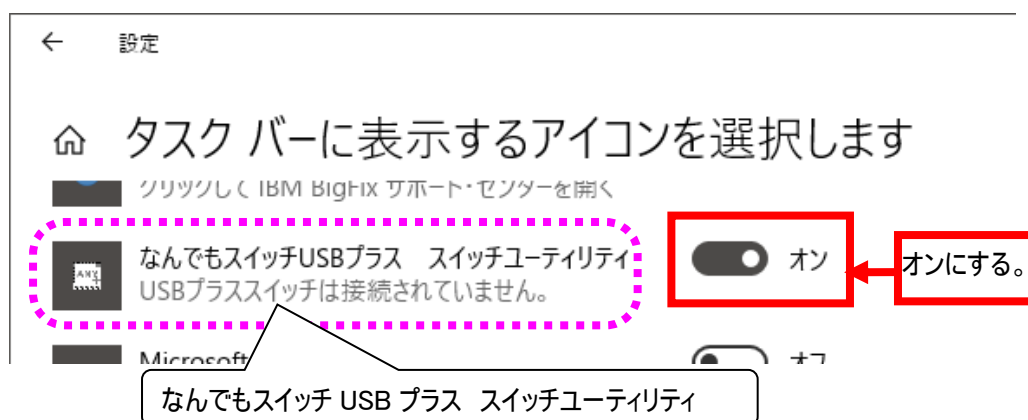


(19) 設定場面を右上「×」ボタンのクリックで閉じます。

(20) [スタート]→[電源]→[シャットダウン]を選択して、システム装置の電源を切ります。

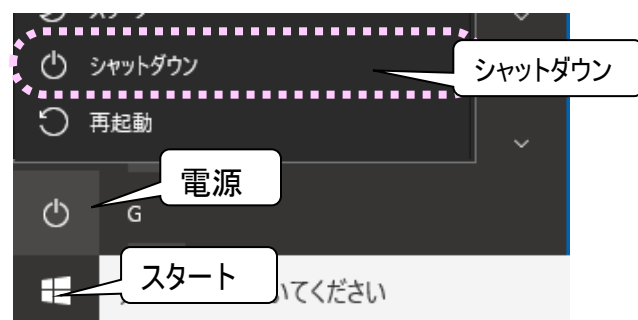

(21) なんでもスイッチ USB プラスをシステム装置に取り付けます。

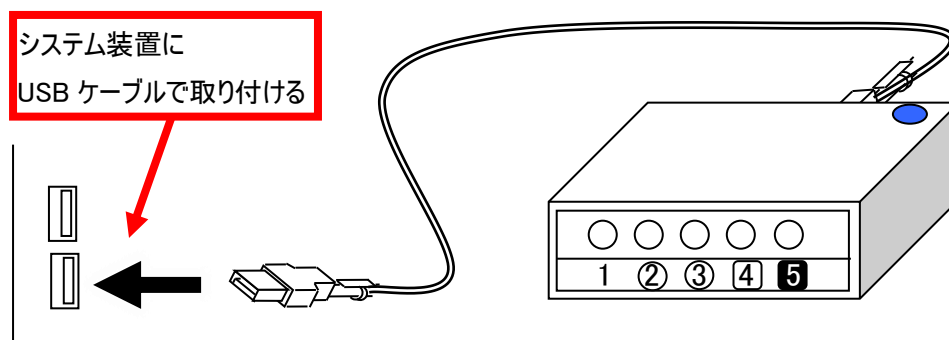

(22) システム装置の電源を入れて、「伝の心」が起動するのを確認してください。