

「伝の心」バージョンアップパッチ操作手順書（for Ver.06-13）

（株）日立ケーイーシステムズ

1.【概要】


本操作手順書は、「伝の心」バージョンアップパッチにより、現在ご使用中の「伝の心」を Ver.06-13 へバージョンアップするための手順を示したものです。

2.【バージョンアップが可能な「伝の心」】

現在ご使用中の「伝の心」がバージョンアップ可能か、以下を確認してください。

＜バージョンの確認方法＞

伝の心の電源を入れてメインメニューよりバージョンをご確認ください。

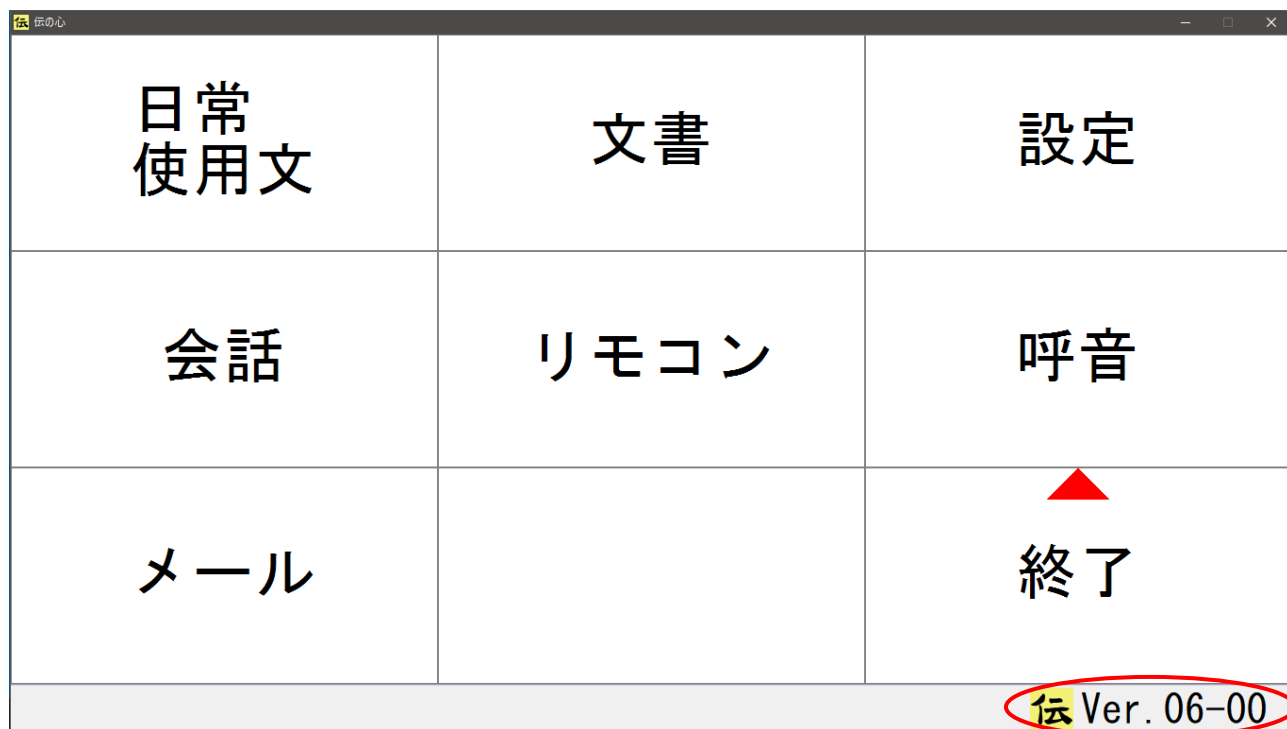

メインメニューよりバージョン
をご確認ください

表 1 に記載のないバージョンはバージョンアップを行えません。

表 1. バージョンアップ可能な「伝の心」のバージョン

No.	旧「伝の心」バージョン	新「伝の心」バージョン	「伝の心」区分	備考
1	06-10 ~ 06-12	06-13	ノート型	OS: Windows 10
2	06-10 ~ 06-12		パネル型	OS: Windows 10

3. 【バージョンアップに必要な機材】

①バージョンアップを行う「伝の心」(Ver.06-10～Ver.06-12)

②サポートディスク


③USB メモリー(パネル型のみ)

4. 【バージョンアップ用USBメモリー準備】

※以下のバージョンアップパッチのコピーはパネル型のみ実施してください

サポートディスクより「バージョンアップパッチ」を USB メモリーへコピーします。

※パネル型はDVDドライブがございませんので、サポートディスクに格納されている「「伝の心」バージョンアップパッチ (for Ver.06-13)」をフォルダごとUSBメモリーにコピーします。

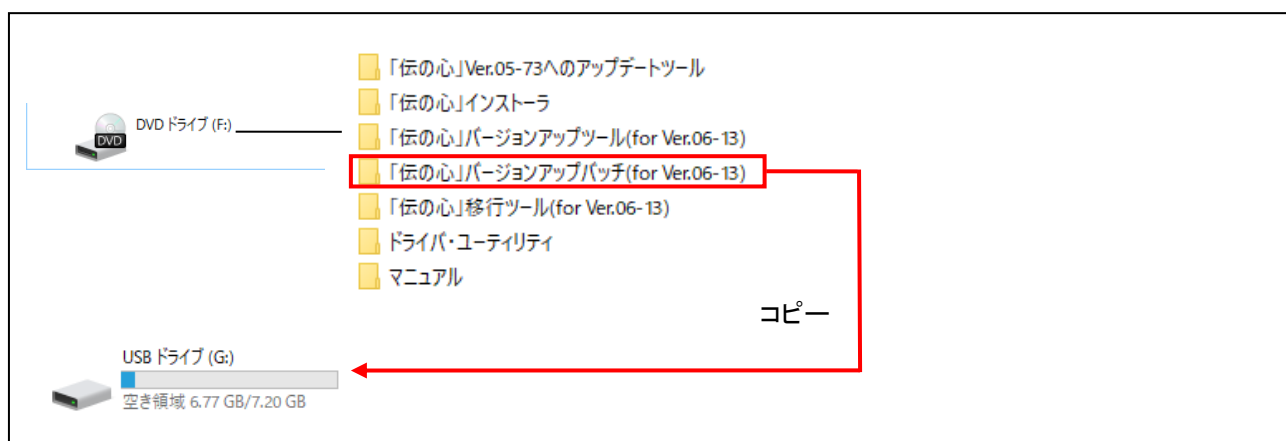

※DVD ドライブのドライブレター(図の(F:))及び USB ドライブのドライブレター(図の(G:))は環境によって異なります。

5. 【Ver.06-13バージョンアップパッチ 操作手順】


※パネル型はDVDドライブをUSBドライブに読み替えて実施してください。

ノート型はサポートディスクより直接実行できます。


(1) 現在ご使用中の「伝の心」を起動します。

「伝の心」起動後、以下の操作で伝の心を停止させます。


Ctrlキーを押しながら画面右上の×をクリックし、「伝の心」を停止させデスクトップ画面を表示します。

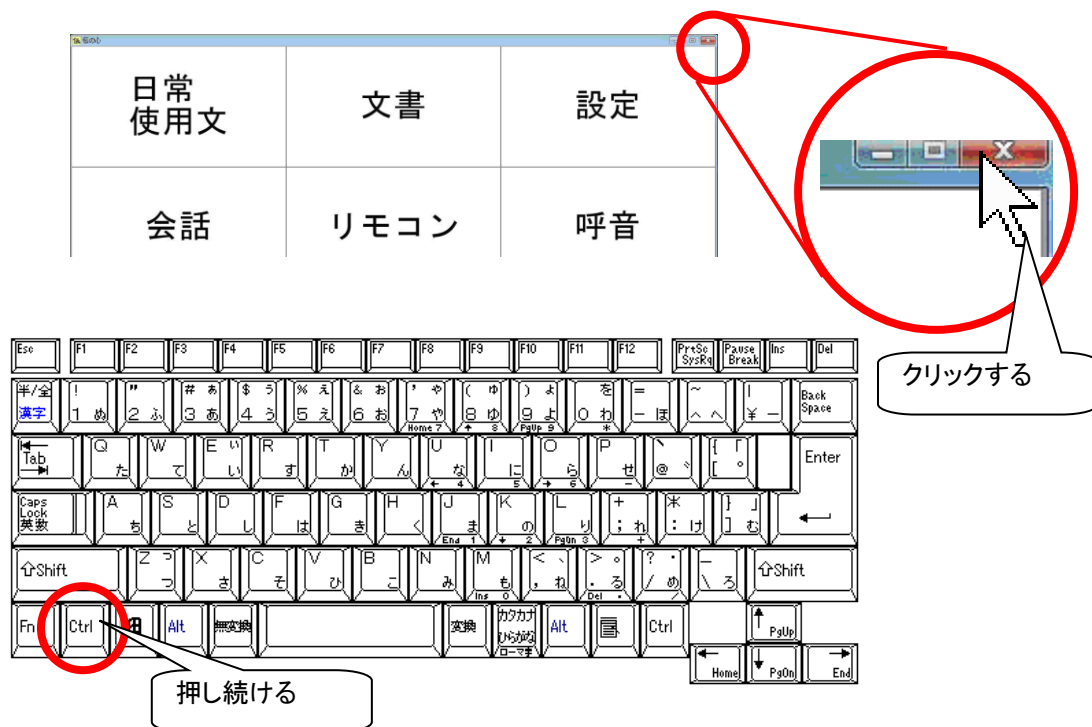


(2) DVDドライブにサポートディスクを挿入し、[スタート]→[エクスプローラー]を選択します。

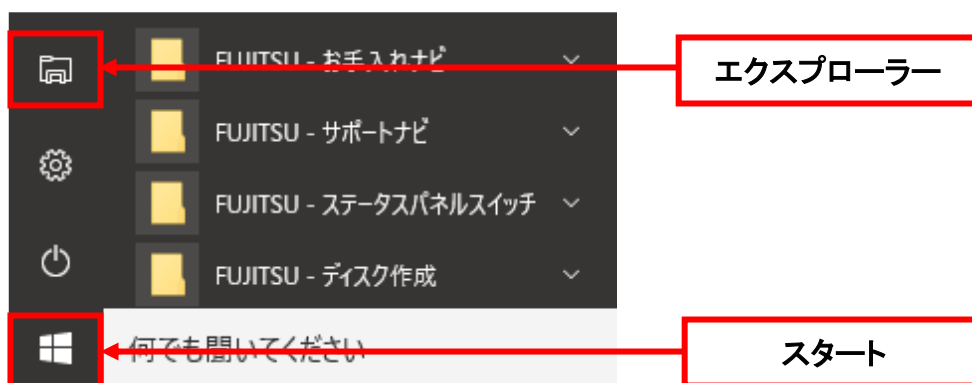


(3) DVDドライブを右クリックしてメニューを開き、メニューから[開く]を選択します。

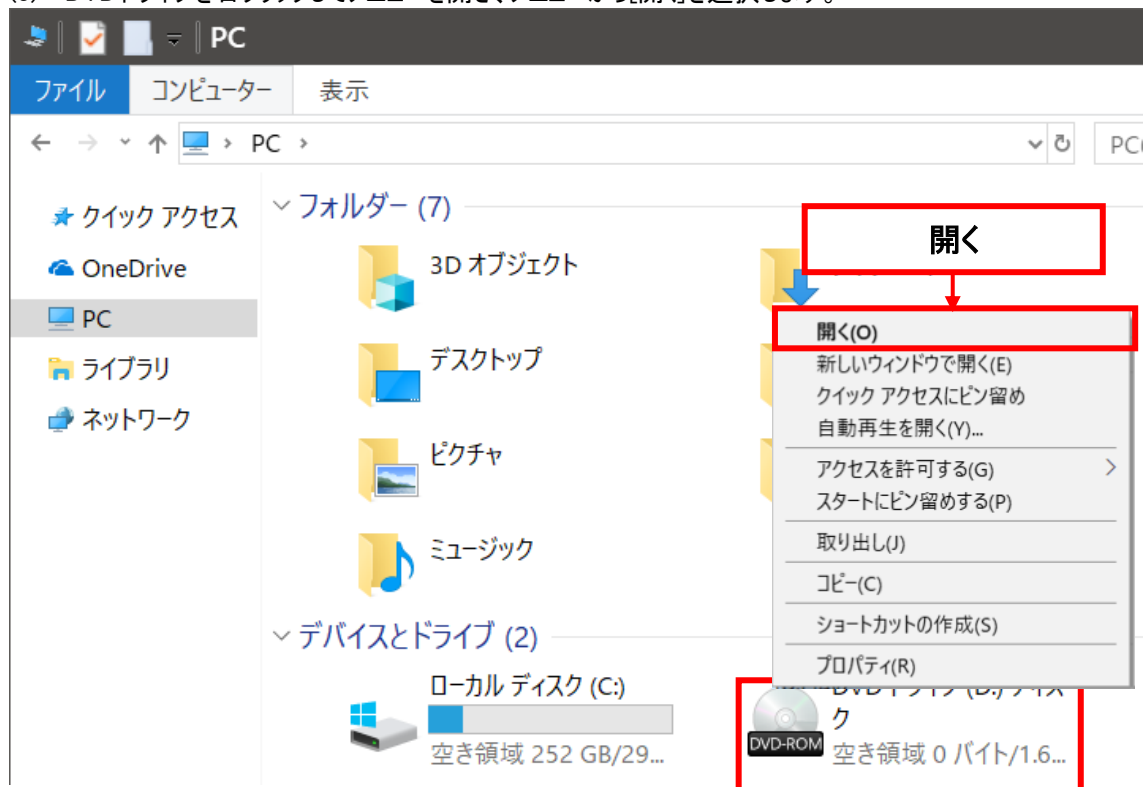


(4) 「伝の心」バージョンアップパッチ(for Ver.06-13)をダブルクリックして開きます。

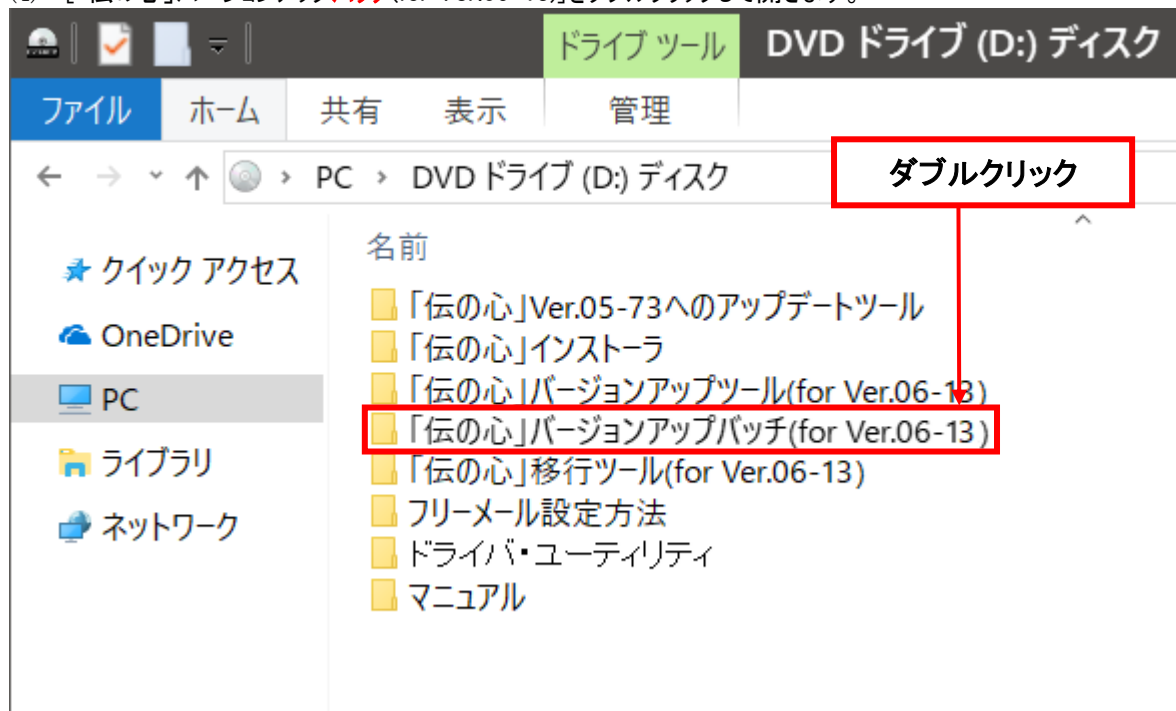


- (5) 「伝の心」バージョンアップパッチ(for 06-13)」が開くので、「update.bat」を右クリックしてメニューを開き、メニューから「管理者として実行」を選択します。

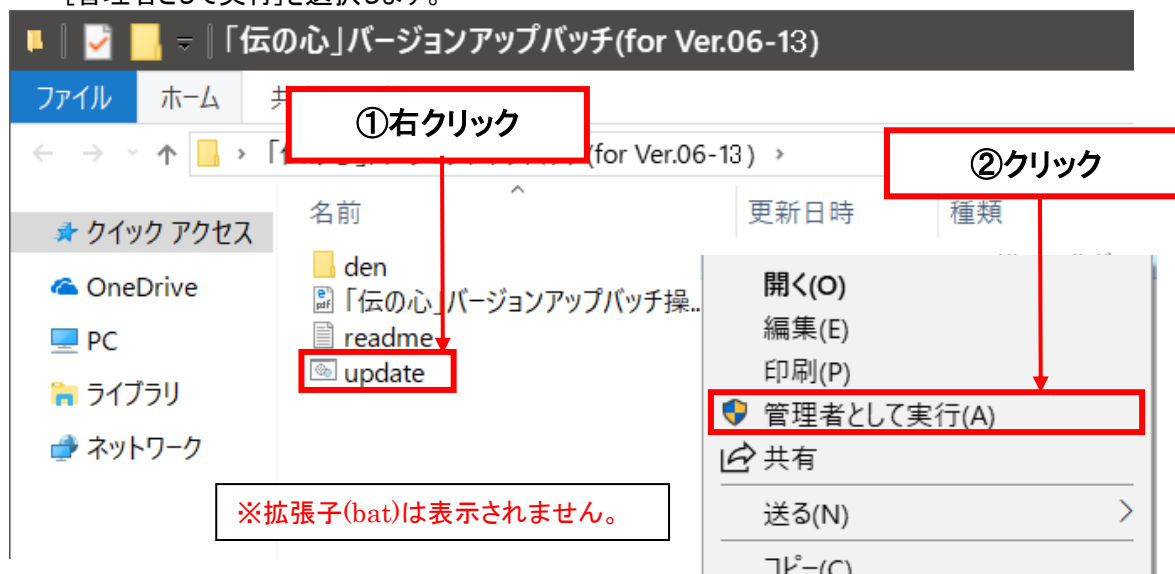

- (6) 下記画面が表示されるので、「Enter」キーを押下します。

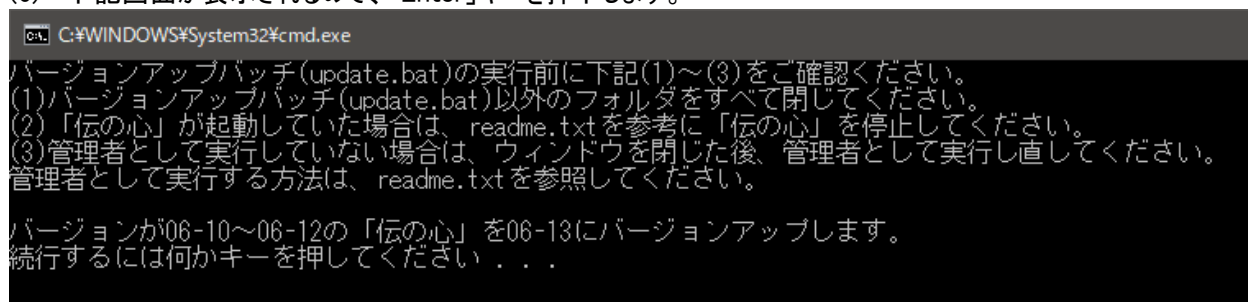


- (7) 下記画面が表示されるので、「バージョンアップが完了しました。」の表示があるのを確認して、「Enter」キーを押下します。

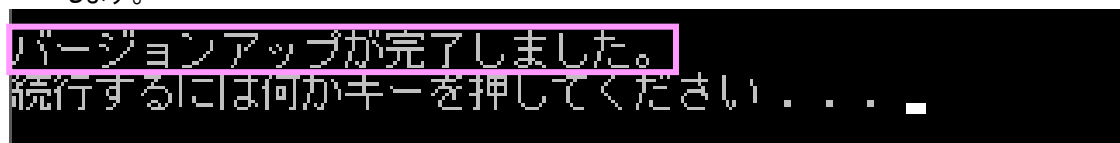


(8) バージョンアップパッチの画面が終了した後、「サポートディスク」(パネル型は USB メモリー)を取り外します。

※USBメモリーの取り外し方(パネル型の場合)

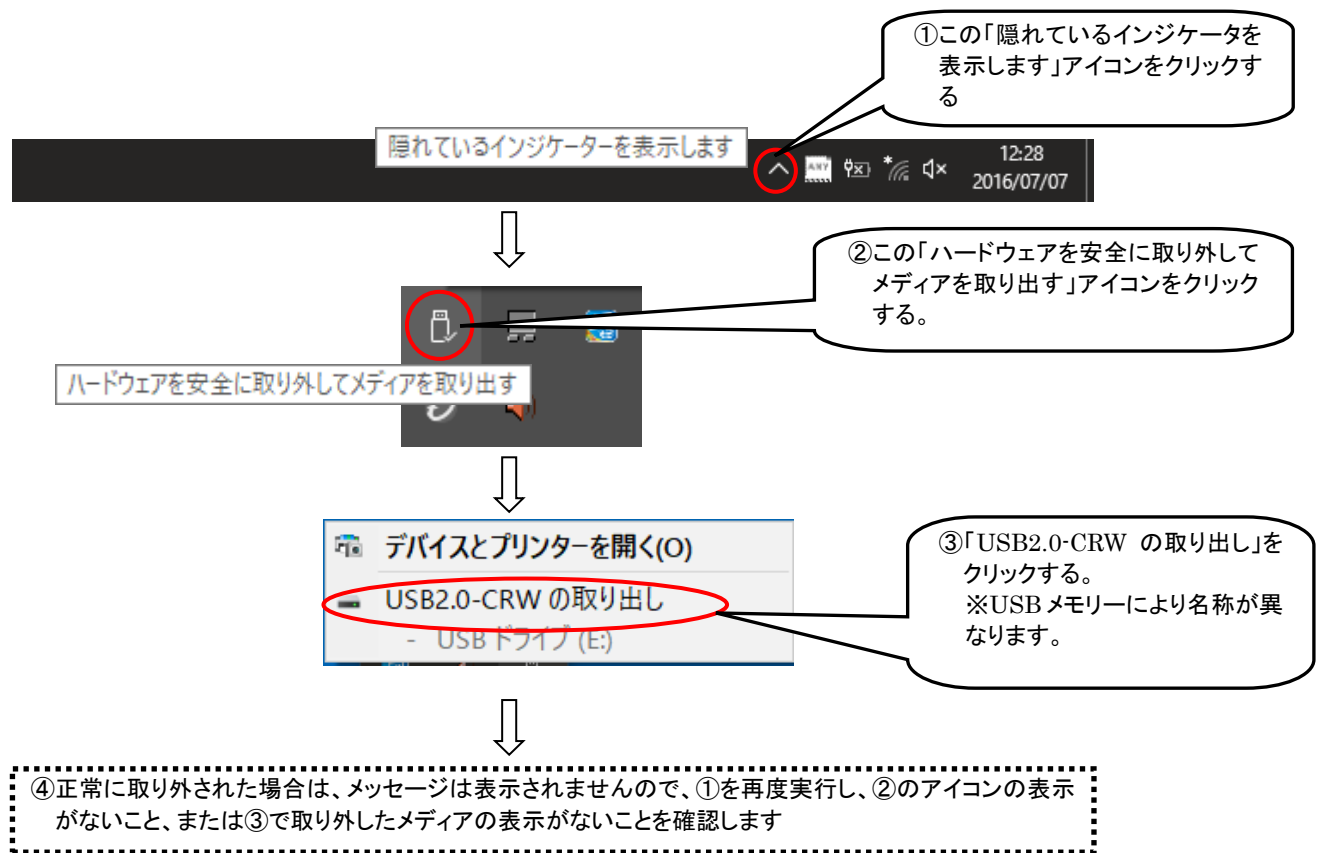

(9) 伝の心を起動して、メインメニューの右下の表記がVer.06-13になっていることを確認してください。

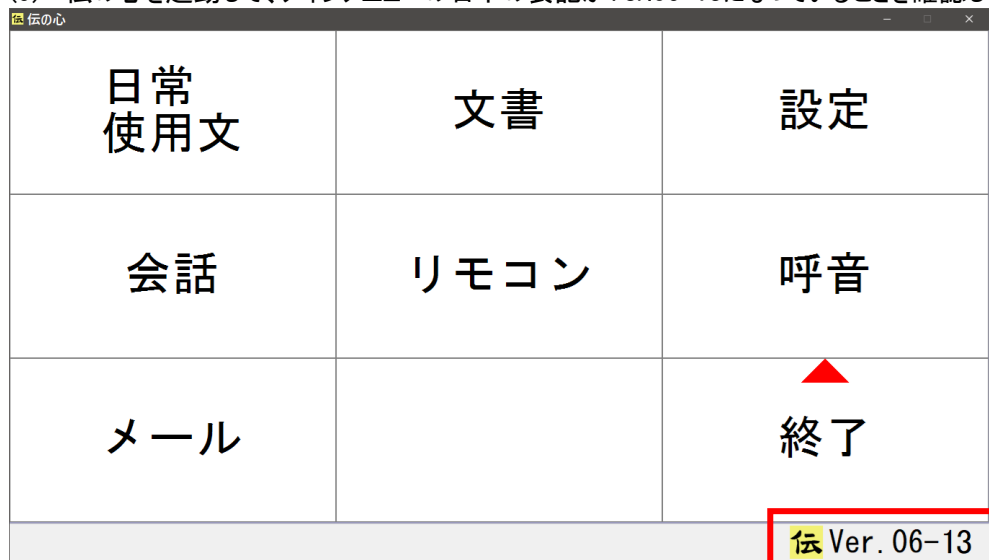

伝の心が正常に動作していることを確認してください。

【バージョンアップバッチチェックリスト】

(バージョンアップ前)Ver.06-10～Ver.06-12 → (バージョンアップ後)Ver.06-13

実行した項目には☑をご記入ください。

下線部はお客様によって異なる項目となります。バージョンのご記入、あるいは実行した方に☑をご記入ください。

□ノート型の場合

No	内容	参照頁
1	<input type="checkbox"/> 「伝の心」のバージョンを確認します。 ※メインメニューの右下に記載されております。 <u>バージョンアップ前の「伝の心」</u> <input type="checkbox"/> Ver.06-10 <input type="checkbox"/> Ver.06-11 <input type="checkbox"/> Ver.06-12	1、2
2	<input type="checkbox"/> 以下を用意します。 <input type="checkbox"/> バージョンアップをする「伝の心」 <input type="checkbox"/> サポートディスク	2
3	<input type="checkbox"/> 「伝の心」を停止します。	3
4	<input type="checkbox"/> 「伝の心」本体にサポートディスクを挿入します。	3
5	<input type="checkbox"/> 「「伝の心」バージョンアップバッチ(for Ver.06-13)」フォルダを開きます。	3、4
6	<input type="checkbox"/> update.bat(バージョンアップバッチ)を管理者として実行します。	5
7	<input type="checkbox"/> バージョンアップバッチの実行後に以下を取り外します。 <input type="checkbox"/> サポートディスク	6
8	<input type="checkbox"/> 「伝の心」を起動して以下を確認します。 <input type="checkbox"/> メインメニューのバージョンが Ver.06-13 であること。 <input type="checkbox"/> 正常に「伝の心」が動作していること。	6

【バージョンアップパッチチェックリスト】

(バージョンアップ前)Ver.06-10～Ver.06-12 → (バージョンアップ後)Ver.06-13 用

実行した項目には☑をご記入ください。

下線部はお客様によって異なる項目となります。バージョンのご記入、あるいは実行した方に☑をご記入ください。

□パネル型の場合

No	内容	参照頁
1	<input type="checkbox"/> 「伝の心」のバージョンを確認します。 ※メインメニューの右下に記載されております。 <u>バージョンアップ前の「伝の心」</u> <input type="checkbox"/> Ver.06-10 <input type="checkbox"/> Ver.06-11 <input type="checkbox"/> Ver.06-12	1、2
2	<input type="checkbox"/> 以下を用意します。 <input type="checkbox"/> バージョンアップをする「伝の心」、 <input type="checkbox"/> サポートディスク <input type="checkbox"/> USB メモリー	2
3	<input type="checkbox"/> サポートディスクより、「「伝の心」バージョンアップパッチ(for Ver.06-13)」をフォルダごと USB メモリーにコピーします。	2
4	<input type="checkbox"/> 「伝の心」を停止します。	3
5	<input type="checkbox"/> 「伝の心」本体に USB メモリーを挿入します。	3
6	<input type="checkbox"/> 「「伝の心」バージョンアップパッチ(for Ver.06-13)」フォルダを開きます。	3、4
7	<input type="checkbox"/> update.bat(バージョンアップパッチ)を管理者として実行します。	5
8	<input type="checkbox"/> バージョンアップパッチの実行後に以下を取り外します。 <input type="checkbox"/> USB メモリー(パネル型)	6
9	<input type="checkbox"/> 「伝の心」を起動して以下を確認します。 <input type="checkbox"/> メインメニューのバージョンが Ver.06-13 であること。 <input type="checkbox"/> 正常に「伝の心」が動作していること。	6